


Biztonsági övek kerekesszékbe

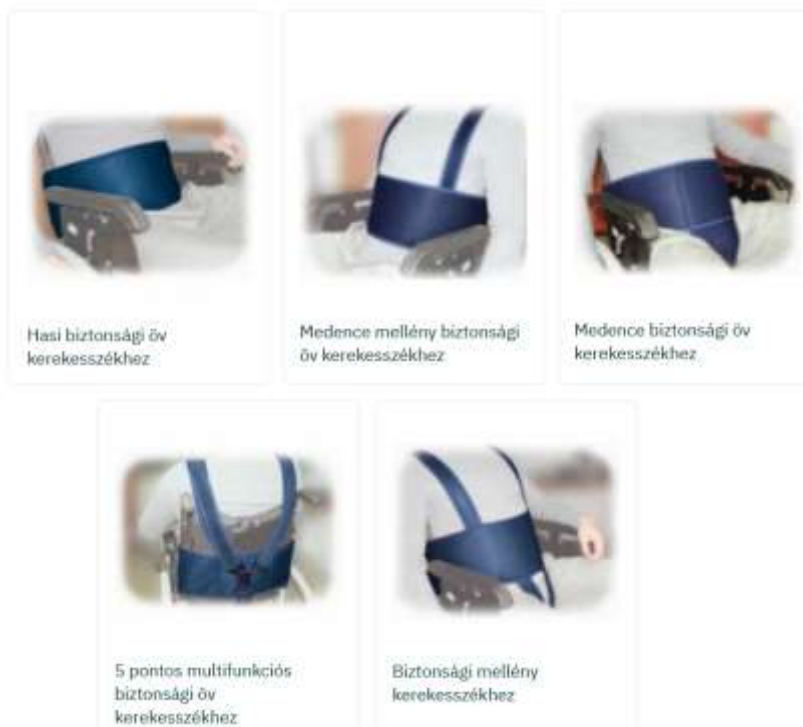

1. Biztonsági figyelmeztetések

- ♥♥ MINDIG konzultáljon orvosával vagy az eladóval a készülék megfelelő beállításának és használatának meghatározása érdekében.
- ♥♥ Ne tárolja ültéren és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (Vigyázat: magas külső hőmérséklet esetén ne hagyja a terméket az autóban!).
- ♥♥ Ne használja szélsőséges hőmérsékleten (38°C vagy 100°F felett vagy 0° vagy 32°F alatt).
- ♥♥ Gondosan ellenőrizze ennek a tételnek az összes részét.
- ♥♥ Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e húzva.
- ♥♥ Csak a megfelelő módon használja.
- ♥♥ MINDIG tartsa be a termék címkéjén feltüntetett súlyhatárt.
- ♥♥ Ezen az eszközön semmilyen módosítást nem szabad végrehajtani. A törött vagy hibás cseréhez csak eredeti alkatrészeket használjon, és ezt bízva a műszaki személyzetre.
- ♥♥ Ha hosszabb ideig nem használta a terméket, használat előtt hagyja, hogy a műszaki személyzet ellenőrizze.
- ♥♥ Kövesse a terméket felíró vagy eladó szakember tanácsát.
- ♥♥ Ezt a készüléket szakember írta fel, és megfelel Önnek, más személy ne használja.
- ♥♥ Kényelmetlenség esetén forduljon szakemberhez.
- ♥♥ Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg letelepedett.

2. Rendeltetészerű használat, javallatok és ellenjavallatok

Rendeltetészerű használat:

- az oldalsó leesés, lecsúszás megelőzésére - a medence előrecsúszásának megakadályozására - az előre vagy oldalra zuhanás megakadályozására - a személy biztonságának megőrzésére

Javallatok: alacsony izomtónusú vagy dezorientált vagy izgatott emberek (pl. Alzheimer-kór)

Ellenjavallatok: a termékkel érintkező területeken sebesült betegek.

3. Leírás és használati útmutató

A SECUBACK övek kerekesszékhez vagy gördíthető szobai wc-vel használható.

Hasi öv / SECUBACK I (Ref 681 010: 1,3m, ref 681 020: 1,5m):

Ez a párnázott öv vastag hab párnából készült a kényelem érdekében. Kerekesszékben való használatra készült, hogy megakadályozza a felhasználók előrecsúszását. Az öv hátulján található tépőzáras rögzítés megakadályozza, hogy a felhasználók eltávolítsák az övet.

Használat:

Tekerje az övet a beteg gyomra és a kerekesszék háttámlája körül. A tépőzárral rögzítse a páciens, és helyezze a tolószék hátuljára, hogy a beteg ne vegye le magától. Magassága: 20 cm Mérete: 130 cm vagy 150 cm

Medence mellény biztonsági öv kerekesszékhez /SECUBACK II (Ref 681 013: 1,3m, ref 681 023: 1,5m):

Szilárdan rögzítik a páciens és megakadályozzák a mellkas összeesését. Bármilyen kerekesszékhez illeszthető.

Használat:

Tekerje körbe az övet a beteg gyomra körül, majd húzza keresztbe a pántokat a háta mögött, és a tépőzárral rögzítse a hevederen. Mérete: 130 cm vagy 150 cm.

Medence biztonsági öv /SECUBACK III (Ref 681 011, ref 681 021):

A medence biztonsági öv kényelmes ülés helyzetet biztosít, és megakadályozza a betegek előrecsúszását. Csökkenti a nyírófeszültség és az artériák összenyomódásának kockázatát.

Használat:

Tekerje körbe az övet a beteg hasa körül, majd csúsztassa a hevedert a kerekesszék ülése alá, hogy a tépőzárral rögzítse az övhöz. Mérete: 130 cm vagy 150 cm.

Biztonsági mellény kerekesszékhez /SECUBACK IV (Ref 681 012: 1,3m, ref 681 022: 1,5m):



1- Tekerje az övet a beteg gyomra és a kerekesszék háttámlájára. A tépőzárral rögzítse a páciens, és helyezze a tolószék hátuljára, hogy a beteg ne távolítsa el magától (1. és 2. kép). 2. Keresztbe kell tenni a hevedert a hátánál, a bal tartót a bal váll felett, a jobb oldalitt pedig a jobb váll fölött (3a. fotó).

3- Rögzítse a hevedereket úgy, hogy a kerekesszék fogantyúi köré tekerje, és rögzítse őket a tépőzárak segítségével (4. kép: b és c)

4- Csúsztassa a hevedereket a beteg lába alá, a bal pántot a bal láb alá és a jobb pántot a jobb láb alá, és rögzítse őket a tolószék hátulján a tépőzár segítségével (5a és 6 kép).

Mérete: 130 cm vagy 150 cm

5 pontos multifunkciós biztonsági öv kerekesszékhez /SECUBACK V (Ref 681 014: 1,3m, ref 681 024: 1,5m)



Ez az öv különböző elemekből készül. Mindenekelőtt a fő részt [A] a háttámla köré kell tekerni, és a tépőzár segítségével rögzíteni a háttámla hátulján. Ezután helyezze el az öv többi elemét az 1. és 2. képen látható módon.

1-Tekerje a hasi övet (a) a beteg gyomra és a kerekesszék háttámlájára. Használja a tépőzárakat az öv zárásához (3. kép).

2- Rögzítse az övet (b) a hasi övre (a) a kampós zárral (4. kép). Vezesse át az öv hátsó részét (b) az ülés és a háttámla közötti résen, majd a műanyag csaton. Rögzítse magára az övet (a szövet tépőzár) a karikával és nézze meg (5. kép).

3- Rögzítse a hevedert (c) a (b) részhez a tépőzárak segítségével (7. kép). Vezesse át őket a páciens válla fölé (balra a bal oldalon és jobbra a jobb oldalon), lásd a 6. fényképet, keresztezve őket a páciens nyakán. Tekerje a hevedereket a kerekesszék fogantyúi köré, húzza át szorosan a csatokon (d), és rögzítse a tépőzár segítségével (6. kép). Mérete: 130 cm vagy 150 cm.

4. Mosási útmutató

Mossa le szappanos vízzel, legfeljebb 40°C-on. Alaposan öblítse le langyos vízzel. Csavarja ki a felesleges vizet. Szárítsa meg laposan és távol minden hőforrástól. Ne használjon mosószert vagy fehérítőt. Nem vasalható.

5. Összetétel

Lásd a termék címkéjét. Laminált szövet: 100% poliészter. Hab: 100% poliuretán

SECUBACK V öv: Belső hab – 100% PU. Alsó frott – 80% pamut, 20% PES. Felső velúr - 100% PA.

6. Ártalmatlanítás

A terméket a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

7. Műszaki előírások

Erre a termékre a vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik minden gyártási hibára. Ez a termék biokompatibilis.

JÓTÁLLÁS: 24 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.

Forgalmazó: Vital Pro Kft.

Székhely: 4211 Ebes, Zsong-völgy út 8.  +36 30 497 09 57  info@vital-pro.hu