

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / INSTRUCTIONS FOR USE



REF.: 0808520

KAPASZKODÓ KÁD SZÉLÉRE



SPECIFIKÁCIÓK:

- Könnyű felszerelés szerszámok nélkül
- A legtöbb fürdőkádhoz alkalmas
- Méretek (az alábbi képen)
- Maximális terhelés: 136 kg
- Fogantyú anyaga: PE (polietilén)

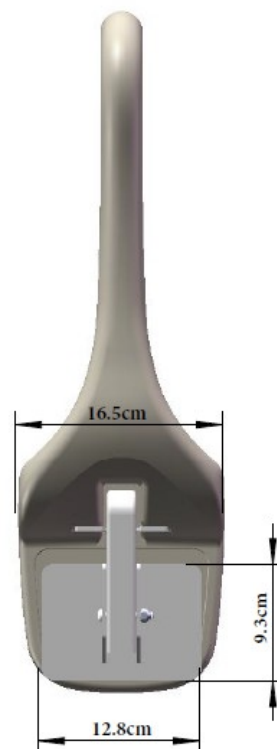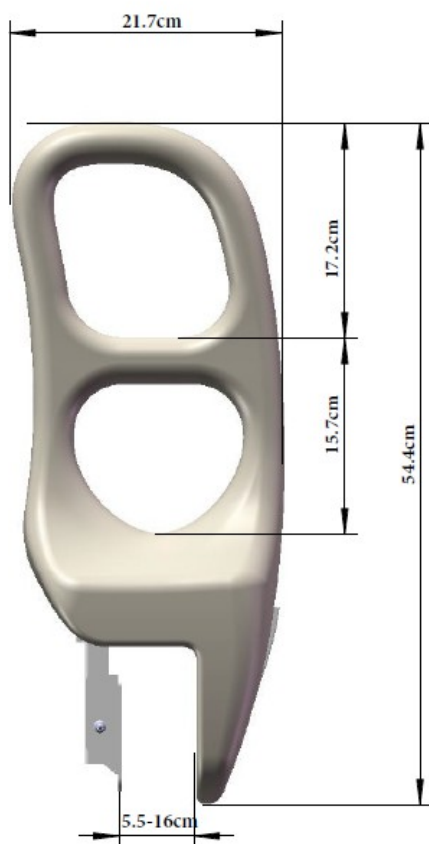

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:

A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai szint biztosítása érdekében a felhasználónak minden használat előtt el kell végeznie ezeket az eljárásokat. A felhasználónak gondoskodnia kell a termék és alkatrészeinek szerkezeti integritásáról. A tisztítási és fertőtlenítési eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kesztyűt kell viselni.
2. A részletesebb tisztítás előtt távolítsa el a látható szennyeződések.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy enyhe tisztítószer.
4. Törölje le egy száraz, tiszta ruhával.
7. Ha a terméket fertőtleníteni kell, használjon közönséges, enyhe fertőtlenítőszer.
8. Védje a terméket kopástól, vágástól és szúrástól.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Ha egy napon úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik megfelelően, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja ki termékét a többi háztartási hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal, akik tájékoztatni fogják Önt azokról az újrahasznosító központokról, ahol termékeit elhelyezheti.
- 3) Termékének megfelelő ártalmatlanítása hozzájárul a környezet védelméhez, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosításához.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Tisztítsa meg a kád felületét.

Törölje le a kád szélét egy száraz ruhával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs rajta nedvesség, olajfolt vagy por.



Távolítsa el a hátoldalon található matricát.

Távolítsa el teljesen a védőfóliát a fogantyú hátuljáról, hogy láthatóvá váljon a ragadós felület.



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ / INSTALLATION **INSTRUCTIONS**

Igazítsa és nyomja meg.

Igazítsa a fogantyú alapját a kád szélének tiszta területéhez. Mindkét kezével 10-15 másodpercig nyomja meg az alapot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a ragasztó teljesen megkötött.



A kádfogantyú rögzítője a rögzítő-kapocs mechanizmus bezárásával rögzíthető, amely a rögzítőfelületet a káddal való összes érintkezési ponton szorosan rögzíti.

A felszerelés után húzza fel a fogantyút, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az alap nem laza, és a klip nem mozdult el.



Garancia:

A termékre két (2) év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva.

A garancia gyári hibákat fedez, de NEM fedezi a helytelen használatból, rossz karbantartásból, módosításból, visszaélésből vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákat.

Továbbá NEM fedezi a kopó alkatrészeket és mindazt, ami a használat során vagy az idő múlásával elkophat.

A garancia nem terjed ki továbbá az alábbiak által okozott károkra vagy hibákra: természeti katasztrófák, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol előírva), szállító cégek.

Semmi sem fedezhető, ha azt nem ellenőrizte egy engedélyezett szerviz vagy a

a termék gyártójától. A vizsgálat szállítási költségeit a felhasználó, az ügyfél vagy a kiskereskedelmi üzlet viseli.

Garancia űrlap / WARRANTY FORM:

VÁSÁRLÓ ADATAI / BUYERS DETAILS:	
TELJES NÉV:	
VÁSÁRLÁS DÁTUMÁT PURCHASING DATE:	
TELEFONSZÁM / TELEFONSZÁM:	
LOT VAGY SOROZATSZÁM:	
KERESKEDŐ ADATAI / DEALER DETAILS	
TELJES NÉV / FULL NAME:	
CÍM / ADDRESS:	
TELEFON / TELEFON:	
BOLT PECSETJE ÉS ALÁÍRÁSA / SIGN AND SIGNATURE	