



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

MÉRET

70 x 100 cm

SZÍN

KÉK

MENNYISÉG

1



REF 3045



3045-1/N



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14,

03-310 Varsó, Lengyelország

www.rehafund.pl



Higiéniai alátét Újrafelhasználható

Védi a nedvességnek vagy szennyeződésnek
kitétt felületeket folyadékokkal vagy fiziológiai
váladékokkal való érintkezés esetén.



Vízálló termék



I. osztályú orvos technikai eszköz



Magas hőmérsékleten mosható



Nedves szivaccsal tisztítható



Lengyelországban készült

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ HIGIÉNIKUS ALÁTÉT



RENDELTESSZERŐ FELHASZNÁLÁS

Ez az újrafelhasználható egészségügyi betét egy orvostechnikai eszköz, amely felületek (pl. matracok, ágyak) védelmére szolgál a testnedvekkel (pl. vizelet, vér) való szennyeződéstől. Védi a testnedvekkel való hosszan tartó érintkezésből eredő fertőzések ellen.

JELLEMZŐK

Vízálló anyagból készült: kötött anyag: 81% pamut; 19% poliészter; védőbevonat: 100% PVC. A csomag egy betétet tartalmaz. A betétek a következő méretekben kaphatók: 70x100 cm, 70x140 cm, 100x140 cm és 140x200 cm. Elérhető színek: kék, zöld.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg vízzel és enyhe mosószerrel átitatott szivaccsal. Az anyag gőzzel fertőtleníthető 121°C-on 20 percig, legalább 50 cikluson keresztül. A betét akár 95°C-on is mosható.

ELLENJAVALLATOK Ne használja a nedves terméket közvetlenül a bőrrel érintkezve. Ne használja allergiás bőrreakciók esetén. Ne használja, ha a termék mechanikailag sérült (pl. repedt, szakadt).

FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt konzultáljon orvosával vagy rehabilitációs szakemberrel a tervezett felhasználással, a termék kiválasztásával és a használat módjával kapcsolatban.

A termékkel kapcsolatos minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Az alátétet első használat előtt ki kell mosni.

Ne fehéritse (ne használjon olyan fehéritőszereket, amelyek szabad klórt szabadítanak fel). Ne tisztítsa vegytisztítással.

Ne vasalja (ne engedje, hogy forró felületekkel, pl. radiátorokkal érintkezzen). Az alátét mindkét oldalán használható (a frontir vagy a PVC felület a beteg felé nézzen).

A vizuális és esztétikai tulajdonságok romlása (például a felületi gyűrődés) nem befolyásolja az anyag teljesítményparamétereit (fizikai és mechanikai tulajdonságok).

Garancia

A termékre 24 hónapos garancia vonatkozik. A terméket rendeltetésszerűen és a használati utasításnak megfelelően kell használni. A garancia nem terjed ki a használati utasítással ellentétes használatból, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő hibákra. A terméket tisztán kell visszajuttatni a szervizközpontba. Indokolatlan panasz esetén a vevő viseli a reklamáció feldolgozásának és benyújtásának költségeit.

A garancia a vásárlást igazoló bizonylaton alapul. A jótállási védelem területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.

Az eladott árukra vonatkozó jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszt fel a vevő azon jogait, amelyek az áru szerződésnek való meg nem feleléséből erednek.

A szimbólumok magyarázata

Gyártó	Tételkód	Tartsa tisztán	Felhasználhatósági idő	Szárítógépben szárítható
Katalógusszám	Orvosi eszköz	Napfénytől távol tartandó	Figyelmeztetés	Ne vegytisztítsa
Olvassa el a használati utasítást	CE jelölés	Ne használja, ha a csomagolás sérült	Mosás hőmérséklete max. 95 °C	Ne fehéritse
Gyártás dátuma	Modellszám	Védje a nedvességtől	Ne vasalja	

A használati utasítás kiadásának dátuma: 03.2024 v.4



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Varsó,
Lengyelország
www.rehafund.pl

I/PL/3045/4/28.03.2024