



REF : 0807110



HASZNÁLATI UTASÍTÁS: ALUMÍNIUM ELEKTROMOS LÉPCSŐSZÉK

MBK KÓD	HU LEÍRÁS
0807110	ALUMÍNIUM ELEKTROMOS LÉPCSŐSZÉK

RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁS:

A termék betegek lépcsőn, vészhelyzetben vagy a beteg gyors és biztonságos evakuálását igénylő helyzetekben történő szállítására szolgál. Kizárólag szakképzett és képzett, sürgősségi ellátásra kiképzett személyzet használhatja. Használható mentőautókban, kórházakban és sportkörnyezetben.

JAVALLATOK:

Betegek szállítására, kortól és nemtől függetlenül, vészhelyzetben vagy a beteg gyors és biztonságos eltávolítását igénylő helyzetekben.

Kizárólag szakképzett és képzett személyzet használhatja, akik "vészhelyzeti" esetekre vannak kiképezve.

ELLENJAVALLATOK:

Nem szakképzett és nem képzett személyzet számára nem ajánlott.

A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat a betegnek.

Ha a felület sérült (repedt vagy törött), ne használja a terméket.

FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket a kézikönyvben nem szereplő célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretén végzett jogosulatlan módosításokból eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.
- Mindig ajánlott a vészhelyzeti reagálásra vonatkozó eljárások betartása.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat a betegnek.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, akkor ne használja ezt a készüléket vagy más kapható alkatrészt.
- Ha nem érti a használatát vagy az óvintézkedéseket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a megfelelő műszaki személlyel, mielőtt használná a készüléket, mert ez kárt okozhat.
- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi felhasználás céljából.
- A terméket csak szakképzett személyzet használhatja.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek játszanak vagy kezeljék a készüléket.
- Különös óvatossággal kell eljárni a mozgó alkatrészek közelében, amelyek végtagbecsípődést vagy sérülést okozhatnak.

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret sérült-e a termék biztonságos használata érdekében (nincsenek-e repedések vagy törések a kereten).
2. Sérülés esetén ne használja a terméket, és további utasításokért forduljon a kereskedőhöz.
3. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve, és minden csavar biztonságosan meg van-e húzva.
4. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopási állapotát, hogy biztosítsa a termék személyek és tárgyak számára való abszolút biztonságos használatát.
5. Rendszeresen ellenőrizze a szilárdságát és a stabilitását.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:

- Csak nedves ruhát és enyhe szappant használjon a tisztítandó felületeken. Használat előtt alaposan szárítsa meg.
- Óvja a közvetlen napfénytől.
- NE hagyja nedvesen a terméket.

- Ne használjon kémiai tisztítószeret a keret tisztításához. Ez károsíthatja a termék felületét.
- Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket, például acetont.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek az 2017/745/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ha egy napon úgy találja, hogy a termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosító központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.





ESEMÉNYJELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

HIV.: 0807110 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: ALUMÍNIUM ELEKTROMOS LÉPCSŐSZÉK MŰSZAKI

JELLEMZŐK

- VÁZ ANYAGA: ALUMÍNIUM
- HÁTTÁMLA ÉS ÜLÉS ANYAGA: 602D OXFORD BŐR (PE)
- MAX. TEHERBÍRÁS: 180KG
- SPECIÁLIS SÍNNEEL TERVEZVE, A KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS LÉPCSŐKÖZLEKEDÉSÉRT
- KÖNNYŰ TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
- NÉGY KOPÁSÁLLÓ GUMIKERÉKKEL FELSZERELVE
- A RITKA ÖSSZECSUKHATÓ FOGANTYÚ HOSSZA: 26CM
- AZ ELSŐ, GOMBOS, ÁLLÍTHATÓ KAPACSONY HOSSZA: 15CM-35CM
- AZ ÁLLÍTHATÓ KAPACSONY MAGASSÁGA: 108cm, 127cm, 146cm, 164cm
- NETTÓ TÖMEG: 34KG
- TÖLTŐ: 29,4 V, 2 A
- AKKUMULÁTOR: 24 V / 13,2 AH • ÜZEMI TELJESÍTMÉNY: AC 100-240 V 50/60 Hz
- MOTOR: DC 24 V / 120 W
- IP VÉDELMI OSZTÁLY: IP33

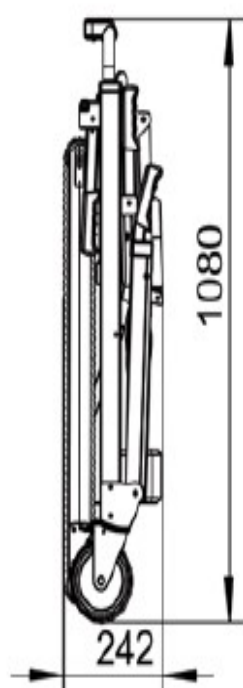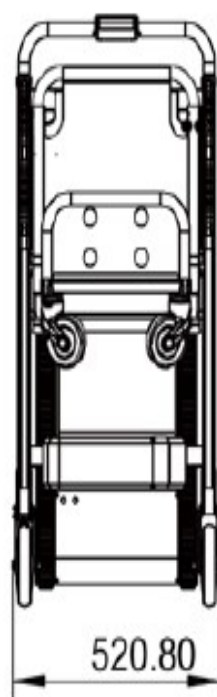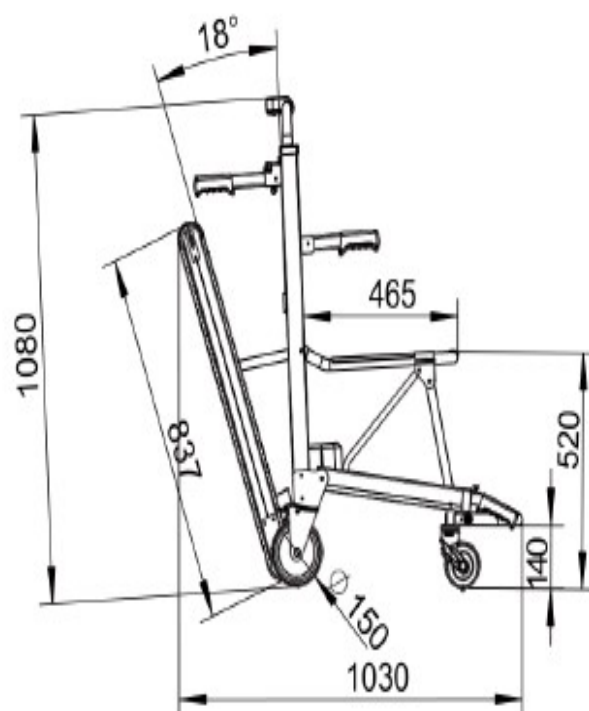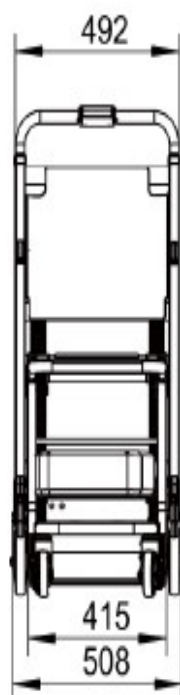



A TERMÉK HASZNÁLATA:

Nyissa ki a hordágyat



Nyissa ki a kartámaszokat



Nyissa ki a hátsó fogantyúkat az ábrán látható módon, amíg azok a helyükre nem kattannak.



Nyissa ki az elülső fogantyúkat a piros gomb megnyomásával, amíg a helyükre nem kattannak.



A sínek kinyitásához nyomja meg a piros rögzítőpedált.



Amikor a hordágy nyitott és ülő helyzetben van, az állítható rúdnak a legalacsonyabb magasságú helyzetben kell lennie.



Lépcsőn felfelé vagy lefelé haladva a kezelőnek a teleszkópos fogantyúkeret magasságát a beteg vállmagasságához közel kell állítania.



A magasság növeléséhez: Nyomja befelé a piros rögzítőrudat, és húzza a fogantyút a megfelelő magasságba, majd engedje el a rögzítőrudat, amíg a fogantyú a megfelelő magasságban nem rögzül.

A magasság csökkentéséhez: Nyomja befelé a piros rögzítőrudat, és engedje le a fogantyút a megfelelő magasságba, majd engedje el a rögzítőrudat, amíg a fogantyú a megfelelő magasságban nem rögzül.

Állítsa be a fejtámlát a beteg magasságának megfelelő magasságba.



Miután az utas helyet foglalt, állítsa be a biztonsági övet és csatolja be.



Ha a sín túl szoros vagy túl laza lesz, a mellékelt imbuszkulccsal a képen látható módon állítható.



VEZÉRLŐPANEL



- NYOMJA MEG A VILÁGÍTÁS GOMBOT: A LED KIJELZŐ BEKAPCSOL
- NYOMJA MEG ISMÉT A VILÁGÍTÁS GOMBOT: A LED KIJELZŐ KIKAPCSOL
- LÉPCSŐN VALÓ FELMENÉS: NYOMJA FOLYAMATOSAN A FEL GOMBOT
- A FELMENÉS SZÜNETELTETÉSÉHEZ VAGY LEÁLLÍTÁSÁHOZ: ENGEDJE EL A FEL GOMBOT
- LÉPCSŐN VALÓ FELMENÉS: NYOMJA FOLYAMATOSAN A LE GOMBOT
- A LÉPCSŐN VALÓ FELMENÉS SZÜNETELTETÉSÉHEZ VAGY LEÁLLÍTÁSÁHOZ: ENGEDJE EL A LÉPCSŐN VALÓ FELMENÉSÉHEZ

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE ÉS BESZERELÉSE



Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a1 az akkumulátortöltő porthoz a3 (a másik végét a2 csatlakoztassa a konnektorba) a töltéshez, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, mielőtt használná a hordágyat. Amikor az akkumulátorjelző a4 pirosról zöldre vált, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

- A töltő 100%-ra tölti az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 25%, töltés szükséges.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a töltőt.
- Ügyeljen arra, hogy a töltő ne legyen kitéve nedvességnek az akkumulátor töltése közben.
- Soha ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
- Az akkumulátort használat előtt, és legalább 2 hetente ellenőrizni és tölteni kell.
- Az akkumulátort minden használat után fel kell tölteni, és a terméken vagy azon kívül is tölthető.



Az akkumulátor belsejében található nyílásnak egy vonalban kell lennie a hordágyon található mélyedéssel. Nyomja az akkumulátort a **b1** nyíl mentén, amíg a helyére nem kattant. Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba 180°-kal, hogy rögzítse az akkumulátort a hordágyban.

Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba 180°-kal, és nyomja az akkumulátort előre a **b2** irányba az eltávolításhoz.

Nyomja meg a középső gombot, ahol négy piros lámpa található. Mindegyik 25%-os akkumulátorszintet jelent. Ne használja a terméket, ha csak egy piros lámpa világít. Töltse fel teljesen az akkumulátort, majd használja újra.

Ha alacsony töltöttségi szintet vagy feszültséget mutat, töltés szükséges.



Bekapcsolás :

Kapcsolja be az akkumulátor kapcsolóját (I) az **f1** ábrán látható módon, nyomja meg a POWER gombot – a LED kijelző kinyílik – megjelenik az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje.









Kikapcsolás:

Nyomja meg a POWER gombot, a LED kijelző kikapcsol. Zárja az akkumulátorkapcsolót (O) az **f2** ábrán látható módon.



Az akkumulátorhoz két kulcs tartozik, amelyekkel rögzíthető az egységhez.

Lépcsőn felfelé

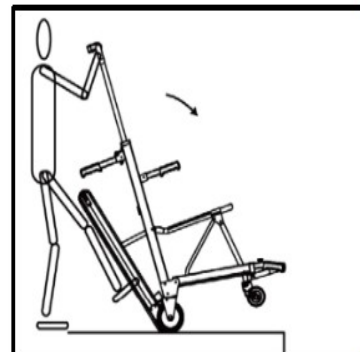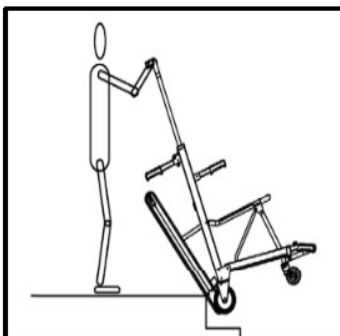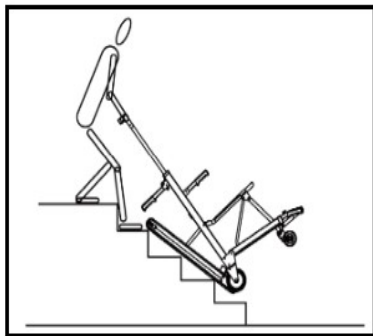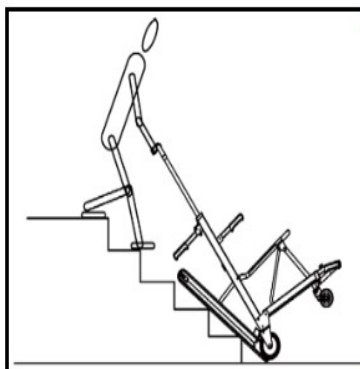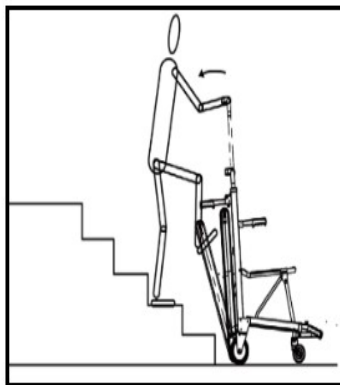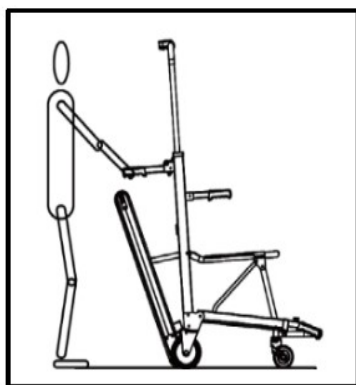

LÉPCSŐFELMEELÉS

Nyissa ki a hordágyat az ábrán látható módon, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor be van kapcsolva, állítsa az állítható kapaszkodót a megfelelő magasságba.


Állítsa be a hátsó kerekek és a létra közötti távolságot (30-40 cm), lassan döntse hátra a fogantyút, amíg a sínek el nem érik a létra fokait.

Nyomja meg a BE/KI gombot a hordágy emelésének megkezdéséhez, miközben enyhén nyomja meg az állítható tartórudat, hogy a járókerekek a lépcsőfokokon maradjanak.

Nyomja folyamatosan a FEL gombot, és ezzel egyidejűleg másszon fel a lépcsőn. Ha szünetre vagy megállásra van szükség, engedje el a FEL gombot.

Megjegyzés: amikor a sínek egy vagy két lépcsőfokon vannak, ügyeljen arra, hogy enyhén nyomja le az állítható tartórudat, hogy megakadályozza a hordágy előrebillenését.

Amikor minden kerék eléri a lépcsőpihenőt, engedje el a FEL gombot, fogja meg a fogantyút, és lassan hajoljon előre, hogy mind a négy kerék a földön álljon.

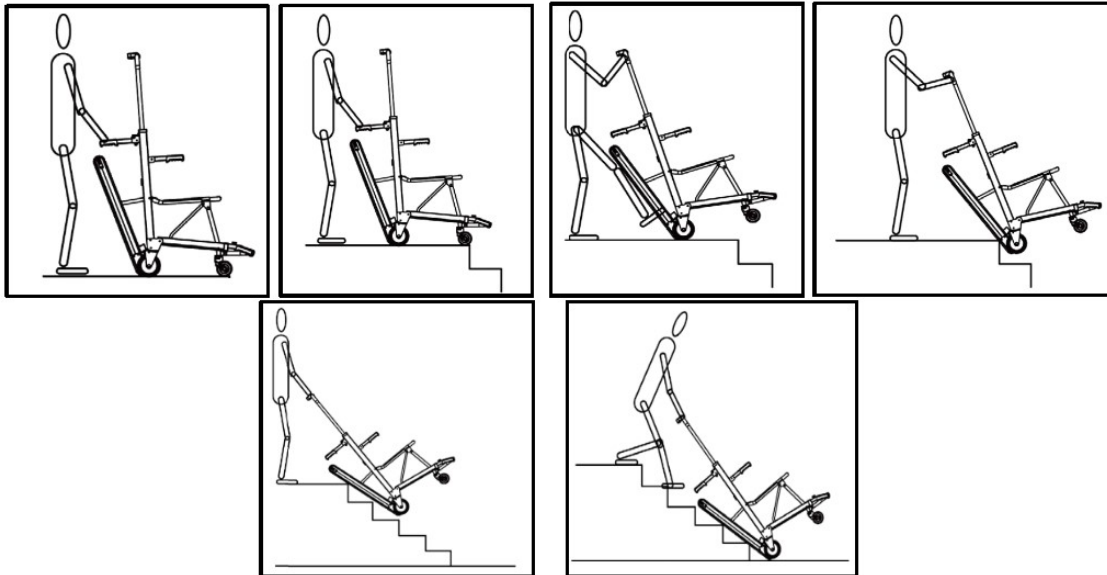

LEFELÉPÉS A LÉPCSŐN

- Nyissa ki a hordágyat az ábrán látható módon, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor be van kapcsolva, állítsa az állítható kapaszkodót a megfelelő magasságba.

- Tolja a hordágyat a létra felé, állítsa be a hordágyat és a síneket az ábrán látható módon.

- Amikor az első kerekek elérik a lépcső szélét, döntse hátra a hordágyat, amíg a sínek a padlót nem érintik az ábrán látható módon, majd nyomja meg a LE gombot.


- Miután a sínek lefedik az első lépcsőfokot, állítsa be a hordágyat úgy, hogy a sínek 2-3 lépcsőfokot fedjenek le.

- Ha szünetre vagy megállásra van szükség, engedje el a LE gombot.

- Megjegyzés: amikor a sínek egy vagy két lépcsőfokot fednek le, nyomja kissé lefelé a fogantyút, hogy megakadályozza a hordágy előrebillenését.

- Amikor a sínek elérik a padlót a lépcső alján, engedje el a LE gombot, majd lassan döntse előre a hordágyat, amíg mind a négy kerék a padlón nem lesz.

Fogd meg a hátsó fogantyúkat, és told a hordágyat a következő lépcsőfokhoz.

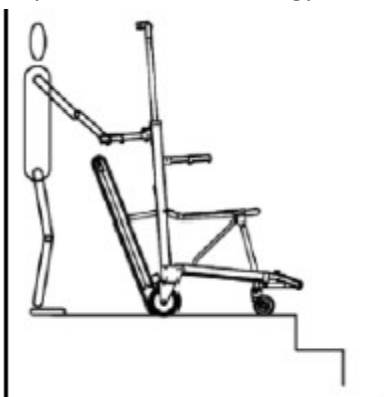

GARANCIA

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra.

NEM vonatkozik továbbá azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elkophatnak.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben) és szállítás okozta károk vagy hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A szervizelés és az alkatrészcsere csak akkor lehetséges, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális áruk szállítási költségeit a végfelhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön található szimbólumok leírása

	GYÁRTÓ		TERMÉK SZÁM		OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	CE JELÖLÉS		GYÁRTÁSI DÁTUM		ORVOSI ESZKÖZ
	TÉTEL SZÁM		NE HASZNÁLJA HA CSOMAGOLÁS		EGYEDI ESZKÖZ AZONOSÍTÓ
	CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA		ÓVATOSAN KEZELJE		ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

