

HU



HASZNÁLATI UTASÍTÁS: ÁGYASZTAL



REF: 0806645, 0806646



Rendeltetésszerű használat:

Az ágy fölé helyezhető asztalok elsősorban ágyhoz kötött emberek számára készültek, akiknek segítségre van szükségük az étkezéshez vagy egy könyv olvasásához. Az étel vagy a könyv az asztalra helyezhető anélkül, hogy a felhasználónak ki kellene kelnie az ágyból. Használhatók azonban ágyon vagy széken is, akár kórházban, akár otthon.

Általános figyelmeztetések:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, akkor ne használja ezt a terméket vagy más kapható alkatrészt. Ha nem érti a használatát vagy az óvintézkedéseket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a megfelelő műszaki személlyel, mielőtt használná a terméket, mert ez kárt okozhat.
- Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek a termékkel játszanak.
- Ne lépje túl a maximális teherbírást.

Használat előtt:

1. Ellenőrizze, hogy a keret sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincsenek repedések vagy törések a kereten.)
2. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ügyeljen a gombok és csavarok rögzítésére.
4. Győződjön meg arról, hogy az ágy feletti asztalt tartó padlófelület sík.
5. A beállítási műveleteket teher nélkül végezze.
6. Az emelés során mindig segítse a felhasználót.

Használat közben:

A segítőnek a lehető legnagyobb gondossággal kell elhelyeznie és beállítani az ágy feletti asztalt, hogy elkerülje a hirtelen mozdulatokat vagy a veszélyes lengéseket. A segítőnek ellenőriznie kell a felhasználó minden mozgását.

Ne támaszkodjon az asztal szélére, mert balesetveszély áll fenn.

Ne lépje túl az asztal maximális terhelhetőségét.

Karbantartás és tisztítás:

- Minden használat után tisztítsa meg az asztal felületét puha ruhával.
- Gyakran tisztítsa meg a termék minden részét.
- A szennyeződéseket, olajat vagy törmeléket el kell távolítani az asztal felületéről.
- A tisztítandó felületeken csak ruhát és enyhe szappant használjon.
- Ezután tiszta ruhával szárítsa meg alaposan a termék használata előtt. Ne hagyja nedvesen az asztalt.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.



FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos és képzett képviselővel.
- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék vázának jogosulatlan átalakításából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Környezetvédelem:

Ha egy napon úgy találja, hogy a termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosító központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.


ESEMÉNYJELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatban bekövetkező minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

	0806646	0806645
	Ágyasztal, rögzített	Ágyasztal, dönthető lappal
Keret	Acél	Acél
Felszín	Fából készült	Fából készült, dönthető funkcióval és speciális olvasáshoz való támasztékkal
Szín	Barna	Barna
Felszín méretek (H. x Sz.)	77x38 cm	80,5 x 38 cm (20+60,5 x 38 cm)
Kerekek	Négy fékezhető görgővel rendelkezik	Négy fékezhető görgővel rendelkezik
Emelés	Manuális	Manuális
Magasság állítható	75-126 cm	75-126 cm
Max. terhelés	15 kg	15 kg
Termék súlya	9,6 kg	9,2 kg



0806646-hoz: Az ágy fölé helyezhető asztal beszerelési alkatrészei az 1. ábrán láthatók


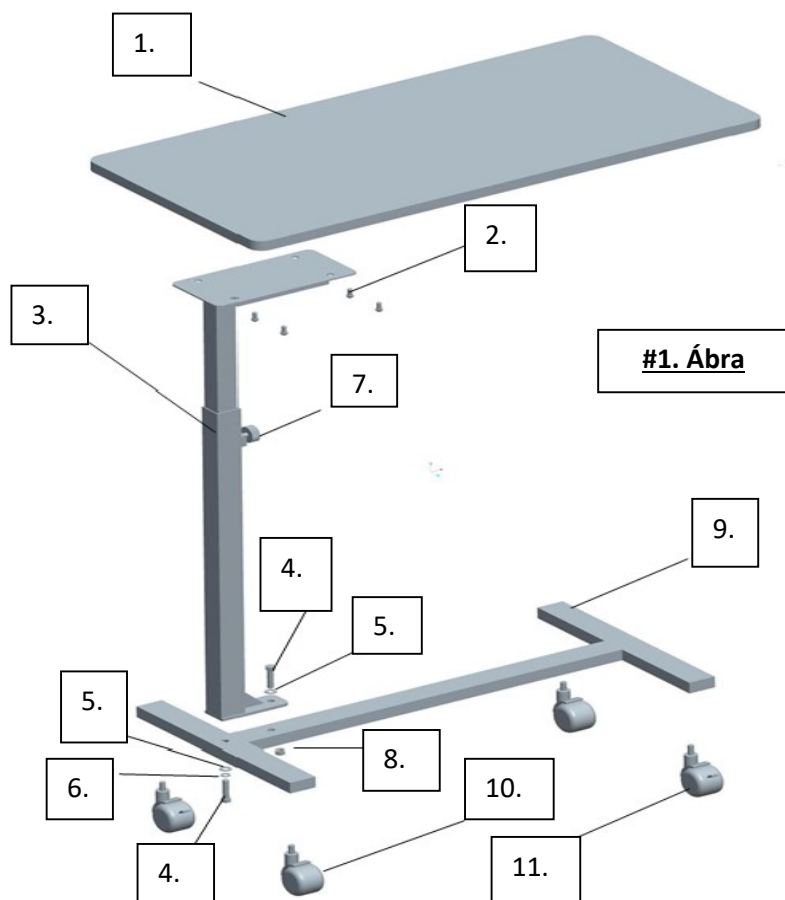


#1. Ábra

Összeszerelési rajz:

Magasságállítás:


Lazítsa meg a gombot, és emelje fel az asztallapját az asztal felemeléséhez, majd húzza meg a gombot az ideális helyzetben; Lazítsa meg a gombot, és nyomja le az asztallapját az asztal leengedéséhez, majd húzza meg a gombot az ideális helyzetben. Lásd a 2. ábrát.

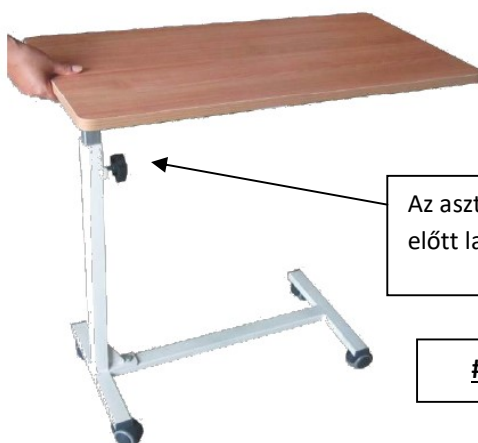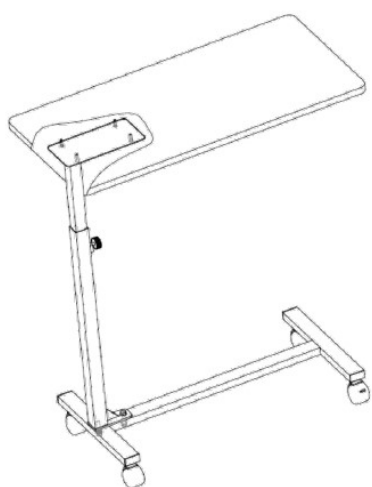

Az asztal felemelése vagy leengedése előtt lazítsa meg a gombot.

#2. Ábra

0806645-hoz: Az ágy fölé helyezhető asztal beszerelési alkatrészei a 3. ábrán láthatók

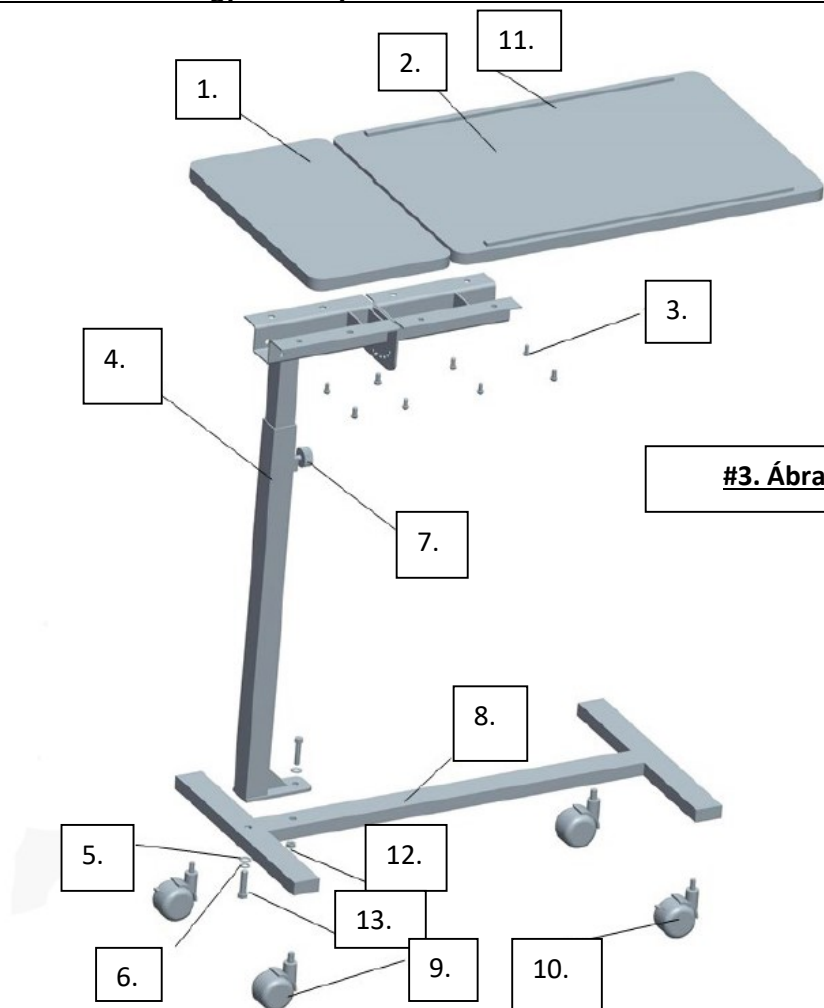


#3. Ábra

- 1.** Fix asztallap
- 2.** Dönthető asztallap
- 3.** M6-os csavar
- 4.** Emelőrúd
- 5.** $\Phi 8$ -as alátét
- 6.** $\Phi 8$ -as rugós alátét
- 7.** Gomb
- 8.** Alapkeret
- 9.** Forgógörgő
- 10.** Rögzíthető görgő
- 11.** Olvasótartó
- 12.** M8-as anya
- 13.** M8-as csavar

Magasságállítás:

Lazítsa meg a gombot, és emelje fel az asztallapját az asztal megemeléséhez, majd húzza meg a gombot az ideális helyzetben; Lazítsa meg a gombot, és nyomja le az asztallapját az asztal leengedéséhez, majd húzza meg a gombot az ideális helyzetben. Lásd a 4. ábrát.

Összeszerelési rajz

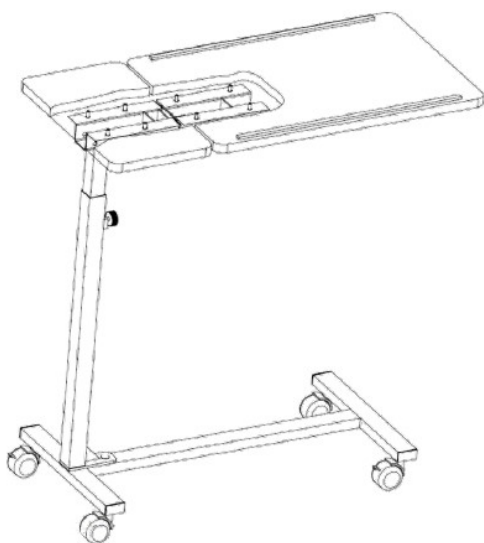

Az asztal felemelése vagy leengedése előtt lazítsa meg a gombot.


#4. Ábra

0806645-ös modell: Dőlésszög beállítása:

Húzza előre az elülső deszkát, győződjön meg arról, hogy a deszkán lévő csavar kijött a csavarlyukból, forgassa el a deszkát az ideális helyzetbe, nyomja hátra a deszkát, és illessze a csavart a lyukba az ideális dőlésszög eléréséhez. Lásd az 5. ábrát.



#5. Ábra

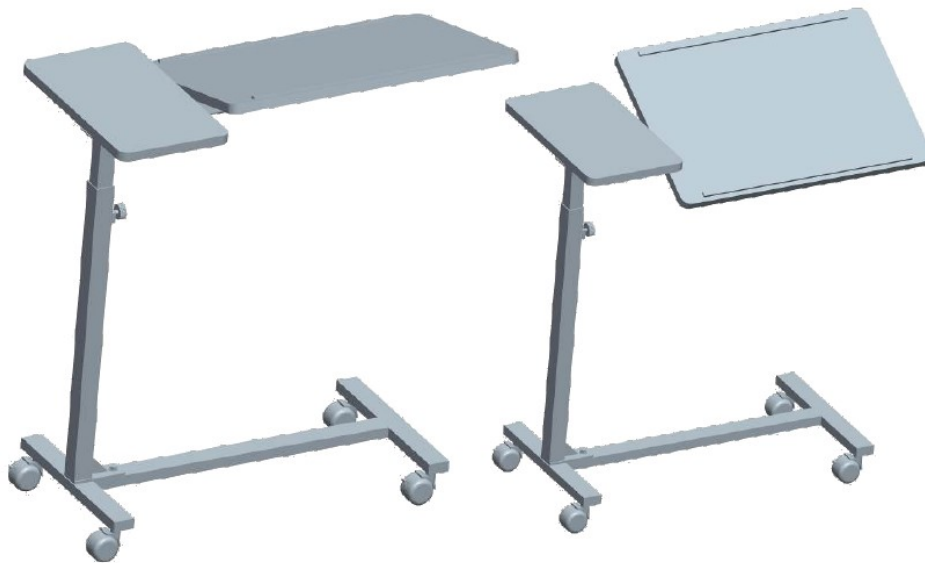

Garancia:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá a használat vagy idő múlásával elkopó alkatrészekre.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (ahol alkalmazható), valamint a szállítók által okozott károkra vagy hibákra a garancia nem vonatkozik.

A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön nyomtatott szimbólumok leírása

	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati utasítást
	Sorozat szám		Ne használja ha a csomagolás sérült
	Tételszám		Rögtön felfelé
	Egyedi eszközazonosító		Napfénytől távol tartandó
	Tartsa szárazon		Halmozási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hullékáról szóló irányelv

 MOBIAS S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com


MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

