



Állítható magasságú összecsukható szoba WC

0804455

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ: BÉZS SZÉK



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A fix, megerősített WC-t mozgáskorlátozottak is használhatják a házban, valamint a WC mosdókagylójának segédeszköze is lehet a csésze nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

- Keret acélból.
- Állítható magasságú.
- Görgőkkel (Ref: 0804456)

REF.:						
0804457	45cm	40cm	62cm	41-56cm	6Kg	115Kgr
0804455	45cm	41cm	55cm	46-56cm	6,5Kg	115Kgr
0804456	45cm	41cm	55cm	49-59cm	7.2Kg	115Kgr

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Használat után azonnal tisztítsa meg a WC-tartályt. Kezdetben öblítse le meleg vízzel. Ezután használjon enyhe tisztítószerrel vagy fertőtlenítőszerrel átitatott puha ruhát. Törölje le tiszta, puha ruhával.

FIGYELEM: Ne használjon savas és maró hatású higításokat.

Javasoljuk, hogy a terméket enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, hogy megóvja az olajfoltoktól és a portól. Általános gyakorlat az antibakteriális szappan és víz keverékével töltött spray-palack használata. Permetezze be a felületet, majd törölje le tiszta törülközővel. A legjobb megoldás az, ha enyhe szappannal kevert meleg vízzel lemossuk, majd alaposan megszárazítjuk.

Ne dohányozzon és ne használjon lángot a termék közelében.

Védje a terméket a karcoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

FONTOS!

A komód szék használata előtt győződjön meg a következőkről:

- Teljesen kinyújtott állapotban van, és ebben a helyzetben reteszelve van.
- A kerekek (ha vannak) szilárdan rögzítve vannak.
- Az ülés megfelelően van elhelyezve és rögzítve ebben a helyzetben.
- A tartály megfelelően van behelyezve a megfelelő nyílásba.
- Nincsenek repedések vagy törések a kereten.

FIGYELEM

Ha a fentiek bármelyikében probléma lép fel, **NE HASZNÁLJA** a komódszéket, amíg a probléma meg nem oldódott.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK

- Amikor ül vagy feláll a komódfotelből, nyomja le a fogantyúkat, így biztosítva, hogy a szék egy helyben álljon és ne csússzon el.
- Amikor kiszáll a komódból, mindkét fogantyúra egyformán támaszkodnia kell. Ha csak egy fogantyúnak támaszkodik (kíséret nélkül), sérülést okozhat vagy károsíthatja a terméket.
- Rendszeresen tisztítsa meg a komódszéket.
- Ne hagyja, hogy a komód szék nedves legyen.
- Ne engedjen gyermekeket a komód szék közelébe felügyelet nélkül.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.
december 21. [7]

KÖRNYEZETVÉDELLEM

Ha egy nap úgy találja, hogy eszközét ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a készüléket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti az újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba hatóságaival, és ők tájékoztatják Önt a Újrahasznosító központok, amelyekbe a készülékeket kell leadni.
- 3) A készülék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét és a készülék alkatrészeinek újrahasznosítását.

GARANCIA

A termékre 1 év jó működési garancia van. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákra. NEM vonatkozik továbbá az elhasználódott részekre, például a fékekre, és bármire, ami használat közben vagy idővel megsérül. A jótállás nem vonatkozik a következők által okozott károkra vagy meghibásodásokra: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ha van), szállítócégek.



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi
eszközzazonosító



Napfénytől távol
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri
használat



Berendezési irányelv

B. MELLÉKLET ÖSSZESZERELÉS HÍV: 0804455 és 0804456

*A 0804455 számú termékhez nincsenek görgők.

A csomag tartalma a 0804456-os tételhez



A csomag felbontása után.



Emelje fel az összekötő oldalt a háttal párhuzamosan. Ezután helyezze el a görbéket a megfelelő pozíciókba, és addig nyomkodjuk, amíg be nem rögzül.



Helyezze a tartályt a megfelelő helyzetbe (a kerekesszék elülső oldaláról).



Helyezze el az ülést.



Helyezze fel a fedelet.

