


Használati utasítás

BOB / BOBY fűrdőkád ülőke

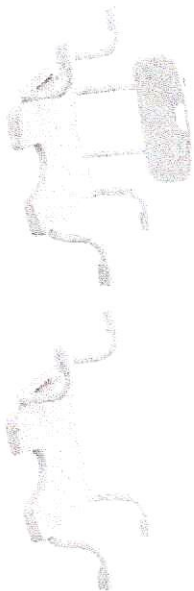

Megfelelőségi nyilatkozat

A leírt termékre a DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG kijelenti, hogy megfelel az (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek.

Élettartam

Vállalunk öt év élettartamot feltételez ennek a terméknek mindaddig, amíg a terméket rendeltetésszerűen használják, és minden karbantartási és szervizkövetelményt betartanak. Ez az élettartam jelentősen meghaladható, ha a terméket körültekintően kezelik, javítják, karbantartják és használják, és a tudomány és a technológia további fejlődésén alapuló műszaki korlátok nincsenek. Az élettartam azonban jelentősen lerövidülhet a szélsőséges és nem megfelelő használat miatt. Az élettartam cégünk általi meghatározása nem jelent további garanciát.

Ártalmatlanítás

Ha már nincs szüksége a termékre, forduljon szakkereskedőjéhez, vagy vigye el a terméket a helyi hulladékgyűjtő központra.

Termék címke:



1 Cikkszám | 2 Cikk neve | 3 Gyártó | 4 Sorozatszám | 5 UDI kód | 6 Max. rakomány | 7 Kövesse a használati utasítást | 8 Orvosi eszköz | 9 Gyártási dátum (év-hónap)

Újrahasználat

Ez a termék újra felhasználható. Figyeljünk figyelmet, hogy a biztonságos kezeléshez szükséges összes műszaki dokumentumot az új felhasználónak is át kell adni. A terméket a szakkereskedőnek ellenőriznie kell, meg kell tisztítani és vissza kell állítani az optimális állapotba. Az előkészítés során mindig kövesse a gyártó utasításait, ezeket kértesse rendelkezésre bocsátjuk. A tartozékok beszerzhetőek szakkereskedőtől vagy a www.driveveibiss.de oldalon.

Javallat:
Bármely fűrdőkádra felszerelhető a fűrdőkád ülőke. Segítség nélkül saját használatra kifejlesztett segédeszköz.
Használata segít az alsó, vagy felső végtag funkcionális betegségekben szenvedők számára. Egysúlyzavarban szenvedők számára csak felügyelet mellett javasolt használni.

- Csomag tartalma:
1. ülőlapp vázsal
 2. jobb oldali felüggeszítő váz
 3. bal oldali felüggeszítő váz
 4. háttámla (csak a háttámaszos verzióban)

Összerelés:
Helyezze a bal és a jobb oldali felakasztó vázat az ülőlapp alá található csővázába. A állító gomb megnyomását követően állítsa be a kívánt szélességet. Ellenőrizze a folyamat végén, még a használat előtt, hogy a rögzítő gombok megfelelően vannak-e a turában.

Tisztítsa meg a fűrdőkád szélét és ezt követően helyezze akassza fel a fűrdőkád ülőkét.

A háttámlát helyezze az ülőlapp alá található csővázába, majd a rögzítő gombbal állítsa a kívánt pozícióba. A használat megkezdése előtt újbol ellenőrizze, hogy a háttámla rögzítése megfelelő-e.

Használatkor ellenőrizze, hogy az ülőke megfelelő szélességre van-e beállítva és a lehető legnagyobb felületen támaszkodó-e a fűrdőkádra.

Biztonsági tanácsok:
Ne használja a fűrdőkád ülőkét, ha sértült.
120 kg-nál jobban ne terhelje.
A kád szélén megfelelően támaszkodjon fel az ülőke.

Tisztítás:
Ne használjon szűrőszert, Nedves ronggyal és általános tisztító szerrel, 60 fokon tisztítsa a terméket.

Technikai adataik:
Maximális terhelhetőség: 120 kg
Ülőlapp mérete: 41x41 cm
Beülő szélesség: 45,5-57,5 cm
Teljes szélesség: 71-83 cm
Háttámla magassága: 38 cm
Szín: Fehér
Súly: 2,4 kg háttámla nélkül és 3,1 kg háttámlával
Váz: alumínium.

MEDIGOR
www.gyogyszereszet.hu

MEDIGOR BT
8200 Veszprém,
Bezerédi u. 2.
www.ovovaszall.hu
Tél: 88/412-186
Mobi: 30/906-1006
Email: info@gyogyszereszet.hu

Garancia: 24 hónap.
Dátum: _____
Forgalmazó: _____
Gyártó: Drivemedical GMBH Germany

