

Használati utasítás

MEDIGOFIT-S elektromos betegágy

FIGYELEM! A használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az ágy más személy használata esetén adja át a használati utasítás is.

Leírás. 4 részes elektromos betegágy. A fejrész 0-70 fok között, a lábész 0-40 fok között állítható. Ágyrács mérete: 90x200 cm, magasság állítás: 39,5-82 cm, 100 mm-es fékezhető kerekek.



Használatba vétel előtt fertőtlenítő szerrel letörölhető az ágy. Nemzetközi standardoknak megfelelő ágy az EU területén forgalomba hozott.

Az ágy otthoni, vagy intézményi használatra javasolt 150 cm feletti magasságú és 170 kg-ot meg nem haladó személy részére. Használatával növelhető a mozgásában korlátozott beteg önellátási foka, kényelme.

Figyelem! Az ágy nincs fertőtlenítve a kórházi használat megkezdéséhez. Az ágy nem megfelelő elektromos orvosi eszköz rajta történő használatára. Az ágy nem megfelelő a rajta fekvő beteg transportjára hosszabb távon. Az ágyon használt adidecubitus rendszerek esetén javasolt a távirányítón az ápolói zárat élesíteni. Minden elektromos madzaggal ellátott eszköz használata esetén külön figyelemmel kell lenni arra, hogy a mozgó alkatrészek ne okozhassanak sérülést és ezen keresztül áramütés az ágyban fekvő személy részére.

Nem használható az ágy:

- terhelési határt meghaladó súlyú beteggel
- azon beteg számára, aki nem megfelelően betanított az ágy használatára
- gyermekek számára
- hajlított pozícióban mozgatni az ágyat
- 5 foknál nagyobb lejtésszögű talajon

Az ágy használata esetén be kell tartani az ápolásra vonatkozó helyi szabályokat, törvényeket. Az ágy használatát csak arra betanított személy használhatja.

Használat alatt minden körülmény figyelembe kell venni, amely baleset veszélyt okozhat. Különösen figyelni ki az ágy részeinek mozgatásakor, hogy végtag becsípődést, nyomódást ne okozzon.

NE ÜLJÖN AL ÁGYRA, MIKÖZBEN A LÁBVÉG MOZGÁSBAN , VAGY FELHAJTOTT ÁLLÁSBAN VAN!

Figyeljen arra, hogy gyermek ne legyen a távirányító közelében, illetve háziállat ne kerüljön az ágy alá.

Szellemi hanyatlásban szenvedő ápolást beteg esetében minden esetben kerüljön ápolási zár a távirányítóra.

Amennyiben az oldalkorlát használatra kerül, tartsa be az alábbi szabályokat:

- csak az ágy gyártmányával azonos korlátot használjon
- csak képzett személy végezze annak felrakását és használatát
- csak teljes alsó és felső állásban rögzítse a korlátokat
- fokozatosan engedje le a korlátokat, ne engedje, hogy lezuhanjanak
- az ágy részeinek mozgatása esetén ellenőrizze, hogy a beteg lába, keze nem került-e a korlát és matrac közé
- a korlát arra szolgál, hogy a beteg ne essen ki az ágyból, de arra az esetre nem megfelelő, ha képest átmászni felette

- a korlát csak arra az esetre biztosítja a leesés meggátlását, ha a fej és láb rész horizontálisan le van engedve
- amennyiben a matrac vastagság miatt 22 cm-nél kevesebb a korlát felső részéhez viszonyított magasság, akkor emelni kell a korláton opcionális vásárlással
- a korlát egyes részei között 12 cm-nél nem lehet nagyobb rés

Az ágy mozgatása közben húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

Stabil helyzetben a hálózati csatlakozás folyamatos legyen, hogy vészhelyzetben mozgatni lehessen az ágyat. Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel semmilyen tárgyba ne csavarodjon bele.

Sérült hálózati aljzatot ne használjon tápellátásra.

Elosztót azért ne használjon, mert folyadék lecsorgás áramütést okozhat.

Tisztításkor, vagy fertőtlenítéskor különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy folyadék ne kerüljön a távirányítóba, vagy a motorba. Ezért ezeket távolítsa el a művelet megkezdése előtt.

Az ágy az állandó helyén legyen befékezve. Ellenkező esetben elgurulhat kiszálláskor, beszálláskor és balesetet okozhat.

Az ágy mozgatásának megkezdése előtt mind a négy kerék fékét ki kell iktatni.

Robbanásveszélyes helyen ne használja az ágyat.

A használatot végző személyek részére mindig legyen elérhető a használati utasítás.






Szállítás:

Az ágy a moduláris szerkezete miatt könnyen szállítható. A transport kerekeken könnyű manőverezni az ágy mozgatás közben.



Összeszerelés:

A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alkatrészek épek-e. Hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Az alábbi részeknek kell meglenni:

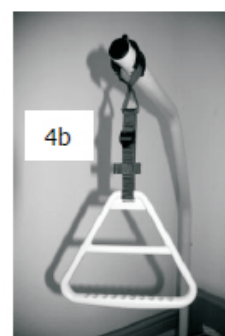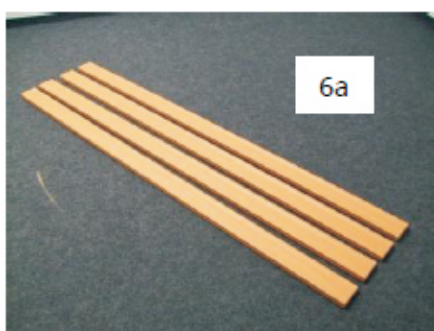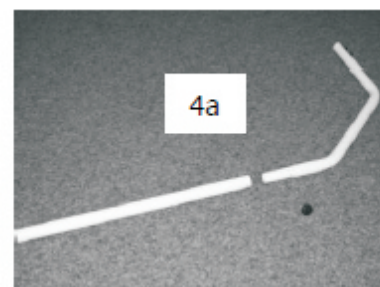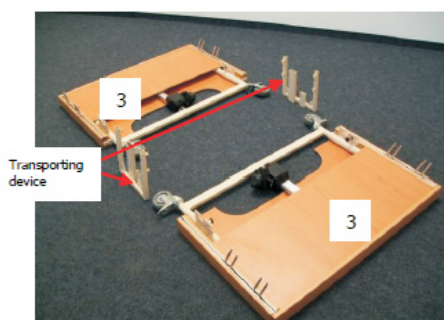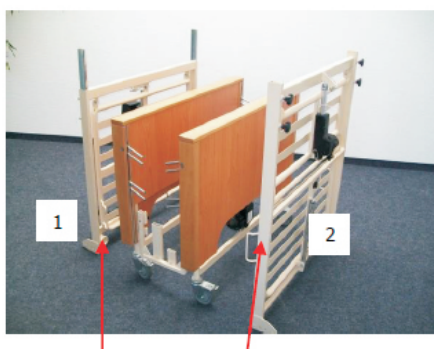



5b



5a




6b




- ágyrác lábrésze
 - 2 db ágyvég
 - (4a és 4b), kapaszkodó és háromszög
 - (5a) hálózati táp
 - (6a és 6b) oldalkorlát végekkel
 - használati utasítás
- Csomagolja ki az összes alakrészt.

Először emelje ki az ágyrác fejrészt, majd lábvégét a kép szerint.

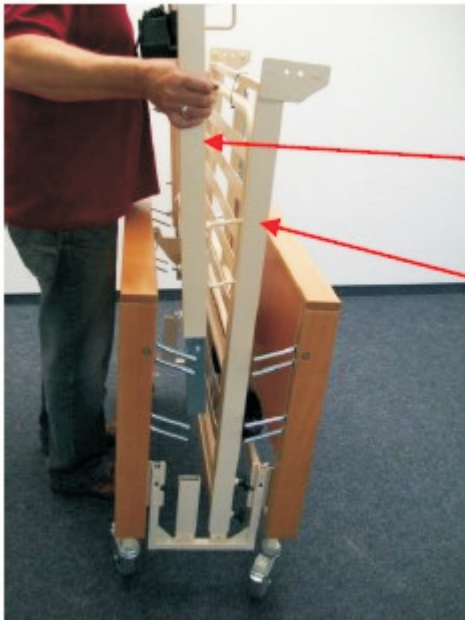

2. Ágyrác fejrésze

1. Ágyrác lábrésze

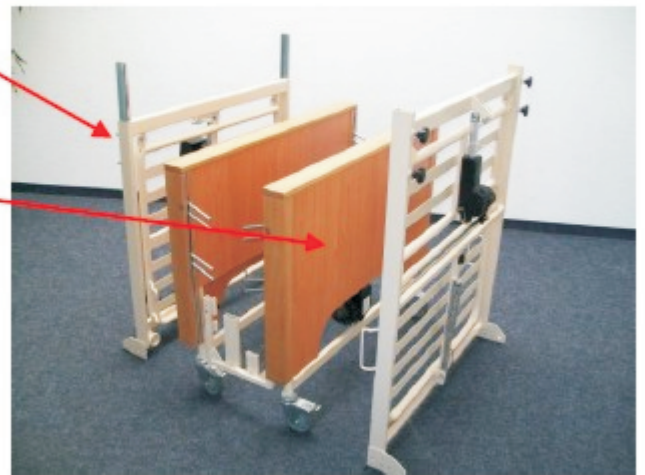

Távolítsa el a távirányító és a kábelek rögzítőkötését.



Távirányító




Hálózati kábel
FIGYELEM!
Át ne vágja a kábelt!

Ezt követően távolítsa el az ágyvégeket úgy, hogy a transzport eszközön található reteszt húzza ki és fordítsa el 90 fokkal. Ezt követően az ágyvégek leemelhetők.



Húzza ki a reteszt és fordítsa el 90 fokkal

Szerelje le a tartóról az ágyvégeket

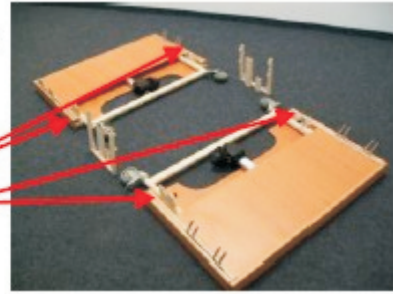

Távolítsa el a háttámasz mozgató motor kötését, majd ugyan így a lábemelő motor kötését. **FIGYELEM!** Tartsa meg a motort a kötés átvágásakor, mert különben leeshet és nekicsapódhat valaminek.



FIGYELEM!




A motor a szállítási, alvó pozíciójában van szerelve a csomagban. A kötések eltávolítását követően helyezze a működési pozícióba a motort és biztonsági csapot rögzítse ismét.

A motor egység villás csatlakozását helyezze az ágyrács alján erre kiképzett részre, majd ezt követően a biztonsági csavart helyezze a furatba és hajtsa vissza a biztonsági karmantyút. **FIGYELEM!** Többször ellenőrizze, hogy a biztonsági karmantyú rögzítése megfelelő-e.

Háttámasz emelő rész

Lábtámasz emelő rész

Végleges pozíció

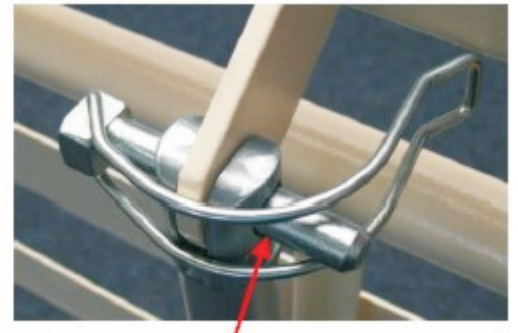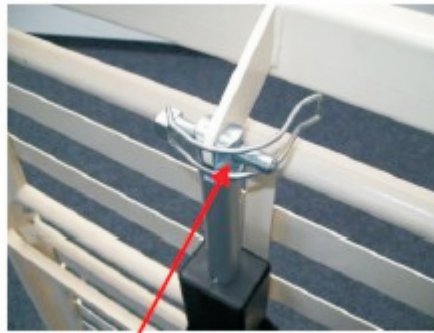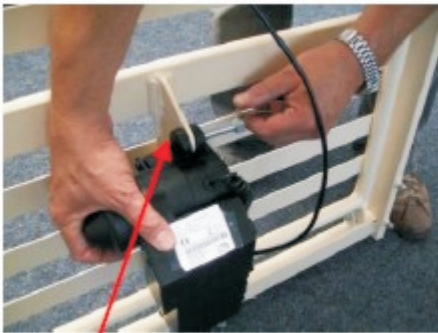


Ágyrács alapján a csatlakozás


Biztonsági csap

Biztonsági retesz

Az ágyrács két részét csúsztassa egymásba és húzza meg a rögzítő csavarokat.

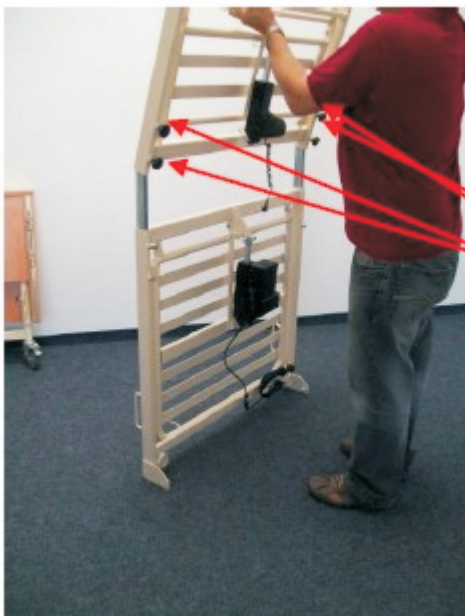

4 db M8-as csavar

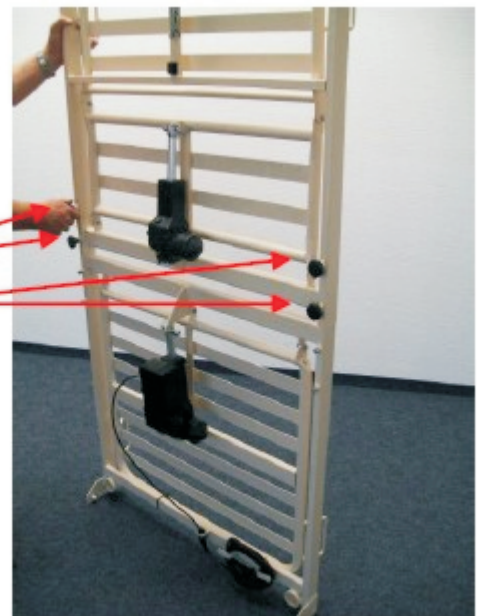

Ezt követően fektesse le az ágyrácsot a talajra. Az ágyvéget emelje függőleges helyzetbe, fékezze be a kerekeit, majd emelje az ágyrácsot a ágyvégeken található tartókonzolra. A biztonsági retesz legyen kihúzott állapotban. Ellenőrizze, hogy megfelelően helyére került-e az ágyvég és azt követően engedje vissza a reteszeket a furatba. Ezzel rögzül az ágyvég. Mindkét ágyvégen ugyan ezt a feladat sort kell elvégezni.



Kerék

Féke




Ágyrács



Helyezze az ágyrácsot a konzolra

Rögzítő retesz

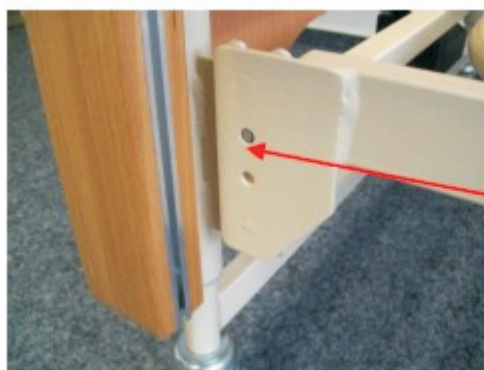


Biztonsági retesz

A retesznek a furatba kell csatlakozni. Ellenőrizze!




A korlátok szereléséhez vegye ki a csomagból a korlátokat és végzárókat. Az ágyrács egyik sarkát vegye ki a konzolból és emelje el annyira, hogy a korlátokat bele tudja rakni a rögzítő csapokra.

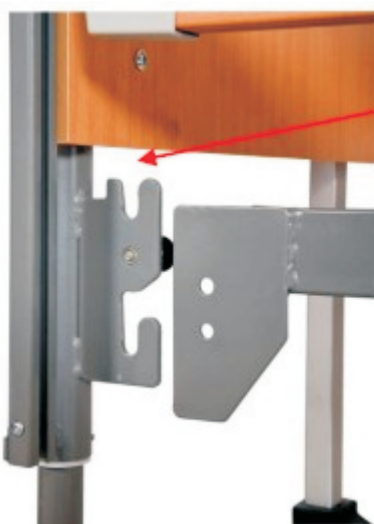

Húzza le az ágyrács sarkát a konzolról.

A korlátokat húzza rá a csapokra.

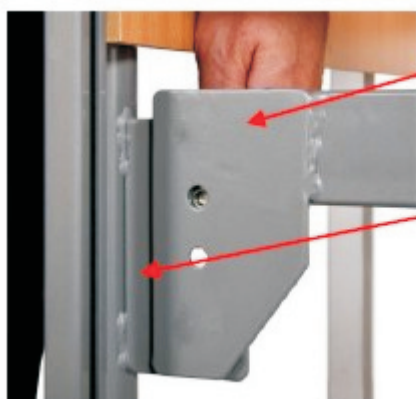

Óvatosan emelje vissza az ágyrácsot az ágyvégre.

A reteszt helyezze vissza furatba.

Ellenőrizze, hogy a furatba került-e a retesz megfelelően



Ezt követően csatlakoztassa a motorok kábelét a vezérlő egységre. Először a vezetékeket csavarja ki, tegye szabaddá. Távolítsa el a vezérlő fedelét a két csavar kicsavarásával. A háttámasz motor kábele eleve csatlakoztatva van megfelelően. Miután mindent megfelelően csatlakoztatott, csavarja vissza a vezérlő tetejét.

Fedél csavarok



Sárga jelű vezetékeket csatlakoztassa



A lábrész motor, a háttámasz motor és kézi vezérlő gyárilag csatlakoztatva van.

Csavarja le a vezetéket



A hálózati kábel angol és európai szabványt is tartalmaz

Ezt követően vágja át a fej és lábrészek biztonsági rögzítésére szolgáló eszköz kötéseit.





Lábrész biztonsági eszköz vágja át a rögzítést




Fejrész biztonsági eszköz vágja át a rögzítést

Ezt követően szerelje össze a kapaszkodó állvány. A fém rudazatot tolja össze úgy, hogy a rögzítő csap a furatba kerüljön. Ezt követően a fejrégi ágrács sarki részén kiképzett befogó furatba kell helyezni a kapaszkodót. A kapaszkodót egy befogó csak rögzíti. FIGYELEM! Amennyiben a csap nem kerül a helyére, a kapaszkodó használata nem biztonságos!

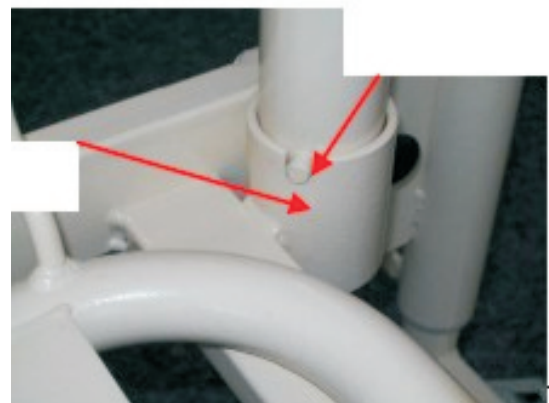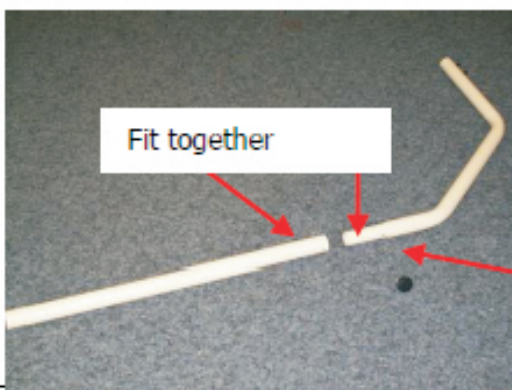


Csúsztassa a háromszög kapaszkodó gurtját a rudazatra úgy, hogy a két rögzítő csak közé kerüljön a gurt. FIGYELEM! Amennyiben nem kerül a rögzítő csapok közé, akkor balesetveszély alakulhat ki.

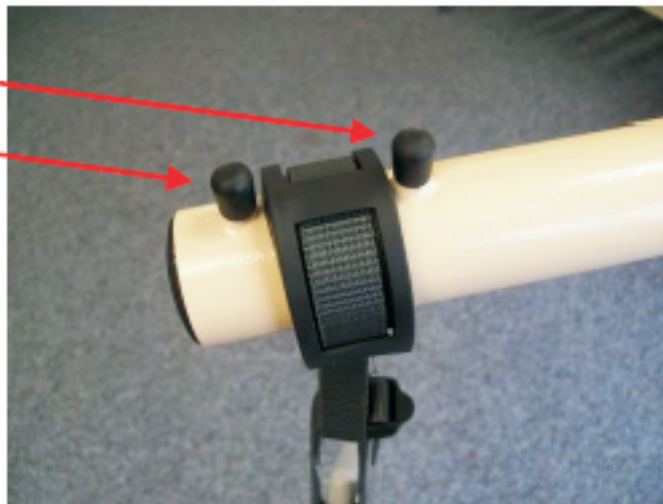

Csavarja le a hálózati kábelt a konzolról és a képen látható módon a fejrész kereszttrúdja felett vezesse el. Ezzel minimalizálható a kábel sérülése.



Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. A készülék használatra készen áll.

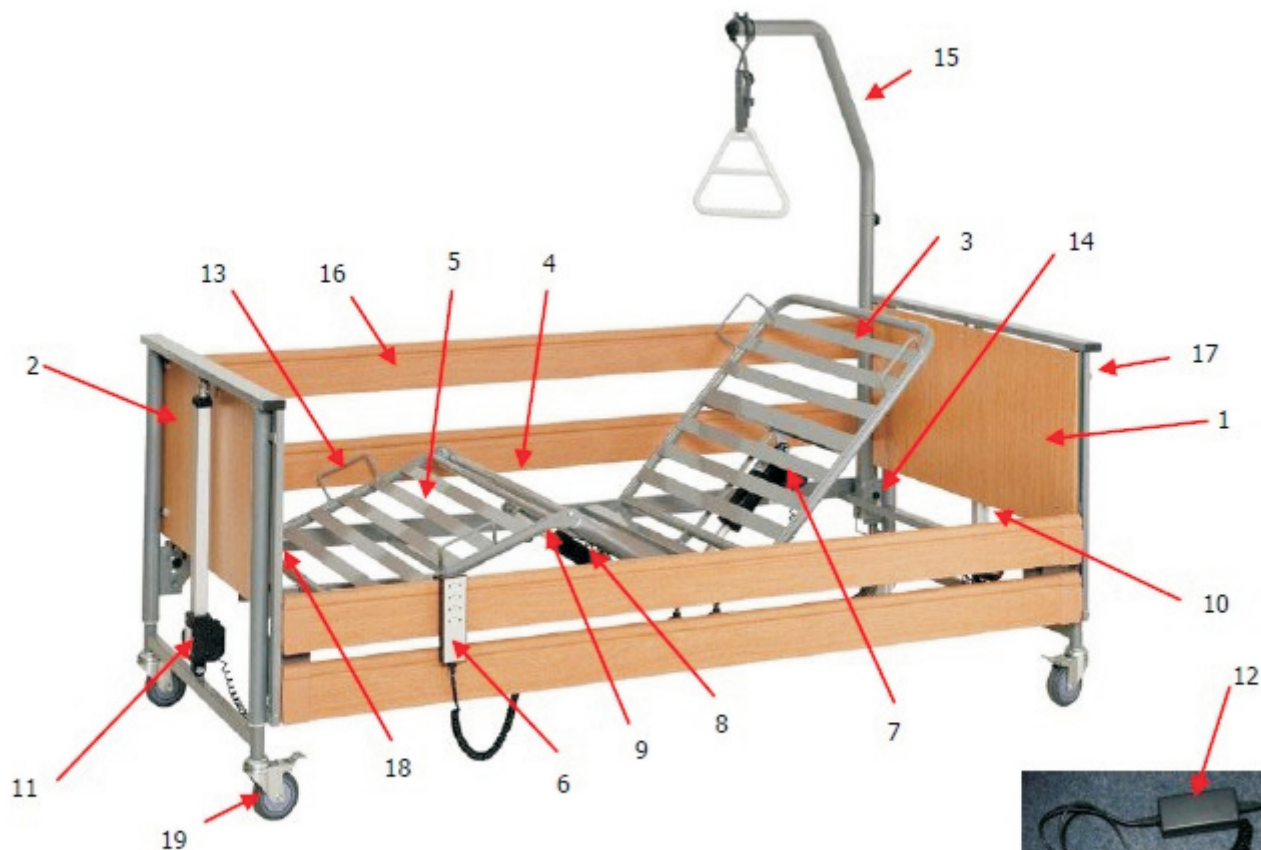

Ágy részei:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1, hátlap | 11, lábvég emelő motor |
| 2, láblap | 12, angol tápkábel |
| 3, ágyrács keresztpánt | 13, matrac tartó támasz |
| 4, alsó korlát | 14, rögzítő csak az ágyrácshoz |
| 5, lábrész | 15, kapaszkodó |
| 6, távirányító | 16, felső korlát |
| 7, háttámasz mozgató motor | 17, fejtég |
| 8, lábtámasz mozgató motor | 18, lábvég |
| 9, lábtámasz oldala | 19, kerék |
| 10, fejtégi emelő rúd | |



Távírányító zár funkcióval:


A távírányítóval lehet az ágy minden mozgását irányítani. A távírányító ápolói zárral rendelkezik. A távírányító sérülését elkerülendő mindig akassza fel.



Az irányító hátoldalán található a funkciózáró gomb. A nővérkulcs segítségével az összes elektromosan mozgatható funkció lezárható.



Elektromos funkció működnek

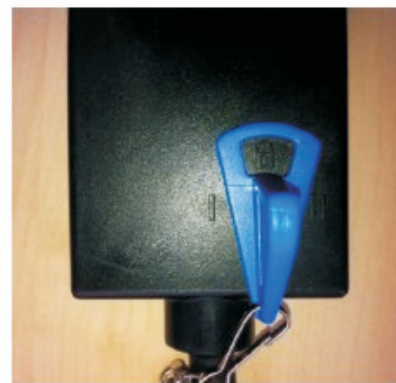

Elektromos funkciók lezárva



Korlátok használata:

A korlátokat emelje fel addig, amíg kattánó hangot nem hall. Ekkor felső pozícióba rögzül a korlát. A korlátok leengedéséhez emelje meg a felső lécet és nyomja be ezt követően a rögzítő gombot.




1. Emelje meg a korlátot

2. Nyomja be a rögzítő gombot


Kapaszkodó:

A kapaszkodó segítségével a beteg önállóan fel tud ülni, vagy helyzetét változtatni. A kapaszkodó háromszög gurtnival kapcsolódik a fém rúdhoz.

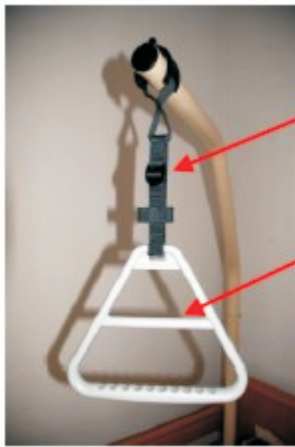

Állítható gurtni

Kapaszkodó
háromszög

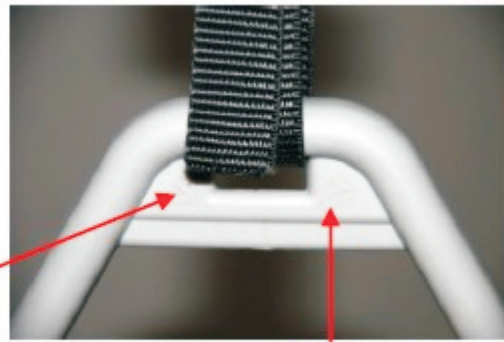

rögzítő rész

A gurtni hossza a rajta elhelyezkedő csat segítségével állítható hosszúságú. A matrac felett 55-70 cm magasan legyen a kapaszkodó. Ellenőrizze, hogy a gurtni a két rögzítőcsap között, fixen legyen felakasztva. A kapaszkodó háromszög élettartama kb 5 év. Ezt követően javasolt a cseréje.

A kerekek:

Az ágy mind a négy kereke fékezhető. Normál esetben legyen mind a négy fék befékezve. Az ágy mozgásakor minden féket oldjon ki!



kerék

fékező kar



Vészhelyzeti leengedő:

Az ágy vezérlő egységébe helyezett 9 V-os elem lehetővé teszi, hogy sürgősségi esetben, amennyiben áram kimaradás van leengedhesse az ágy részeit. A 9V-os emel egyszeri leengedést tesz lehetővé és azt követően cserélni kell. Amennyiben 2 éven belül nem történt elemhasználat, akkor javasolt az elem cseréje.

Az elem cseréjéhez távolítsa el a vezérlő fedelét. Mindenek előtt húzza ki a hálózathoz a készüléket. Húzza ki az elemet és cserélje ki egy újra.



Karbantartás, tisztítás, fertőtlenítés:

Használatba vétel és újra használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítse az ágyat. Nedves törlőronggyal törölje le az ágyat. Használjon megfelelő tisztító és kondicionáló szert a fa részek tisztítására. Ammónium mentes tisztító, vagy súroló szert is lehet használni, de csak dermatológiailag teszteltet. A súroló szer szemcséi károsíthatják az ágy anyagát. Tisztítás és használat előtt húzza ki a konnektorból a vezetéket. Az elektromos alkatrészek csak nedves törlővel lehet letörölni, de folyó vízzel nem érintkezhetnek.

Felület fertőtlenítő szer alkalmazható az alkatrészek tisztítására. Ellenőrizze, hogy az Ön által választott fertőtlenítő milyen kódokozókra alkalmas.

Hibaelhárítás:

- nincs működés – nincs bedugva a hálózati kábel
- nincs működés – kézi vezérlő lezárt állapotban van
- nincs működés – kézi vezérlő, vagy a motorok nincsenek csatlakoztatva
- nem a távirányítónak megfelelően mozognak a részek – áthelyezésre kerültek a dugaljak a vezérlőben
- nincs mozgás áramszünet esetén – lemerült a 9 V-os elem
- lassan mozog az ágy – nincs csatlakoztatva a hálózati dugó, elemről működik a mozgás

Garancia: 24 hónap garancia

Technikai adatok:

- az ágy maximális megengedett terhelése (matracal, test...) 220 kg
- kapaszkodó maximális terhelhetősége: 80 kg
- matrac maximális megengedett vastagsága: 20 cm
- teljes hossz: 115 cm
- teljes szélesség: 102 cm
- emelő magasság: 38,1-81 cm
- fejtámla állítás szöge: 0-70
- lábemelés szöge: 0-40
- fogyasztás: 70 W
- normál működési idő: 2 perc
- áramfelvétel: 2,0 A
- működési környezeti hőmérséklet: +10 - +40 C
- teljes súly: 85 kg

Dátum: _____

Eladó szerv: _____

Szerviz: 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. 88/412-186
info@gyogyaszati.hu