


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szabványos acél kerekesszék

ORVOSI ESZKÖZ Ver. 1
10/2022

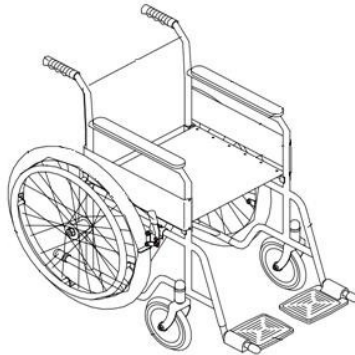


REF BME4611

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT


Ez a kézi kerekesszék mozgáskorlátozottak, betegek és idősek számára szolgál közlekedési eszközként

KEREKESSZÉK FELÉPÍTÉSE

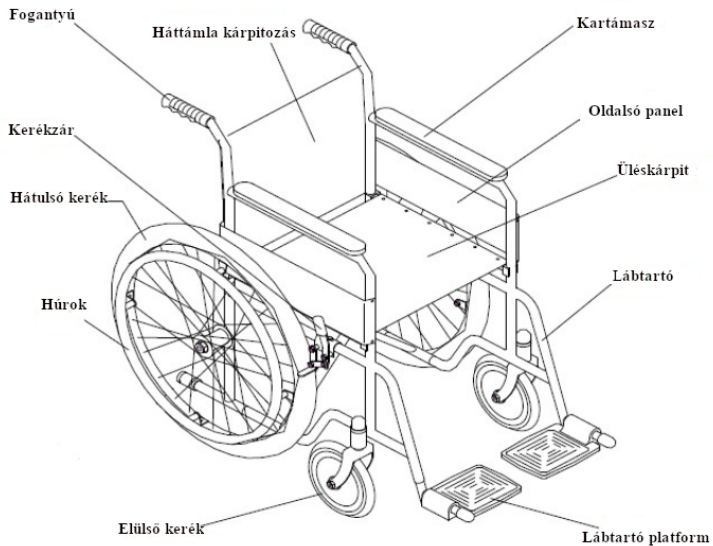

HOGYAN NYISSUK KI A FIX HÁTTÁMLAVAL RENDELKEZŐ KERÉKESSZÉKET?

Szükséges kiegészítők: használati utasítás és kerekesszék kulcs.

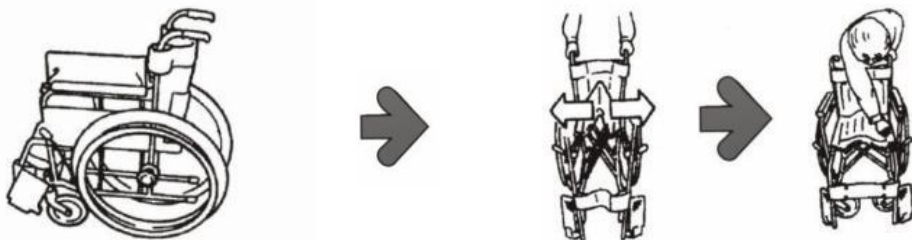

1. lépés: Álljon a kerekesszék mögé, és húzza kifelé, hogy kinyissa az ülést.


2. lépés: Ezután nyomja meg az ülést, hogy kinyissa.



FIGYELEM! Ne tegye a kezét vagy az ujjait az ülés közelében vagy alatt található csövekre.


A LÁBTÁMASZ MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. MÓDSZER

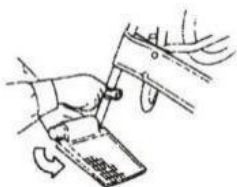


Forgassa el a lábtartó platformot a nyíl irányába, és állítsa be a magasságát. Ezután húzza meg a cső oldalán található anyát a mellékelt kulccsal.


2

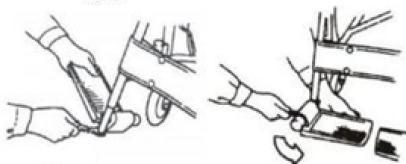

1. A kulccsal lazítsa meg a lábtartó azon részét, amelyhez a lábtartó platform rögzítve van.
2. Forgassa el a lábtartó platformot a nyíl irányába, és húzza meg a kulccsal.

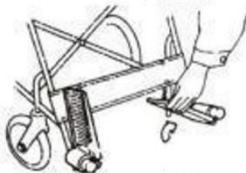


FIGYELMEZTETÉS! Emelje fel a lábtartó platformokat minden alkalommal, amikor be- és kiszáll a kerekesszékéből!

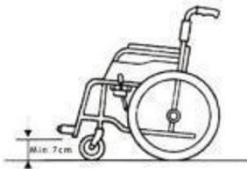


Figyelmeztetés! Győződjön meg róla, hogy a lábtartó legalább 7 cm-rel a talaj felett van. Ha túl alacsonyan van, egyenetlen felületen akadályokba ütközhet. Ez kibillentheti a kerekesszék egyensúlyát!

A kerekesszék összecukása

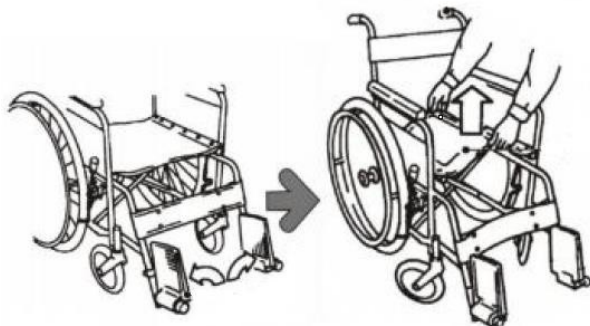

1. lépés: Emelje meg a lábtartó platformokat a nyílak irányába.
2. lépés: Ezután emelje meg az ülést, hogy összehajtsa.

A FÉKZÁRÓK HASZNÁLATA

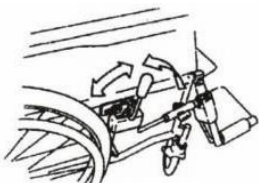


A kerekesszék rögzítéséhez húzza hátra a reteszelőkarokat mindkét oldalon. A kerekesszék kioldásához húzza előre a reteszelőkarokat.



FIGYELEM!

1. Ne felejtse el fékezni, még rövid megálláskor is. Szokjon rá, hogy mindig nyomja a fékkarokat.
2. A kerekesszék nem tud azonnal megállni, ezért ülés közben ne gyorsítson.
3. Éles kanyarokban csökkentse a sebességet, hogy elkerülje a felborulást.
4. A kerekesszék tolása előtt győződjön meg arról, hogy a beteg lába a lábtartókon van.
5. Mindig a biztonságot vegye figyelembe először. Ha a beteg nem érzi magát biztonságosnak a kerekesszék önálló kezelésében, kérjen segítséget.


TIPPEK A KERÉKESSZÉK HASZNÁLATÁHOZ

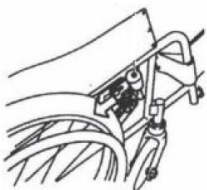

Győződjön meg arról, hogy a fék be van húzva, amikor be- vagy kiszáll a kerekesszékéből. Győződjön meg arról, hogy helyesen használja a fékkarokat.




Ne álljon a lábtartóra, amikor kiszáll a kerekesszékből, különben a kerekesszék előrebillen.

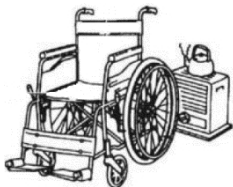

Ne helyezze a kerekesszéket láng közelébe, különben a háttámla meggyulladhat és sérülést okozhat.



A kerekesszék lépcsőfokon való felemeléséhez a toló ápolónak fel kell emelnie a billenőcsövet, és le kell nyomnia a fogantyúkat, hogy az első kerekek a lépcsőfokra emelkedjenek, majd fel kell húznia a fogantyúkat a hátsó kerekek felemeléséhez. Ne próbálja meg erőltetni a kerekesszéket a lépcsőn felfelé vagy lefelé.

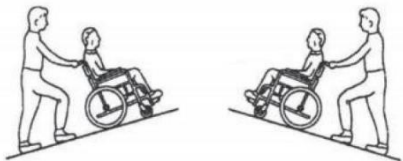

Fel- vagy lefelé mozgathatáshoz győződjön meg arról, hogy a kerekesszéket toló személy a közelben van; különben a kerekesszék felborulhat. Meredek lejtőn a kerekesszéket úgy kell fordítani, hogy a beteg felfelé nézzen. A kerekesszék kezelőjének fokozatosan kell vezetnie a kerekesszéket lefelé.



Amikor beteggel együtt emelünk kerekesszéket, ne a fogantyúkat fogjuk. Ellenkező esetben a kerekesszék megsérülhet.

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		
Katalógusszám / Név		SZABVÁNYOS ACÉL KERÉKESSZÉK
Ülés szélessége [mm]		450
Teljes szélesség [mm]		620
Teljes hossz [mm]		1020
Teljes magasság [mm]		860
Ülésmélység [mm]		420
Háttámla magasság [mm]		420
Karfa magassága az üléshez képest [mm]		290
Az ülés magassága a talajtól [mm]		460
Maximális biztonságos terhelés [kg]		110 kg
Alapszekrény súlya [kg]		17 kg
Statikus stabilitás [°]	lefelé	9
	felfelé	9
	keresztirányú	ø
Kerék átmérő	elől	200
	hátsó	600
Üzemi és tárolási hőmérséklet		-15º C és 40º C között

A FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

Nyomógombok	butilgumi
Hátsó kerék	PU (poliuretán) vagy butilgumi
Húzószárak	acél
Kerékfék (fék)	acél
Kereszt	acél
Váz	acél
Villás	acél
Első kerék 8"	PVC (polivinil-klorid vinil) + ABS (akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer)
Lábtartó platform	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer)
Lábbiztonsági pánt	poliészter
Lábtartó	acél
Üléskárpit	poliészter + poliuretán hab
Háttámla kárpit	poliészter + poliuretán hab
Fékek asszisztens számára	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer)
Karfa	PVC (polivinil-klorid) + poliuretán hab

IMPORTŐR

Reha Fund Sp. z o. o. ul.
Staniewicka 14
03-310 Varsó
tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307
e-mail:info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



Shanghai Brother Medical Products Manufacturer Co., Ltd

Cím: 718 Fanou Modern Building, No 2449 Gonghexin Road, Jingan District, Shanghai City, China, Tel. 0086-21-51876643

E-mail:brothermedical2@hotmail.com

www.brothermedical.com



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Hollandia e-mail:

ec.rep@sungogroup.com



 **FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben használt grafikák csak illusztrációk! A fotókon és a végleges kerekesszéken látható specifikációs adatok eltérhetnek**

 **FIGYELMEZTETÉS! A termék használata és működtetése, valamint a mechanizmusok összeszerelése és beállítása során fenáll a felhasználó é/segítő testrészeinek becsípődésének és/vagy becsípődésének veszélye az alkatrészek közötti nyílásokban/résekben. Ezeket a műveleteket rendkívül óvatosan kell elvégezni. A beállítás befejezése után sabilizálja a helyzetet az anyák/csavarok gondos meghúzásával.**

 **FIGYELMEZTETÉS! A kis alkatrészek jelenléte miatt tartsa kisgyermekektől elzárva.**

MEGJEGYZÉSEK

Garanciakártya
Standard acél kerekesszék

Modell:	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen jótállási kártyával fedezett termék teljesen új és hibátlan.
2. A kocsí vázára 60 hónapos garancia vonatkozik, míg a többi alkatrésze 36 hónapos garancia vonatkozik a garanciakártyán feltüntetett értékesítés dátumától számítva.
3. A jótállási igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött jótállási kártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a kerekesszéket rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javítást a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük. Ha pótalkatrészeket kell rendelni, a javítási idő meghosszabbodhat, amely esetben az ügyfelet erről tájékoztatjuk.
6. A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a felhasználói kézikönyvben leírt, a kerekesszék karbantartásával, tisztításával és beállításával kapcsolatos tevékenységek;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészek, pl. gumi alkatrészek, rugók, műanyag burkolatok, kárpitok, csapágyak stb.
 - a kerekesszék mechanikai és hőhatás okozta sérülései, pl. hajlítások, karcolások, törések stb.;
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, saját kezű javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérülések.
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és az alkatrészek cseréjét a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a panasz feldolgozásának költségeit az ügyfélnek kell viselnie.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont kitöltendő)

Sz	Értesítés dátuma	Rendelészám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					

MEGJEGYZÉSEK