

Használati utasítás GIGO 2G rollátor

GIGO 2G



Előszó

Köszönjük, hogy a Drive DeVilbiss terméket választotta. Nem fog csatlódni a termék kiadásiútjában, funkcionálhatóságban és minőségében. Kérjük, előtte figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást

az első használatához. Fontos biztonsági információkat és értékes tippeket tartalmaznak a megfelelő használatához és gondozáshoz. Ha kérdése van, vagy további információt szeretne kérni, forduljon a termék szállító Drive DeVilbiss szakkereskedőhöz. Ez a kezelési útmutató minden fontos beállítást és kezelési tartalmat tartalmaz. A legfrissebb kezelési útmutató elérhető PDF formátumban online, vagy kérhető az ügyfélszolgálatától. A látásserült személyek számára nagyított formátumok jeleníthetők meg. A vak betegeknek a kiserőjükhöz kell oktatók. A javítások és bizonyos beállítások speciális képzést igényelnek, ezért azokat az orvosi kellekkel fogalmazójának kell elvégeznie.

Megfelelőségi nyilatkozat

A leírt termékhez a DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG

megfelelőséget nyilatkozik az orvostechnikai eszköz szerinti (EU) 2017/745 rendelet


Élettartam

Vállalatunk öt év élettartamot feltételez ennek a terméknek mindaddig, amíg a terméket rendeltetés szerint használják, és minden karbantartási és szervizkövetelményt betartanak. Ez az élettartam jelentősen meghaladhatja, ha a terméket körültekintően kezelik, javítják, karbantartják és használják, és a tudomány és a technológia további fejlődésén alapuló műszaki korlátok nincsenek. Az élettartam azonban jelentősen lerövidülhet a szelőséges és nem megfelelő használat miatt. Az élettartam cégünk általi meghatározása nem jelent további garanciát.

Ártalmatlanítás

Ha már nincs szüksége a termékre, forduljon szakkereskedőjéhez, vagy vigye el a terméket a helyi hulladékgyűjtő központba.

Címke:

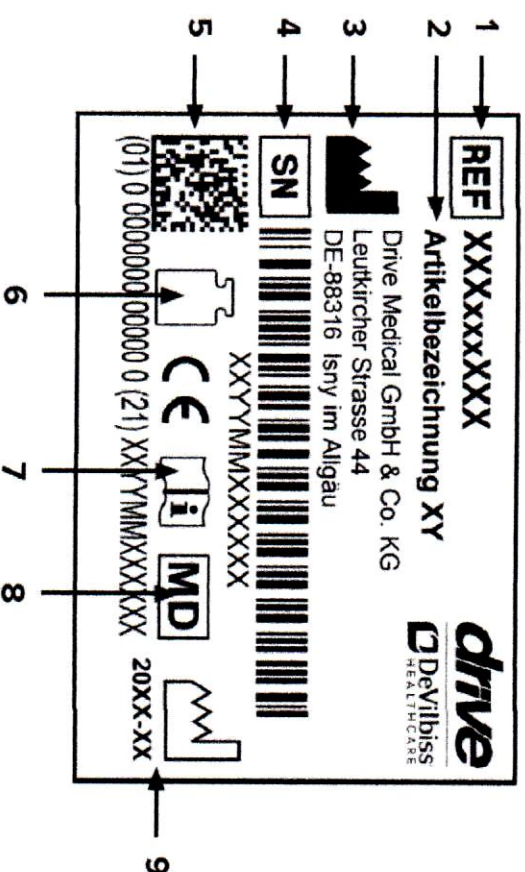


1 Cikkszám | 2 Cikk neve | 3 Gyártó | 4 Sorozatszám | 5 UDI kód | 6 Max. rakomány | 7 Kövesse a használati utasítást | 8 Oroszi eszköz | 9 Gyártási dátum (év-hónap)

Újrahasználat

Ez a termék újra felhasználható. Felhívjuk figyelmét, hogy a biztonságos kezeléshez szükséges összes műszaki dokumentumot az új felhasználónak is át kell adni.

A terméket a szakkereskedőnek ellenőriznie kell, meg kell tisztítani és vissza kell állítani az optimális állapotba. Az előkészítés során mindig kövesse a gyártó utasításait; ezeket kéresemre rendelkezésre bocsátjuk. A tartozékok beszerzésétől a szakkereskedőjétől vagy a www.drivevilbiss.de oldalon

Rollátor felépítése:

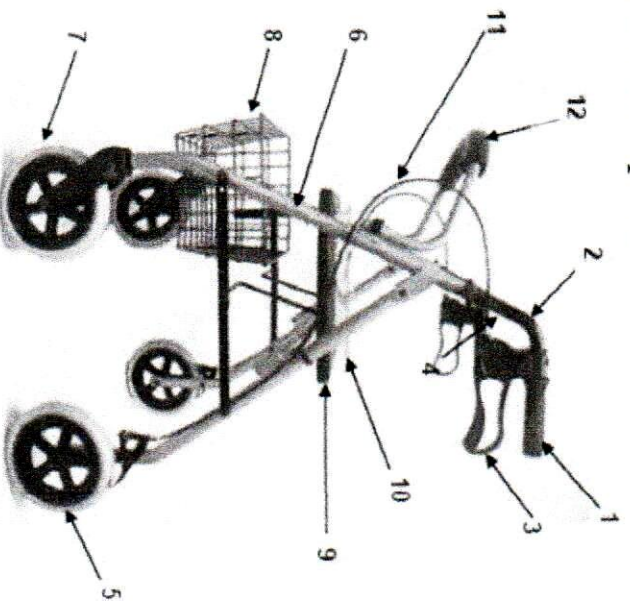

1. markolat
2. fogantyú állítható rudazata
3. fék
4. fogantyú magasságállító csavar
5. hátsó kerék
6. váz
7. elülső kerék
8. kosár
9. tilés
10. tálca
11. fék boyden
12. háttámasz

CSOMAG TARTALMA:


- rollátor
- kosár
- tálca
- háttámasz
- használati utasítás

INDIKÁCIÓ:

A járóképességükben nehezített betegek részére szolgáló eszköz. Az eszköz minden alkotórésze újrahasznosítható anyagból készült.


HÁTTÁMASZ ÖSSZESZERELÉSE:

Helyezze bele feltűről a fogadócsőbe a háttámaszt, majd rögzítse a kapesos gyűrűvel.

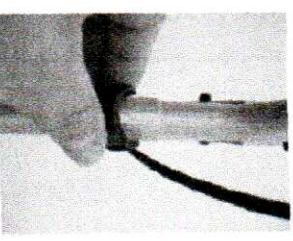


KORMÁNY ÖSSZESZERELÉSE:

Helyezze be a kormány rudat a járatába legalább az első lyukig. Helyezze be a rögzítő csavart és húzza meg fixre.

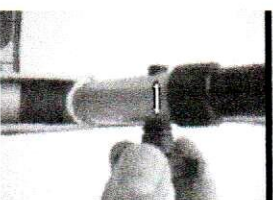

KINYITÁS:

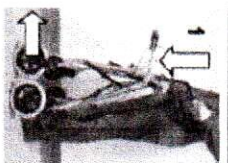


Allítsa a rollátor a kerekére. A váz elülső vízszintes szárát nyomja előre lábával. miközben a markolatot lefelé nyomja. Ez követően az ülés nyomja lefelé ameddig a helyére be nem kattan. A fékborvden védelmében rögzítse az a vázhoz a kapcsolással.




KOSÁR ÉS A TÁLCA BESZERELÉSE:

Akassza a kosarat az ülőfelület alatti vázrészre. A kosarat helyezze a kis lábakkal lefelé az ülőlapra.

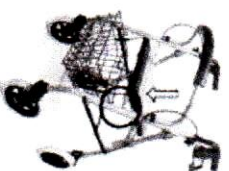


FÉKEZÉS ÉS PARKOLÁS:

Fékezéskor mindkét oldali fékkart húzza meg a markolat felé. Amennyiben elengedi a fékhatás megszűnik.

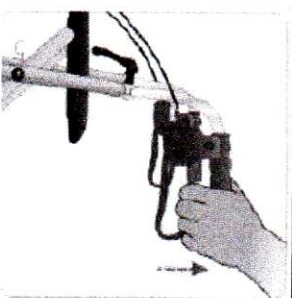


Amennyiben le szeretné fix állásba

fékezni a rollátor, akkor nyomja lefelé a fékkart amennyid a parkoló állásba nem kattan. Felhúzáskor a fék kiold.

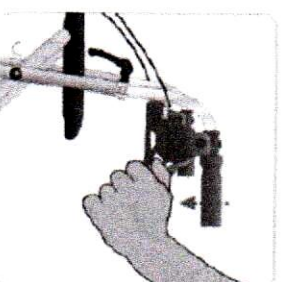


FÉK BEÁLLÍTÁSA:

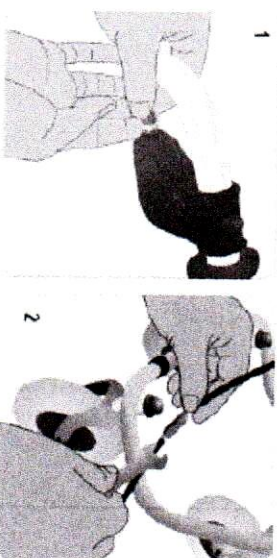


A megfelelő fékhatás beállítását a markolat fékborvden becsatlakozó részének állító csavarjával, valamint a fékborvdenen található csavar állításával végezheti el.

ÜLÉS

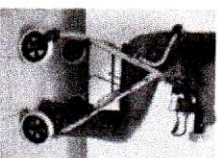


Allítsa meg a rollátor stabil talajú helyen, majd tegye a fékkart parkoló állásba. Ellenőrizze, hogy a rollátor ne csússzon, vagy mozoghasson.


ÖSSZECSUKÁS

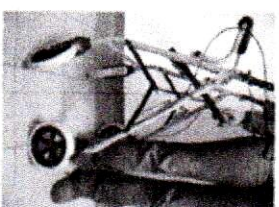

6

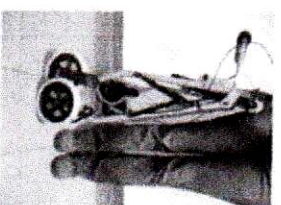


7

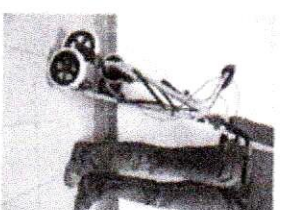

Kövesse a képen megjelölt mozdulatokat.

BITONSÁGI TANÁCSOK:

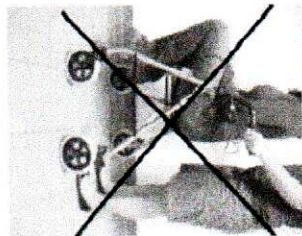

A rollátor ne használja kerekesszékként, mert nem nyújtja a megfelelő stabilitást mozgás közben.

TECHNIKAI ADATOK:

Maximális terhelhetőség: 120 kg
5 kg-nál ne terhelje jobban a kosarat
Nedves ruhával tisztítható.
Ne használjon agresszív fertőtlenítő szert.
Időnként ellenőrizze a rollátor csavarjainak feszességét.

Teljes hossz: 61 cm
teljes szélesség: 63 cm
markolatok közötti távolság: 41 cm
6 fokozatban állítható markolat magasság: 83-93,5 cm
típus magasság: 53 cm
tírófelület mérete: 33,5x34 cm
összecsatolt állapotban méretei: 100x63x28 cm
kosár nélküli önsúly: 6,8 kg
súly kosárral: 8 kg
anyaga: alumínium és műanyag

Garancia idő: 12 hónap

Dátum:

drive

Drive Medical GmbH & Co. KG
Ludowigstr. 14
04897 Bregitzsch (Germany)
Phone: +49 (0) 78 52 9724 0
Fax: +49 (0) 78 52 97 24 -25
Internet: www.drivemedical.de

Drive Medical Limited
2000, The Parkway, Epsom, Surrey
Middlesex TW20 3EP, UK
Phone: +44 1423 214488
Fax: +44 1423 214489
Internet: www.drivemedical.co.uk