

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
HELIOS GYERMEK KEREKESSZÉK



GR EN



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ HELIOS
USER MANUAL: KID'S WHEELCHAIR HELIOS

REF : 0815009



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezeket a kerekesszékeket mozgáskorlátozott vagy fizikailag vagy szellemileg korlátozott mozgásképességű személyek számára tervezték.

Lehetővé teszik mozgáskorlátozott vagy korlátozott mozgásképességű személyek szállítását, és a beteg maga is használhatja őket (ha 20-24 hüvelykes hátsó kerekekkel rendelkezik), vagy kísérő segítségével.

Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó kerékekkel és kapaszkodóval rendelkezik, akkor a felhasználó önállóan mozoghat.

A WC-vel ellátott kerekesszék WC-ülőként is használható.

Specifikációk

KERET	Acél – összecusukható
KERET	Egyetlen keresztléc
ÜLÉS	Szövet - Nejlon
KARTÁMASZ	Visszahajtható
LÁBTÁMASZ	Levehető, forgatható, elhajtható, állítható magasságú
FOGANTYÚK	Állítható magassággal
HÁTULSÓ KERÉK	22" MAG kerék tömör gumival és gyorszárral
ELÜLSŐ KERÉK	6" x 1,25" Tömör
BIZTONSÁGI ÖV	IGEN

Méretetek

											
0815009	36cm	35cm	36cm	34 cm	57cm	94cm	87-96* cm	44cm	22*6*	68kg	16**kg

*A fogantyúk legalacsonyabb állásában a teljes magasság 87 cm. A fogantyúk legmagasabb állásában a teljes magasság 96 cm.

**Lábtartókkal és hátsó kerekkel. A kerekesszék súlya lábtartók és hátsó kerekek nélkül 12,5 kg.

ÖSSZESZERELÉS

Kérjük, olvassa el az A. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOKAT.

Kérjük, olvassa el a B. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, akkor ne használja ezt a terméket vagy más kapható alkatrészt. Ha nem érti a használatát vagy az óvintézkedéseket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a megfelelő műszaki személlyel, mielőtt használná a terméket, mert ez kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Ne lépje túl a maximális teherbírást.
- Mindig fokozott óvatossággal kell eljárni olyan mozgó alkatrészek esetén, amelyek végtagbecsípődést és sérülést okozhatnak.
- Ne próbálja meg a kerekesszéket levehető részeinél fogva felemelni.
- A kerekesszékbe való be- és kiszállás önállóan is elvégezhető, feltéve, hogy megfelelő a mozgásképessége és a felsőteste erős.

FONTOS!

A kerekesszék kialakítása maximális biztonságot nyújt. A felhasználók azonban veszélynek lehetnek kitéve, ha nem megfelelően használják a kerekesszéket. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem specifikus vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Sötét helyeken való mozgáskor mindig viseljen világos színű ruhát, hogy mások könnyebben elérhessék. Legyen óvatos az első alkalommal, amikor ezzel a kerekesszékkal utazik.
- Ismerkedjen meg a kerekesszékeivel.
- Használja a kerekesszéket sík talajon, valamint emelkedőn és lejtőn is.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha a padlóról kell felemelnie azokat a térdéi közé nyúlva.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha fel kell ülnie az ülésre.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne próbáljon meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajmembránnal.
- Ne használjon nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket, kivéve a MOBIÁK által jóváhagyottakat.
- Ne álljon a kerekesszékben.

HASZNÁLAT ELŐTT:

- Ellenőrizze, hogy a váz sérült-e a termék biztonságos használata érdekében. Nincsenek repedések vagy törések a vázban.
- Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
- Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitott-e. Ha nem, nyomja le az ülést a váz oldalairól.
- Ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e.
- Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy a termék teljesen biztonságosan használható legyen személyek és tárgyak számára.
- Ha gyorsáras kerekek vannak, ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve.

FIGYELMEZTETÉS!

A következő módszereket csak tapasztalt betegek alkalmazhatják. Ha nem rendelkezik tapasztalattal, kérjen segítséget egy kísérőtől! **BESZÁLLÁS A KERKESSZÉKBE:**

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékrögzítőket.
3. Karjaival támaszkodjon a vázra, és lassan menjen le az ülés felé.

KISZÁLLÁS A KERKESSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékrögzítőket.
3. Mindkét fogantyúra egyformán támaszkodjon. Ha csak egy kézzel (és felügyelet nélkül) tartja a kerekesszéket, az sérülést okozhat.
4. Átszálláskor helyezze át testsúlyát az ülésre.

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon lifteket és rámpákat. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el úti célját. A kerekesszéket a váz stabil részeinél fogva kell felemelniük. A kerekesszéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül rajta. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőjétől:

3. Ezt a kerekesszéket kizárólag egy személy szállítására szabad használni az ülésen.
4. A felhasználók ne üljenek kerekesszékekben, miközben bármilyen közlekedési eszközt használnak.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat üléshez vagy felálláshoz, FELBORULÁSVESZÉLY. A lábtartókat a felhasználó használja ülés közben.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben, SÉRÜLÉSVESZÉLY!

KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít fenntartani a kerekesszék élettartamát és hatékonyságát.

HETENTE

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kereken található utasításokat követve.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztkar középső csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van-e.
3. Tisztítsa meg az anyagot szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy krómozott vagy festett felületekhez való speciális termékekkel.
5. Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be őket.
6. Ellenőrizze az első és hátsó kerekek sérüléseit.

NEGYEDÉVENTE

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillákat, húzókerekeket, propellereket.
2. Zsírozza vagy olajozza be az összes súrlódásnak vagy kopásnak kitett alkatrészt.
3. Húzza meg a csavarokat és anyákat.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és szükség szerinti javítása.

ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végeztesen teljes körű felülvizsgálatot egy szakképzett szervizzel.
2. A beteg biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket kétfévente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett mind a váz, mind a kárpit alaposan megtisztítható.

- A megjelenés megőrzése érdekében az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal, enyhe mosószerrel és meleg vízzel távolíthatja el, a textúra irányában haladva.
- Száradás előtt öblítse le tiszta vízzel.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületét puha kefével kell tisztítani.
- A vázat rendszeresen enyhe mosószerrel kell tisztítani.
- A bőrülésses kerekesszékeket száraz ruhával kell tisztítani.
- A kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítsa. A kerekek szárításakor ügyeljen arra, hogy ne kelljen nedves kerekekkel használnia a kerekesszéket.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos és képzett képviselővel.
- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan átalakításából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ha egy napon úgy találja, hogy a termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosító központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása segíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 2017/745 európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNYJELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elkophatnak, mint például a kárpitozás, a kerekek vagy a fékek.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben) és szállítók által okozott károkra vagy hibákra a garancia nem vonatkozik.

A garancia nem terjed ki a szervizelésre vagy a pótalkatrészekre, kivéve, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális áruk szállítási költségeit a felhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

A. MELLÉKLET. ÖSSZEÁLLÍTÁS

A kezében lévő kerekesszék eltérhet a következő fotókon láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

Az ülés oldalán található rudak egyetlen mozdulattal történő megnyomásával a kerekesszék kinyílik és teljesen nyitott állapotba kerül.

Az ülés oldalán található rudak egyetlen mozdulattal történő megnyomásával a kerekesszék kinyílik és teljesen nyitott állapotba kerül.





Fogja meg a lábtartót a kezével, és helyezze a jelzett módon. A csapnak át kell haladnia a lyukán.



A mellékelt öv segítségével ellenőrizze, hogy a beteg lába megfelelően van-e elhelyezve.



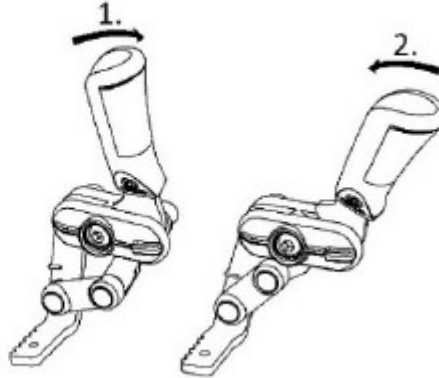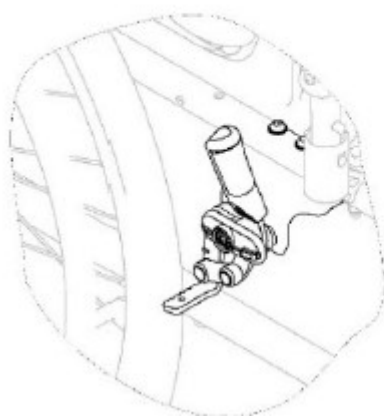

1. A fékek a kerekesszék rögzítésére szolgálnak álló helyzetben, hogy megakadályozzák az elgurulást.
2. A fék behúzásához nyomja előre a fékkart a tenyerével. (1)
3. A fék kioldásához húzza hátra a fékkart. (2)



- Soha ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben.
- Ne húzza be a rögzítőféket a kerekesszék lassításához.
- Ne támaszkodjon a rögzítőfékekre támaszkodás vagy áthelyezés céljából.
- Fék használata közben tartsa távol az ujjait a mozgó alkatrészekről, mindig tartsa a kezét a fékkaron.

A gyorszáras hátsó kerekek eltávolítása:

- A kerekesszék gyorszáras rendszerrel rendelkezik a hátsó kereken, így könnyen eltávolíthatók, és csökkenthető a tárolóhely az autóban és az otthonban.
- A kerék szétszereléséhez nyomja meg a kerék közepén található fekete gombot a kioldáshoz, és ezzel egyidejűleg húzza kifelé a kereket, amíg teljesen ki nem jön az alapjából.
- Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a másik keréken.
- Az összeszereléshez kövesse a fordított eljárást.



B. MELLÉKLET. JELÖLÉSEK

A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön nyomtatott szimbólumok leírása

	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati utasítást
	Sorozat szám		Ne használja ha a csomagolás sérült
	Tételszám		Rögtön felfelé
	Egyedi eszközazonosító		Napfénytől távol tartandó
	Tartsa szárazon		Halmozási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hullékáról szóló irányelv