

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

"LIGAMAX ANKLE" NEOPREN BOKA TÁMASZTÓ O-1120

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o., a lengyel piac vezető orvosi kellék- és rehabilitációs termékszállító ójának termékét választotta. Ez a használati útmutató tippeket és javaslatokat tartalmaz a termék megfelelő használatához.



FIGYELMEZTETÉS! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonsági irányelvek be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.



II. JELLEMZŐK

MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Boka kerülete a boka felett
1	32 cm-ig
2	38 cm-ig

ÖSSZETÉTEL
100% neoprén

A "LIGAMAX ANKLE" neoprén bokatámasz prémium neoprénből készült. Nyitott kialakítása tökéletes illeszkedést biztosít. A kiegészítő tépőzáras rögzítések lehetővé teszik az állítható stabilizálást a mozgásszabadság korlátozása nélkül.

III. RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT ÉS ALKALMAZÁS

A támasz szorosan illeszkedik a bokához, kiváló ízületi támasztást biztosítva. Megfelelő testhőmérsékletet biztosít a vérkeringés javításával, jelentősen csökkenti a duzzanatot és az ízületi merevséget, valamint enyhíti a fájdalmat.

A termék használható:

- Megelőzésre sport és fizikai aktivitás során,
- Gipsz utáni rehabilitáció során,
- Boka instabilitással kapcsolatos rendellenességek esetén,
- Enyhe bokaficamok és szalagsérülések esetén.

IV. ELLENJAVALLATOK

Ha bőrkárosodások jelentkeznek a rögzítési területeken, a használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett végezhető.

A rögzítő használatát a kezelőorvosnak kell felmérnie különböző eredetű memóriazavarokban szenvedők, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

V. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Ezt a terméket csak orvos utasítása szerint szabad használni.


Az ortézis felvételének módját képzett orvosi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen). A terméket és alkatrészeit csak rendeltetésszerűen szabad használni.

A terméket közvetlenül a testen vagy zokni felett kell viselni.

A terméket a jelen kézikönyvben és a terméken található címkén található utasításoknak megfelelően kell tisztán tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrkárosodáshoz vezethet. A termékkel kapcsolatos minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelő.
- Felvétel előtt oldja ki az összes tépőzáras zárat, és hagyja lazán.
- Helyezze a sarkat a stabilizátor kivágott nyílásába.
- Rögzítse a fő tépőzáras pántokat a lábfej hátulján és a bokaánál.
- Rögzítse a feszítőpántokat keresztben a boka mindkét oldalán.

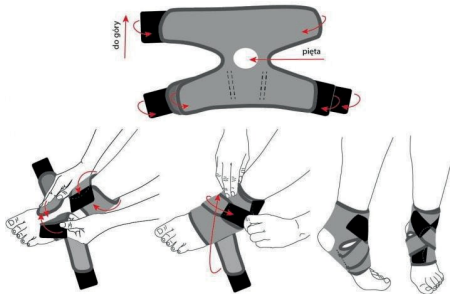

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk a termék rendszeres mosását. Mosás előtt rögzítse az összes tépőzáras zárat az ortézisen.

- Kézzel mosható legfeljebb 30°C-on, semleges, antiallergén mosószeres vízben.
- Langys vízben öblítse le; ne használjon öblítőt.
- Ne fehérítse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Szárítsa fektetve, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.

VIII. HASZNÁLAT VÉGE

Ha az ortézis ellenőrzése során bármilyen rendellenességet talál, kérjük, a terméket a gyártó ajánlásainak megfelelően ártalmatlanítsa. Használat után a terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

IX. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az ortézis rendeltetésszerű használati ideje 5 év. Ez az időszak hosszabb vagy rövidebb lehet a használat és a karbantartás gyakoriságától függően.

X. GARANCIA

A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy az eladott termék vadonatúj és kiváló minőségű.

A termékre garancia vonatkozik (a részletes jótállási feltételek a gyártó weboldalán találhatóak).

A terméket a rendeltetésének megfelelően és a használati utasításnak megfelelően kell használni.

XI. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Gyártó		Felső rész, ne fordítsa meg
	CE jelölés		Védje a nedvességtől
	Katalógusszám		Törékeny, óvatosan kezelje
	Modellszám		Ne vágja el
	Gyártási dátum		Újrahasznosítás
	Lásd a használati utasítást		Kézvel mosható
	Orvosi eszköz		Ne fehéritse
	Egyedi termékazonosító kód		Ne vasalja
	Figyelmeztetés		Ne vegytisztítsa
	Tételkód		Ne szárítsa szárítógépben
	Mennyiség		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Varsó,
Lengyelország e-
mail:info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



