



I TRAVEL- Használati utasítás

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Az összecsuksukható transzfer kerekesszék mozgáskorlátozott vagy korlátozott mozgásképessegű személyek szállítására készült, és kezelő segítségével használható. A szállító kerekesszék könnyű váza alumíniumból készült, ami megkönnyíti a szállítást és a használatot. Stabilitást biztosít biztonsági övvel, hordozható kialakítást ergonomikus hordozófogantyúval és könnyű összecsuksukhatósággal. Felhasználóbarát, mivel nem igényel összeszerelést, és használatra kész.

JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK:

Az összecsuksukható transzfer kerekesszék mozgáskorlátozott vagy korlátozott mozgásképessegű személyek szállítására készült, és kezelő segítségével használható. A felhasználónak képesnek kell lennie önállóan fenntartani az egyensúlyát ülés és emelés közben, valamint elegendő képességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ülő helyzetben maradjon. Ne használja, ha a felhasználónak egyensúly- vagy érzékelési zavarai vannak.

FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, akkor ne használja ezt a terméket vagy más kapható alkatrészt.
- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben feltüntetett céltól eltérő célra.
- A MOBIAK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan módosításából eredő következményekért.

- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutathatnak.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi felhasználás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Mindig fokozott óvatossággal kell eljárni a mozgó alkatrészek közelében, amelyek beszorulhatnak a végtagokba és sérülést okozhatnak.
- Ne próbálja meg a terméket levehető alkatrészeknél fogva felemelni.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK:

- A használati utasításban feltüntetett maximális felhasználói súlyt tilos túllépni.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően van összeszerelve és stabil helyzetben van.
- Csak akadályoktól mentes felületen használható.
- Összeszerelés során szigorúan tartsa be a Használati útmutatóban leírtakat.
- Az ujsérülések kockázata megnőhet a szerelés vagy összeszerelés során.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy bármilyen módon átalakították. A repedések és deformációk erősen befolyásolhatják a készülék teljesítményét és biztonságát.
- Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A terméket tilos a szabadban tárolni.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék személyek és tárgyak számára való teljes biztonságos használatát.

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:

A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt el kell végeznie ezeket az eljárásokat.

A felhasználónak meg kell győződnie a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről. A tisztítási és fertőtlenítési eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Viseljen kesztyűt.
2. A legpontosabb fertőtlenítés érdekében távolítsa el a látható szennyeződéseket.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy enyhe mosószert.
4. Törölje át száraz és tiszta ruhával. 5. Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ha egy napon úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).

- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt az újrahasznosító központokról, ahová a terméket le kell adni.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNYJELENTÉS:

A készülék használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2017/745/EK rendeletének, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

Méretetek

											
0805662	43 cm	39.5 cm	36 cm	36 cm	51 cm	83 cm	86.5 cm	48 cm	8" 6"	136kg	7.5 Kg

GARANCIA:


A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM fedezi a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkat. NEM fedezi továbbá a használat során vagy idővel elkopó alkatrészeket. A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben), szállítás okozta károk vagy hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. A szervizelés és az alkatrészigény nem érvényes, kivéve, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója megvizsgálta. A garanciális áruk szállítási költségeit a végfelhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

Működés


Fogja meg óvatosan az ülés vázát a bal kezével, fogja meg a háttámla vázát a jobb kezével, nyissa kifelé mindkét karját egyszerre, és rögzítse lefelé a biztonsági csatot. Ezután fordítsa lefelé a lábtartót és a kartámaszokat.



Folyamatos fékezési funkció: fékezéskor először a háttámla fékjét kell megfogni (fekete fogantyú), majd felfelé kell kifejteni az erőt (a jellegzetes hangot hallgatva)

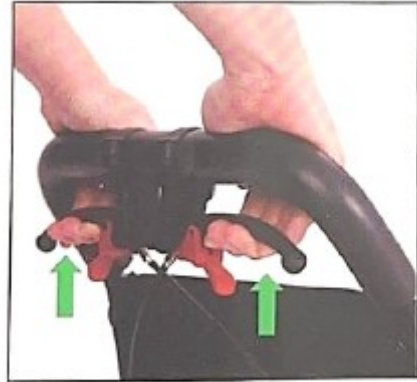

A fék kioldásához nyomja felfelé a piros kart (a jellegzetes hang hallatszik). Ezután mozgathatja a kerekesszéket.

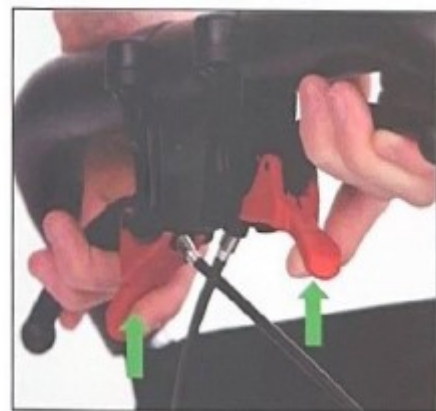

Nyomja meg az ülés alatt található speciális húzófogantyún található gombot, és húzza ki, hogy utazó kerekesszékként használja, vagy könnyen elhelyezze az autó csomagtartójában. A háttámla hátsó részén egy speciális zseb is található. Könnyen szállítható repülőgépen is.



Specifikációk

Keret	Alumínium
Biztonsági csat	PP
Ülés és háttámla anyaga	Poliészter és PVC
Kartámaszok	Felhajthatók
Lábtartók	Emelhető lábtartó
Hátulsó kerekek	Tömör
Elülső kerekek	Tömör
Kísérő fékek	IGEN
Max. teherbírás	136 kg
Biztonsági öv	IGEN
Speciális fogantyú a könnyű szállításhoz	IGEN

A címkén, a fő dobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvben található szimbólumok leírása

	GYÁRTÓ		TERMÉK SZÁM		OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	CE JELÖLÉS		GYÁRTÁSI SZÁM		ORVOSI ESZKÖZ
	TÉTEL SZÁM		NE HASZNÁLJA HA A CSOMAGOLÁS SÉRÜLT		EGYEDI ESZKÖZAZONOSÍTÓ
	CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA		ÓVATOSAN KEZELJE		Elektromos és elektronikai hulladékokról szóló irányelv



MOBIAC S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

