

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ref.: 0806235

FELFÚJHATÓ MODEDŐ + SZIVATTYÚ / FELFÚJHATÓ
MOSDÓ + SZIVATTYÚ + PUMPÁVAL

Ref:0806232

VÍZSZÁK



MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Fontos biztonsági utasítások

HASZNÁLATI CÉL:

Ez a termék lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy ágyhoz kötött emberek haját mossák anélkül, hogy megnedvesítenék őt vagy az ágyneműt. Bárki használhatja és hordozható fürdőként is.

TARTALOM:

1. Felfújható medence tömlővel a könnyű vízelvezetés érdekében.
2. Műanyag cső és kábel.



Mosdótál



Vízzsák, opcionális

JELLEMZŐK:

1. Fürdőszoba mosdó, duplán megerősítve a nagyobb tartósság és kényelem érdekében. Leeresztő szeleppel és tömlővel is kapható a könnyű és gyors vízleeresztés érdekében. Vízzsákkal, ha nem férne hozzá a vízforráshoz, opcionális (0806232)

ELŐKÉSZÍTÉSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Fújja fel a medencét. A szelep nem visszaforgatható, és nem ereszti le, ha nyitva marad. A leeresztéshez tartsa lenyomva a szelepet és az oldalfalakat, amíg teljesen ki nem ürül a levegőből.
2. Helyezze a medencét sima felületre.
3. Helyezze a leeresztő tömlőt egy medencébe vagy mosogatóba, ügyeljen arra, hogy alacsonyabban legyen a medencénél, hogy megakadályozza a víz kifolyását.

4. Nyissa ki a leeresztő szelepet, miközben a medencét használja a víz leeresztésére.

5. Helyezze a mosdót a felhasználó nyaka alá, amíg jól nem érzi magát.



JEGYZET:

Az ábrán látható vizeszsák **opcionális**
(0806232)



Vízsák, opcionális

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy az már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti az újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

TISZTÍTÁSI ÉS MOSÁSI UTASÍTÁSOK:

- Mossa ki a mosdót enyhe, fertőtlenítő szappannal.
- Tisztítsa meg nedves ruhával, öblítse le tiszta vízzel, majd szárítsa meg száraz ruhával.
- Ne használjon tisztítószert vagy más oldószert.
- Ne mossa mosógépben, és ne használjon szárítógépet a szárításhoz.
- Ne használjon gőztisztítót a tisztításhoz.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- MOBIAKS. A nem vállal felelősséget minden olyan következményért, amely a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából ered.
- MOBIAKS. Az Are fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa
- Van egy $\pm 3\%$. Eltérés a termékek méretétől.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi hivatkozás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne próbálja megemelni a terméket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra.

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM vonatkozik azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túl használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek.

NEM VONATKOZIK azokra az alkatrészekre, amelyek használat vagy túlóra során elhasználódnak.

A jóállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol alkalmazható) és szállító által okozott károkra vagy hibákra.

Szervizt vagy pótalkatrészt nem alkalmaznak, kivéve, ha azt hivatalos szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költsége a végfelhasználót vagy a kereskedőt terheli.

Importálva:

MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó út 1. 26-309223