



REF : 0805660

REF	HU Leírás
0805660	360° fordítható zuhanyszék

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A zuhanyszék lehetővé teszi a felhasználó számára a zuhanyozás és a napi személyes higiénia során a nagyobb önállóságot, csökkentve az állás okozta izomfáradtságot, valamint a csúszás és sérülések kockázatát. A csúszásmentes gumitalpak biztosítják a tapadást a padlóhoz és a kád/zuhany felületéhez, az állítható magasságú lábak pedig lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy az igényeinek megfelelően könnyen módosítsa a teljes magasságot. A háttámla további biztonságot és kényelmet nyújt. A kádülés könnyen mozgatható kis súlyának köszönhetően, és 360°-ban elforgatható egy könnyen használható kar segítségével.

JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK:

A zuhanyszék idősek, kerekesszék-használók, ágyéki, térd- vagy csípőízületi mozgáskorlátozottak, valamint mindazok számára készült, akiknek nehézséget okoz az álló helyzet fenntartása a napi személyes higiénia zuhanyozási szakaszaiban. A felhasználónak rendelkeznie kell az ülés és állás során az egyensúly önállóságával, valamint megfelelő képességgel kell rendelkeznie az ülés megtartásához. A zuhanyülőkét tilos használni, ha a felhasználónak egyensúly- vagy érzékelési problémái vannak.

FIGYELEM (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos és képzett képviselővel.
- Ha nem olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, akkor ne használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt.
- Ne használja a terméket a kézikönyvben nem feltüntetett célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan módosításából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a jelen dokumentumban található információkat.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi felhasználás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Mindig fokozott óvatossággal kell eljárni a mozgó alkatrészek közelében, amelyek végtagbecsípődést és sérülést okozhatnak.
- Ne próbálja meg a terméket a levehető alkatrészeknél fogva felemelni.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK:

- A használati utasításban feltüntetett maximális felhasználó súlyát tilos túllépni.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően van összeszerelve és stabil helyzetben van.
- Az ülés csak akadályoktól mentes felületen használható.
- Összeszerelés során szigorúan tartsa be a felhasználói kézikönyvben leírtakat.
- Az ujsérülések kockázata megnőhet a szerelés vagy összeszerelés során.
- Ne himbálózson az ülésen, ez megcsúszáshoz, felboruláshoz vagy a lábak beeséséhez vezethet. Ha zuhanyszéket használ, mindig tartsa az ülést a 4 lábán.
- Ne módosítsa az ülést és annak alkatrészeit semmilyen módon.
- Ne használja a zuhanyülőket, ha sérült vagy bármilyen módon átalakított. A repedések és deformációk erősen befolyásolhatják a készülék teljesítményét és biztonságát.
- Használat után a zuhanyülőket el kell távolítani a zuhanytálcáról az akadályok elkerülése érdekében.
- Ne használja a zuhanyülőket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A zuhanyülőket tilos a szabadban tárolni.
- Ellenőrizze, hogy a zuhanyszék lábai szilárdan a padlón vannak-e, a karfák rögzítve vannak-e, és hogy a szék simán forog-e.

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:

A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt el kell végeznie ezeket az eljárásokat.

A felhasználónak meg kell győződnie a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről. A tisztítási és fertőtlenítési eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Viseljen kesztyűt.

2. A fertőtlenítés megkezdése előtt távolítsa el a látható szennyeződések.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy enyhe mosószert.
4. Törölje át száraz és tiszta ruhával.
5. Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ha egy napon úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt az újrahasznosító központokról, ahová a terméket le kell adni.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNYJELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:


Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 2017/745/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

GARANCIA:


A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elkophatnak. A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben), szállítás okozta károkra vagy hibákra a garancia nem vonatkozik. A szervizelés és az alkatrészcsere csak akkor lehetséges, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális áruk szállítási költségeit a végfelhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

HIV.: 0805660 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ: 360°-BAN FORGÓ ZUHANYSZÉK


ÖSSZESZERELÉS CSOMAG TARTALMA

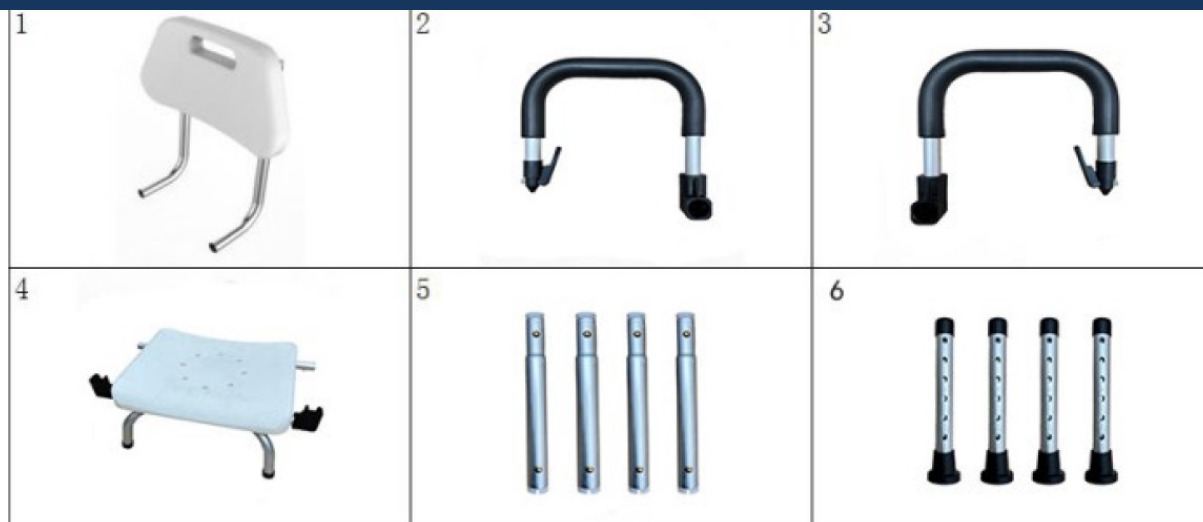


LÁBCSŐ ÖSSZESZERELÉS

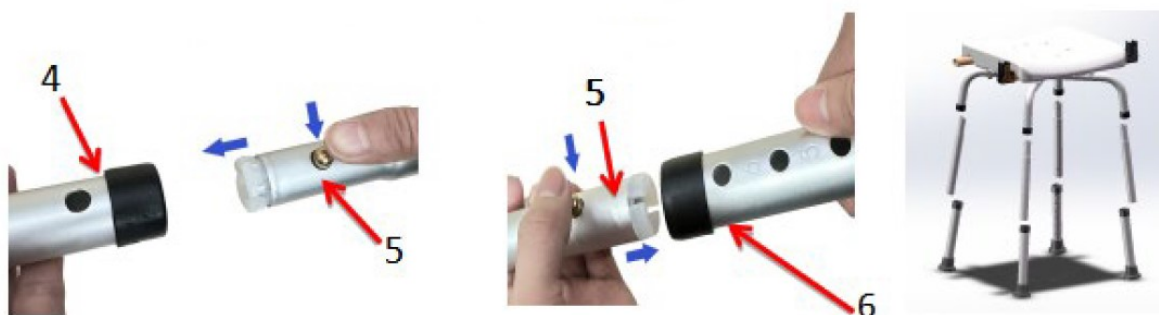

KARTÁMLA ÖSSZEÁLLÍTÁS

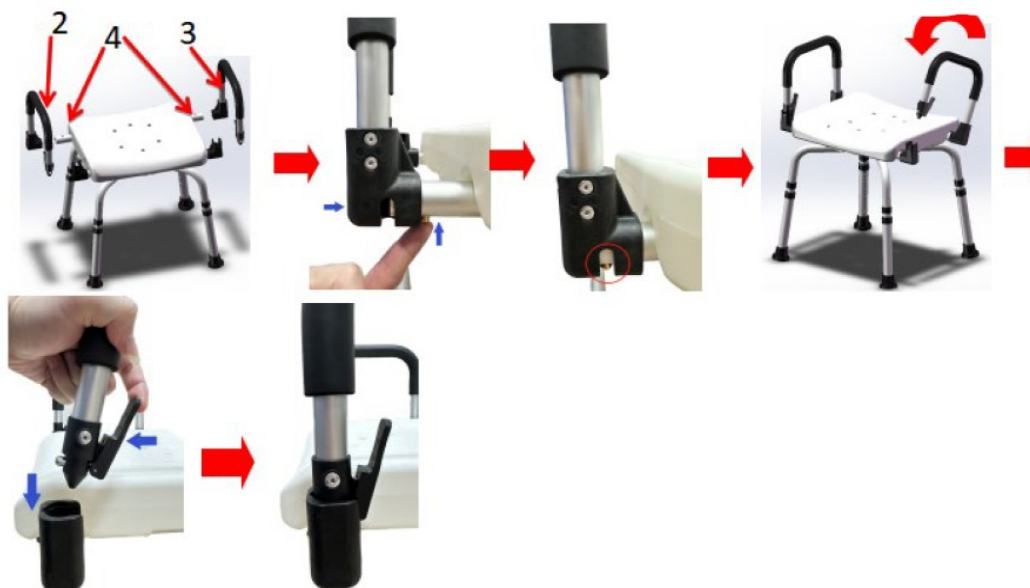

HÁTTÁMLÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

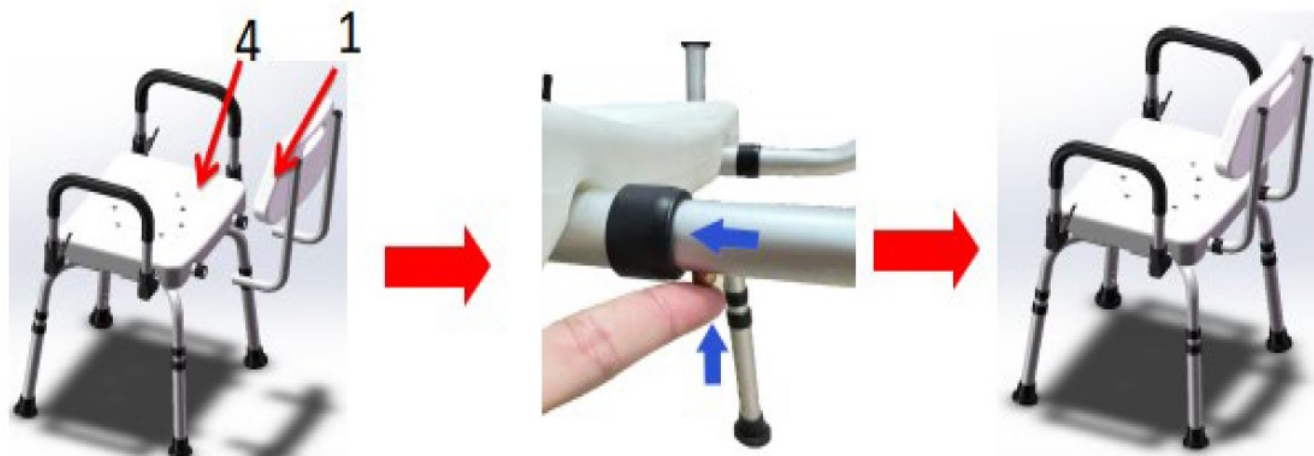

A forgószer használatakor, ha el kell forgatni, először húzza meg az oldalán található kart, majd forgassa el. A forgatás közben nem kell sokáig húzni a kart. Négy forgásirány (360°) van, az egyik irányból a másikba a kar egy kattant hallat, ami azt jelzi, hogy a forgószer egyszer rögzült és nem forog.

REF								
0805660	50cm	50cm	40cm	34cm	34cm	43-55 cm	136kg	4.9Kg

- HÁTTÁMLA, ÜLÉS, FORGÓKAR ANYAGA: PE
- VÁZ ANYAGA: ALUMÍNIUM
- KARTÁMLA ANYAGA: ALUMÍNIUM ÉS EVA HAB
- CSÚCSOK ANYAGA: TPR

A címkén, a fő dobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvben található szimbólumok leírása

	GYÁRTÓ		TERMÉK SZÁM		OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	CE JELÖLÉS		GYÁRTÁSI SZÁM		ORVOSI ESZKÖZ
	TÉTEL SZÁM		NE HASZNÁLJA HA A CSOMAGOLÁS SÉRÜLT		EGYEDI ESZKÖZAZONOSÍTÓ
	CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA		ÓVATOSAN KEZELJE		Elektromos és elektronikai hulladékokról szóló irányelv



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

