



GR EN

MOBIACARE®
MEDICAL EQUIPMENT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: **ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ LAPIS**

USER MANUAL: **COMMODE WHEELCHAIR LAPIS**

REF : 0815000

HU: HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LAPIS ÖNHAJTÓS KERÉKESZÉK SZOBA WC EGYBEN



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezeket a kerekesszékeket mozgáskorlátozott vagy fizikailag vagy szellemileg korlátozott mozgásképességű személyek számára tervezték.

Lehetővé teszik mozgási problémákkal küzdő vagy korlátozott mozgásképességű személyek szállítását, és a beteg maga is használhatja a mozgáshoz (ha 20-24 hüvelykes hátsó kerekekkel rendelkezik), vagy kísérő segítségével.

Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó kerékekkel és kapaszkodóval rendelkezik a keréken, akkor a felhasználó önállóan mozoghat.

A WC-vel ellátott kerekesszék WC-ülőkeként is használható.

SPECIFIKÁCIÓK

KERET	Acél – összecusukható
KERET	Egyetlen keresztléc
ÜLÉS	PVC WC-vel – „U” alakú
KARTÁMASZ	Összecusukható-pattintható háttámla
LÁBTÁMASZ	Levehető, forgatható, elhajtható, állítható magasságú
HÁTULSÓ KERÉK	24" MAG tömör és gyorskioldású
ELÜLSŐ KERÉK	8" x 1" tömör (200x25 mm)
HÁTTÁMLA	Összecusukható háttámla mechanizmussal

MÉRETEK

0815000	48cm	46cm	40cm	46 cm	64cm	109cm	102cm	51cm	24"8"	125kg	19*kg

*Lábtartókkal és hátsó kerekekkel. A lábtartók és hátsó kerekek nélküli kerekesszék súlya 11,5 kg.

ÖSSZESZERELÉS

Kérjük, tekintse meg az **A. MELLÉKLET**

SZIMBÓLUMOKAT.

Kérjük, tekintse meg a **B. MELLÉKLET**

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, akkor ne használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatát vagy az óvintézkedéseket, kérjük, a termék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a megfelelő szakemberrel, mert ez kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Ne lépje túl a maximális teherbírást.
- Mindig különös óvatossággal kell eljárni a mozgó alkatrészek közelében, amelyek végtagbecsípődést és sérülést okozhatnak.
- Ne próbálja meg a kerekesszéket a levehető alkatrészeknél fogva felemelni.

- A kerekesszékbe való be- és kiszállás önállóan is elvégezhető, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

FONTOS!

A kerekesszék kialakítása maximális biztonságot nyújt. A felhasználók azonban veszélynek lehetnek kitéve, ha nem megfelelő módon használják a kerekesszékeket. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem specifikus vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Sötét helyeken mindig viseljen világos színű ruhát, hogy mások könnyebben elérhessék. Legyen óvatos az első alkalommal, amikor ezzel a kerekesszékkal közlekedik.
- Ismerkedjen meg a kerekesszékével.
- Használja a kerekesszéket sík talajon, valamint emelkedőn és lejtőn is.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha a térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha fel kell másznia az ülésre.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne próbáljon meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajmembránnal.
- Ne használjon nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket, kivéve a MOBIÁK által jóváhagyottakat.
- Ne álljon a kerekesszékbe.

HASZNÁLAT ELŐTT:

- Ellenőrizze, hogy a váz sérült-e a termék biztonságos használata érdekében. Nincsenek repedések vagy törések a vázon.
- Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
- Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen ki van-e nyitva. Ha nem, nyomja le az ülést a váz oldalairól.
- Ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e.
- Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék személyek és tárgyak számára való teljesen biztonságos használatát.
- Ha gyorszáras kerekek vannak, ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve vannak-e.

FIGYELMEZTETÉS!

A következő módszereket csak tapasztalt betegek alkalmazhatják. Ha nem rendelkezik tapasztalattal, kérjen segítséget egy kísérőtől!

BESZÁLLÁS A KERKESSZÉKBE:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékrögzítőket.
3. Karjaival támaszkodjon a vázra, és lassan menjen lefelé az ülés felé.

KISZÁLLÁS A KERKESSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékrögzítőket.
3. Mindkét fogantyúra egyformán támaszkodjon. Ha csak egy kézzel (és felügyelet nélkül) tartja, az sérülést okozhat.

4. Áthelyezéskor helyezze át testsúlyát az ülésre.

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon lifteket és rámpákat. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el úti célját. A kerekesszéket a váz stabil részeinél fogva kell felemelniük. A kerekesszéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül rajta. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőjétől:
3. Ezt a kerekesszéket kizárólag egy személy szállítására szabad használni az ülésen.
4. A felhasználóknak nem szabad kerekesszékekben ülniük, miközben bármilyen közlekedési eszközt használnak.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat üléshez vagy felálláshoz, **FELBORULÁSVESZÉLY**. A lábtartókat a felhasználó használja ülés közben.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben, **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít fenntartani a kerekesszék élettartamát és hatékonyságát.

HETENTE

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kereken található utasítások követésével.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztkar középső csavarja szoros-e és jó állapotban van-e.
3. Tisztítsa meg az anyagot szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy krómozott felületekhez vagy festett felületekhez való speciális tisztítószerrel.
5. Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
6. Ellenőrizze az első és a hátsó kerekek sérüléseit.

NEGYEDÉVENTE

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillákat, húzókerekeket, propellereket.
2. Zsírozza vagy olajozza be az összes súrlódásnak vagy kopásnak kitett alkatrészt.
3. Húzza meg a csavarokat és anyákat.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és szükség esetén javítása.

ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végeztesen teljes körű felülvizsgálatot egy szakképzett szervizzel.
2. A beteg biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett mind a váz, mind a kárpit alaposan megtisztítható.

- A megjelenés megőrzése érdekében az anyagot rendszeresen tisztítani kell.

- A szennyeződések szivaccsal, enyhe mosószerrel és meleg vízzel távolíthatja el, az anyag textúrájának irányában haladva.
- Száradás előtt öblítse le tiszta vízzel.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell tisztítani.
- A vázat rendszeresen kell tisztítani enyhe mosószerrel.
- A bőr üléses kerekesszékeket száraz ruhával kell tisztítani.
- A kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal kell tisztítani. Ügyeljen a kerekek szárítására. Veszélyes a kerekesszéket nedves kerekkel használni.
- Ha fertőtleníteni kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.



FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos és képzett képviselővel.
- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék vázának jogosulatlan módosításából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.



KÖRNYEZETVÉDELME

Ha egy napon úgy találja, hogy a termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt az újrahasznosító központokról, ahová a terméket le kell adni.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek a 2017/745/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNYJELENTÉS:

A készülék használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának. GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának

be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá a használat során vagy idővel elkopó alkatrészekre, például a kárpitozásra, a kerekekre vagy a fékekre.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben) és a szállítók által okozott károkra vagy hibákra a garancia nem vonatkozik.

A szervizelésre vagy a pótalkatrészekre nem vonatkozik a garancia, kivéve, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója megvizsgálta. A garanciális áruk szállítási költségeit a felhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

A. MELLÉKLET. ÖSSZESZERELÉS

A kezében lévő kerekesszék eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, és vegye ki a kerekesszék összes alkatrészét a dobozból.
- Nyissa ki a kerekesszék összecsukható vázát, hogy teljesen kinyíljon, majd szerelje fel a kerekeket.
- Helyezze az ülést a vázra, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen a kijelölt rögzítési pontokhoz.
- Csúsztassa és helyezze a tartályt az ülés nyílásába, ügyelve arra, hogy szilárdan a helyére kerüljön. Helyezze a vezetősínekbe, és nyomja befelé, amíg teljesen az ülés alá nem illeszkedik.





A lehajtható háttámla lehajtásához nyomja meg a háttámla hátulján található könnyen használható karokat.



- Győződjön meg arról, hogy a kartámaszok és a háttámla is stabilak, megfelelően vannak elhelyezve és rögzítve.
- Csatlakoztassa a lábtámaszokat a kerekesszékhez, és rögzítse azokat az alábbi képen látható biztonsági mechanizmussal. A lábtámasz zóna a beteg lábának megfelelő elhelyezéséhez szükséges.
- A lábtámaszok magassága állítható.



A fékek a kerekesszék rögzítésére szolgálnak álló helyzetben, hogy megakadályozzák az elgurulást. A fék behúzásához nyomja előre a fékkart a tenyerével. (1)
A fék kioldásához húzza hátra a fékkart. (2)

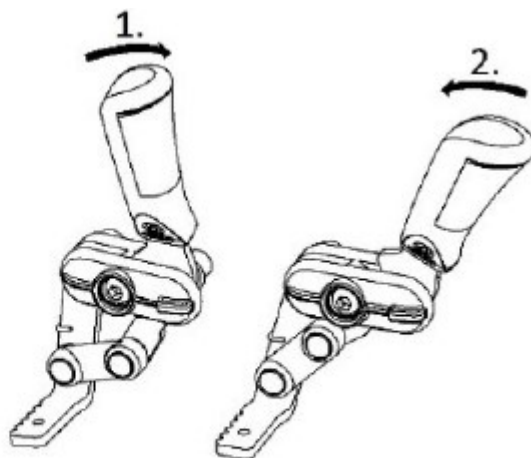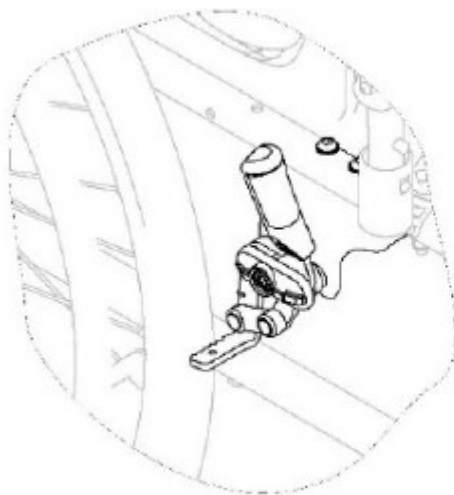

- Soha ne húzza be a rögzítőféket menet közben.
- Ne húzza be a rögzítőféket a kerekesszék lassításához.
- Ne támaszkodjon a rögzítőfékre támasztékként vagy áthelyezéshez.
- A fék használata közben tartsa távol az ujjait a mozgó alkatrészekről, mindig tartsa a kezét a fékkaron.

A gyorszáras hátsó kerekek eltávolítása:

A kerekesszék gyorszáras rendszerrel rendelkezik a hátsó kerekeken, így könnyen eltávolíthatók, és csökkenthető a tárolóhely az autóban és az otthonban is.

A kerék szétszereléséhez nyomja meg a kerék közepén található fekete gombot a kioldáshoz, és ezzel egyidejűleg húzza kifelé a kereket, amíg teljesen ki nem jön az alapjából.

Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a másik keréken.

Az összeszereléshez kövesse a fordított eljárást.



	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati utasítást
	Sorozat szám		Ne használja ha a csomagolás sérült
	Tételszám		Rögtön felfelé
	Egyedi eszközazonosító		Napfénytől távol tartandó
	Tartsa szárazon		Halmozási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hullékáról szóló irányelv


MOBIAC S.A
 ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
 KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
 T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com




MOBIAC®
 MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977