

REF : 0807109



HASZNÁLATI UTASÍTÁS: ELEKTROMOS LÉPCSŐMÁSZÓ RENDSZER
KEREKESZÉKHEZ

MBK KÓD	HU LEÍRÁS
0807109	ELEKTROMOS LÉPCSŐMÁSZÓ RENDSZER KEREKESZÉKHEZ

RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁS:

A termék fizikai korlátok miatt korlátozottan képes lépcsőzésre személyek szállítására szolgál. Ezek általában kerekesszékekhez kötött személyek, például gerincsérülések vagy neurológiai állapotok miatt, vagy olyan személyek, akiknek még van mozgásképességük, de életkoruk miatt már nem tudnak lépcsőzni. A készülék kezeléséhez megfelelően képzett kezelő szükséges.

JAVALLATOK:

Fizikai korlátok miatt korlátozottan képes lépcsőzésre személyek szállítására, kortól és nemtől függetlenül.

Kizárólag képzett és szakképzett személyzet használhatja.

ELLENJAVALLATOK:

Nem szakképzett és nem képzett személyzet számára nem ajánlott.

A készülék nem megfelelő használata a beteg sérülését okozhatja.

Ha a felület sérült (repedt vagy törött), ne használja a terméket.

FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket a kézikönyvben nem szereplő célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretén végzett jogosulatlan módosításokból eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.
- Mindig ajánlott a vészhelyzeti reagálásra vonatkozó eljárások betartása.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat a betegnek.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, akkor ne használja ezt a készüléket vagy más kapható alkatrészt.
- Ha nem érti a használatát vagy az óvintézkedéseket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a megfelelő műszaki személlyel, mielőtt használná a készüléket, mert ez kárt okozhat.
- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi felhasználás céljából.
- A terméket csak szakképzett személyzet használhatja.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek játszanak vagy kezeljék a készüléket.
- Különös óvatossággal kell eljárni a mozgó alkatrészek közelében, amelyek végtagbecsípődést vagy sérülést okozhatnak.
- Soha ne hagyjon felügyelet nélkül kerekesszékes személyt a készüléken, és mindig használja a mellékelt biztonsági öveket.
- A lépcsómászó rendszert csak képzett személyzet használhatja, és mindig mindkét kézzel kell fogni.
- Az akkumulátort teljesen fel kell tölteni a termék első használata előtt.

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a váz sérült-e a termék biztonságos használatának garantálása érdekében (nincsenek-e repedések vagy törések a vázon).
2. Sérülés esetén ne használja a terméket, és további utasításokért forduljon a kereskedőhöz.
3. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve, és minden csavar biztonságosan meg van-e húzva.

4. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék személyek és tárgyak számára való abszolút biztonságos használatát.
5. Rendszeresen ellenőrizze a szilárdságát és a stabilitását.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:

- Csak nedves ruhát és enyhe szappant használjon a tisztítandó felületeken. Használat előtt alaposan szárítsa meg a terméket.
- Szárítsa közvetlen napfénytől védve.
- NE hagyja nedvesen a terméket.
- Ne használjon kémiai tisztítószeret a keret tisztításához. Ez károsíthatja a termék felületét.
- Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket, például acetont.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

KÖRNYEZETVÉDELME:

Ha egy napon úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosító központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása segíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ: ELEKTROMOS LÉPCSŐMÁSZÓ RENDSZER KEREKESZÉKHEZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Váz anyaga	Alumínium
Max felhasználói súly	200 kg
Lejtős pályák	20°
MÉRETEK (KINYITVA)	60,6 x 50 x 109 cm
MÉRETEK (HXSZXM) (ZÁRVA - HA A KERÉKRÖGZÍTÉSI PONTOT ELTÁVOLÍTOTTÁK)	45 x 30 x 109 cm
ÁLLÍTHATÓ KAPCSOLÓ MAGASSÁGA	10-160 cm 3 magassági állás
ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ KEREKESZÉK	40-80 cm
ALKALMAS KEREKESZÉK SZÉLESSÉG	56-74 cm
A KEREKESZÉK HÁTSÓ KERÉKÉNEK MEGFELELŐ ÁTMÉRŐJE	30-60 cm
NETTÓ SÚLY	36 kg
BRUTTÓ SÚLY	48 kg
MUNKAERŐ	AC 100-240V, 50/60Hz
MOTOR	24V 200W
TÖLTŐ	29,4V, 2A
AKKUMULÁTOR	24V,13A lítium-ion akkumulátor
SEBESSÉG	3-8 mérföld/perc
• SPECIÁLIS SÍNNEL TERVEZVE A LÉPCSŐBEN VALÓ KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSÉRT	

- KÖNNYŰ TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
- NÉGY KOPÁSÁLLÓ KERÉKKEL FELSZERELVE
- LED VILÁGÍTÁS A SÖTÉTBEN VALÓ KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁSÉRT
- LCD KIJELZŐ A VEZÉRLŐPANELEN

**VEZÉRLŐ
PANEL**



**ÁLLÍTHATÓ
KAPCSOLÓ - 3
POZÍCIÓ**

SÍNEK

**AKKUMU
LÁTOR**


**HÁTSÓ KEREKEK 127
mm (5")**

KERÉK RÖGZÍTÉSI PONT

**ELSŐ
KEREKEK 51
mm (2")**



A lépcsőre vonatkozó követelmények:

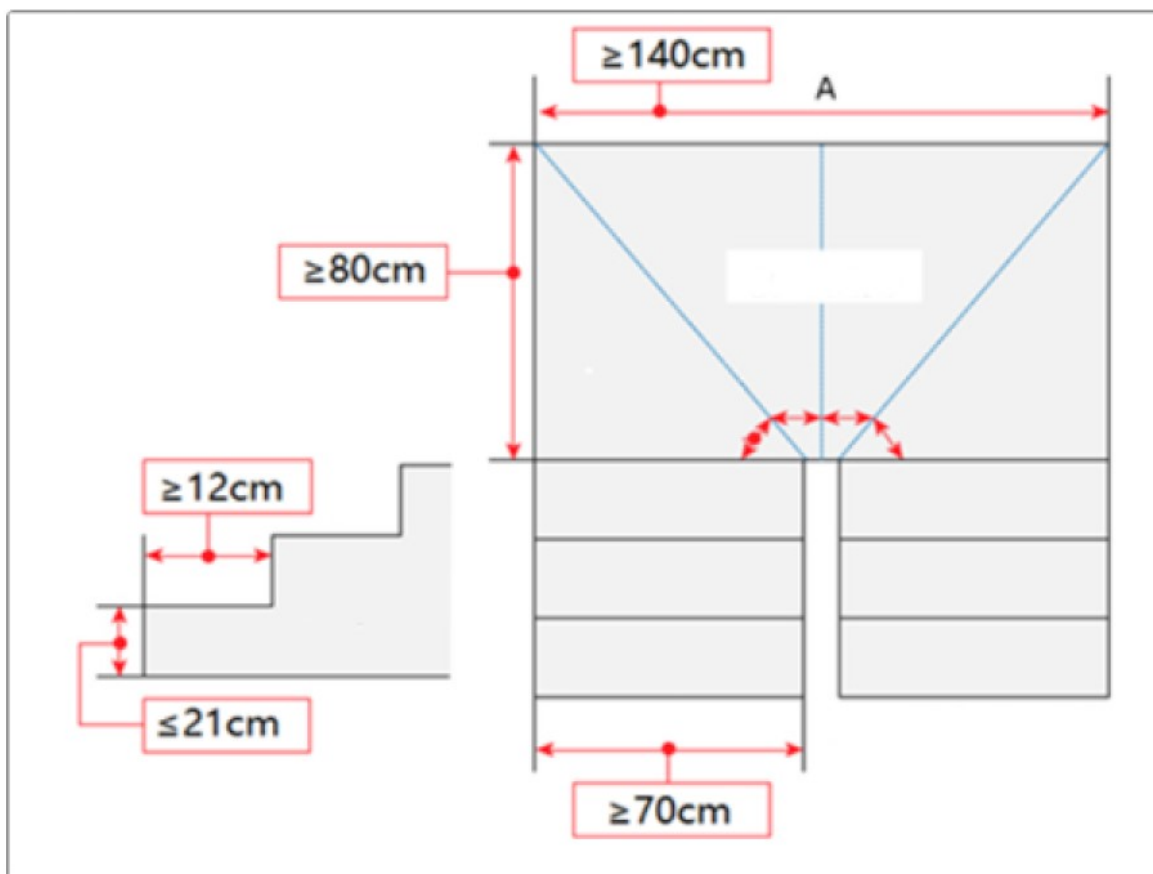

A TERMÉK HASZNÁLATA:

A bekapcsológomb az akkumulátoron található, nyomja meg a piros gombot a tápellátás bekapcsolásához.



Nyomja meg az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző panelen található kerek gombot. A zöld jelzőfények kigyulladnak, ha az akkumulátor kellően fel van töltve. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fel van töltve. Minden zöld jelzőfény 25%-os töltöttségi szintnek felel meg.



Az akkumulátor töltöttségi szintjét a tolófogantyún található kezelőpanelen ellenőrizheti. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 25% alatt van, töltés szükséges.





Helyezze a rendszert a lépcső közelébe, de elég messze ahhoz, hogy a kerekesszékes biztonságosan be tudjon szállni. Rögzítse a kerekeket.



Nyissa ki az állítható kapaszkodót a keret hátulján található piros kar megnyomásával. Amikor elérte a kívánt helyzetet, engedje el a piros rudat. 3 magassági pozíció közül választhat. Győződjön meg arról, hogy az állítható kapaszkodó a helyén van-e rögzítve a piros kar meghúzásával.



Állítsa be az egyes rögzítőfogantyúkat úgy, hogy a kerekesszék illeszkedjen a rendszerre a kerekesszék méretének megfelelően.

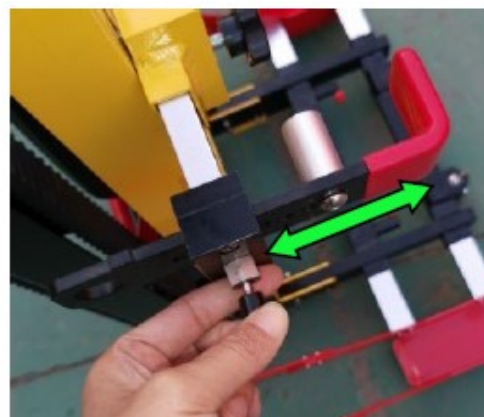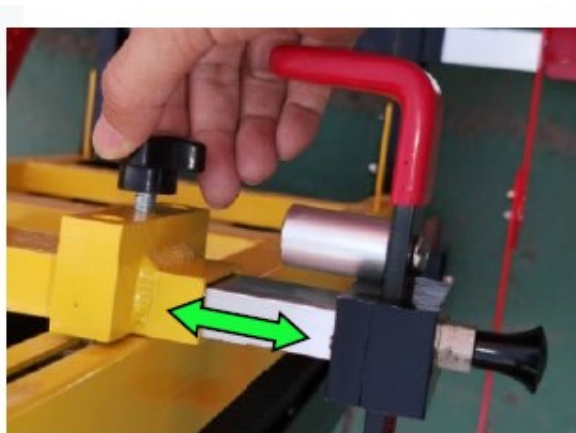

A kívánt szélesség eléréséhez állítsa be a kerekesszék kerekeinek rögzítési részének helyzetét a rögzítőgyűrű meghúzásával a képen látható módon.

Helyezze a kerekesszéket a mászórendszerre az alábbiak szerint. A kerekesszék fő kerekeinek szilárdan kell illeszkedniük a piros rögzítőpontokba.



A rögzítőfogantyúnak rögzíteniük kell a kerekesszék háttámláját. A fejtámlának kényelmes helyzetben kell lennie a felhasználó számára. Mozgatás előtt végezze el a szükséges beállításokat.



Rögzítse a kerekesszéket és a felhasználót a biztonsági övek segítségével. Rögzítse a lépcsőmászó rendszer fő kerekeit.



Helyezze a rendszert a lépcső aljához. Rögzítse a kerekeket. Szemrevételezéssel ellenőrizze a lépcsőt, hogy nincsenek-e biztonsági kockázatok, például törések, repedések, jég vagy víz. Oldja ki a síneket a képen látható gomb megnyomásával. Győződjön meg arról, hogy a sínek a lehető legközelebb vannak a lépcsőhöz, és rögzítve vannak.



Kapcsolja be a vezérlőegységet a piros POWER gomb megnyomásával.



Döntse hátra a mászórendszert, amíg a sínek el nem érik a lépcsőt.



FELMENNİ A LÉPCSŐN



Nyomja meg a vezérlőegység FEL gombját a mozgás elindításához. Amikor eléri a lépcső tetejét, állítsa vissza a rendszert függőleges helyzetbe. Nyomja meg a piros BE/KI gombot a sínmozgás kikapcsolásához. Vigye a rendszert elég messzire a lépcsőtől, hogy a kerekesszékes biztonságosan ki tudjon szállni. Rögzítse a rendszer kerekeit. Lazítsa meg a biztonsági öveget, és oldja ki a kerekesszék kerekeit és a rögzítőfogantyúkat. Tolja előre a kerekesszéket, amíg el nem távolodik a rendszertől.


LEFELE A LÉPCSŐN



Helyezze a rendszert a lépcső tetejére. Rögzítse a kerekeket. Vizuálisan ellenőrizze a lépcsőt, hogy nincsenek-e rajta biztonsági kockázatok, például repedések, törések, jég vagy víz. Oldja ki a síneket a képen látható gomb megnyomásával. Kapcsolja be a vezérlőegységet a piros BE/KI gomb megnyomásával. Döntse hátra a rendszert, és óvatosan tolja a lépcső felé, amíg a sínek be nem illeszkednek a lépcsőbe. Nyomja meg a vezérlőegység LE gombját a mozgás megkezdéséhez. Amikor eléri a lépcső alját, állítsa a rendszert függőleges helyzetbe. Nyomja meg a piros BE/KI gombot a sínmozgás kikapcsolásához. Vigye a rendszert annyira el a lépcsőtől, hogy a kerekesszék-használó biztonságosan ki tudjon szállni. Rögzítse a rendszer kerekeit. Lazítsa meg a biztonsági öveget, és oldja ki a kerekesszék kerekeit és a rögzítőfogantyúkat. Tolja előre a kerekesszéket, amíg az el nem távolítódik a rendszerből.

ÖSSZECSUKÁS

A piros kerekesszék-kerék rögzítőelemeit a rögzítőgyűrű meghúzásával és lecsúsztatásával távolítsa el. Helyezze a rendszert a földre. A piros rúd felfelé húzásával, majd enyhé megnyomásával a rendszer összezsukható.

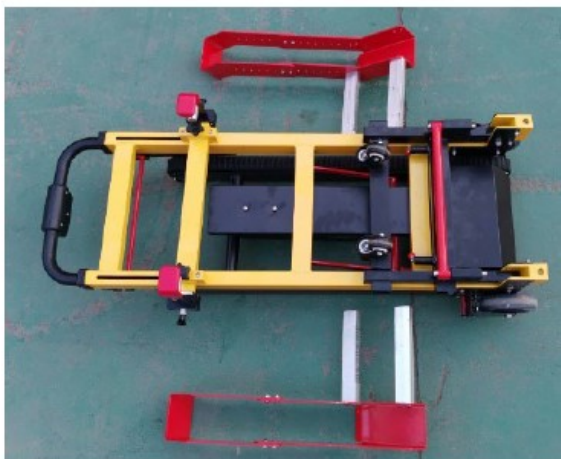

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Kapcsold ki a főkapcsolót. A töltőport a bekapcsológomb mellett található. Csavarozd le a töltőport fedelét. Csatlakoztasd a töltőkábelt a töltőporthoz. Dugd be a töltőkábelt a konnektorba. Amikor az akkumulátor feltöltődött, vedd ki a töltőkábelt, és csavarozd vissza a töltőport fedelét. Az akkumulátorhoz két kulcs tartozik, amelyekkel az akkumulátor a készülékhez rögzíthető.



GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károokra.

NEM vonatkozik továbbá azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elkophatnak.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben) és szállítás okozta károk vagy hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A szervizelés és az alkatrészcsere csak akkor lehetséges, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális áruk szállítási költségeit a végfelhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

ESEMÉNYJELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 2017/745/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

A címkén, a fő dobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvben található szimbólumok leírása

	GYÁRTÓ		TERMÉK SZÁM		OLVASSSA EL A HASZNÁLAT UTASÍTÁST
	CE JELÖLÉS		GYÁRTÁSI DÁTUM		ORVOSI ESZKÖZ
	TÉTEL SZÁM		NE HASZNÁLJA, HA CSOMAGOLÁS SÉRÜLT		EGYEDI ESZKÖZ AZONOSÍTÓ
	CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA		ÓVATOSAN KEZELJE		ELEKTRONIKUS ÉS ELEKTROMOS HULLADÉKOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV



MOBIAC S.A
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



MOBIAC®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977