



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR MIGHTY

USER MANUAL: ROLLATOR WALKER MIGHTY

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Mighty járókeret rollátor



REF : 0812215

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A rollátor a korlátozott járáskéesség támogatására és javítására szolgál. A felhasználó fennmaradó járáskéességének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy elhagyhassa otthonát, elvégezhesse a szokásos napi tevékenységeket és részt vehessen a társasági életben anélkül, hogy veszélyeztetné magát vagy másokat. Beltéri és kültéri használatra.

A rollátor célja, hogy segítsen a személynek járás közben. Továbbá a rollátor teher szállítására is alkalmas, akár speciálisan kialakított kosárban, tálcán vagy táskában.

A termék maximális terhelése az A. MELLÉKLETBEN található.

Ez a súlykorlátozás magában foglalja a felhasználó súlyát és a kosár vagy táska tartalmát.

MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK

Lásd az **A. MELLÉKLET**

ÖSSZESZERELÉSI RÉSZÉT.

Lásd a **B. MELLÉKLET**

SZIMBÓLUMOKAT.

Lásd a **C. MELLÉKLET**

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ezt a kézikönyvet a termék felhasználójának KELL átadni.
- Ha nem olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, akkor ne használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatát vagy az óvintézkedéseket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert ez kárt okozhat.
- OLVASSA EL ezt a felhasználói kézikönyvet, és ŐRIZZE MEG későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Ne lépje túl a maximális teherbírást.
- Mindig különös óvatossággal kell eljárni olyan mozgó alkatrészek esetén, amelyek végtagbecsípődést és sérülést okozhatnak.
- Ne próbálja meg a terméket a levehető alkatrészeknél fogva felemelni.

FONTOS!

A termék kialakítása maximális biztonságot nyújt. A felhasználók azonban veszélynek lehetnek kitéve, ha nem megfelelően használják a terméket. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem specifikus vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Sötét helyeken mindig viseljen világos színű ruhát, hogy mások könnyebben elérhessék.
- Legyen óvatos a termék használatának első elsajátítása során.
- Használja a terméket sík talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajmembránnal borított felületen.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne menjen fel vagy le lépcsőn a rollátorral.
- Ne használja a rollátort mozgólépcsőn.
- Ne használjon nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket, kivéve a MOBIÁK által jóváhagyottakat.
- Ne álljon a termékre.
- A terhet csak a kosárban vagy a táskában szabad szállítani. Legyen óvatos, ha nehéz terhel van, a táska maximális terhelhetősége 2,5 kg.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a váz nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincsenek repedések vagy törések a vázon.)

2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy a váz teljesen ki van-e nyitva. A termék teljesen ki van-e húzva, és ebben a helyzetben van-e rögzítve.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Ellenőrizze, hogy a csavarok és a gombok biztonságosan meg vannak-e húzva és jó állapotban vannak-e.
6. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopását, hogy biztosítsa a termék személyek és tárgyak számára való abszolút biztonságos használatát.
7. Ha gyorszáras tengelyek vannak, ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve.
8. Ellenőrizze az első és hátsó kerekek kopását.
9. Ellenőrizze a gumibroncsokat, a gumibroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékházakat (fékeket). A fékek nem fognak megfelelően működni, ha a nyomás túl alacsony, vagy ha a gumibroncs és a kerékház közötti rés túl nagy.
10. Győződjön meg arról, hogy a kerekek haj-, szosz- és egyéb törmelékmentesek.
11. Nem javasoljuk, hogy a terméket bárkinek kiadja anélkül, hogy először teljes körűen felmérné a felhasználó egyedi igényeit. Fontos, hogy a termék a megfelelő támogatást nyújtsa a felhasználónak, egy képzett szakember utasításai szerint. Ez mind a felhasználó biztonsága, mind a felépülési folyamata érdekében szükséges.

FIGYELMEZTETÉS!

A következő módszereket csak tapasztalt betegek alkalmazhatják. Ha nem rendelkezik tapasztalattal, kérje meg egy kísérő segítségét! **A rollátor összeszukásához vagy kinyitásához fel kell emelni az ülőfelületet, majd meg kell húzni vagy meg kell nyomni a keretnek a táska alatt található részét.**

SÉTA A ROLLÁTORRAL:

1. Helyezze a terméket közel magához.
2. Lépjen egyet a szék felé, miközben a kapaszkodókat használja támasztékként.



LEÜLÉS SZÉKRE A ROLLÁTORRAL:

1. Álljon a rollátorral ellátott szék elé, lábainak hátsó része érintse a széket.
2. Húzza be a rögzítőféket fékezett állásba.
3. Helyezze a kezét a szék karfájára, hajoljon kissé előre, és üljön le óvatosan.



FELÁLLÁS SZÉKBŐL A ROLLÁTORRAL:

4. Húzza be a rögzítőféket fékezett állásba.
5. Helyezze a görgőt maga elé, használja a szék karfáit támasztékként, és óvatosan emelkedjen álló helyzetbe.
6. Miután stabilan álló helyzetben van, tegye a kezét a görgő fogantyúira.
7. Oldja ki a rögzítőféket, és lépjen a görgő felé.



EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Kerülje el a lépcsőket vagy akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget egy kísértől!
2. A felhasználók ne használják a terméket közlekedési eszköz használata közben.
3. A termék kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a termék nem mozog.
4. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben. SÉRÜLÉSVESZÉLY

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

- A termék rendszeres ellenőrzése és vizsgálata segít megőrizni élettartamát és hatékonyságát.
- A járókeret minden részét gyakran tisztítsa.
- A tisztítandó felületeken csak rongyot és enyhe szappant használjon.
- A kerekek tisztításához használjon egy másik tiszta és nedves rongyot vagy keféjét (de ne drótkefét!).
- A kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítsa. Ügyeljen a kerekek szárítására. Veszélyes a kerekszék használata nedves kerekekkel.
- Ezután használjon tiszta rongyot, és a termék használata előtt szárítsa meg alaposan.
- NE hagyja nedvesen a terméket.
- Ha fertőtleníteni kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert az összes általánosan hozzáférhető felület letörlesztésével.
- Ne használjon súrolószert.
- Ne használjon gőztisztítót.
- Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket.

FONTOS!

A korrózióveszély miatt a rollátort nem szabad hosszú ideig kültéren, nedves éghajlaton vagy párás környezetben tárolni.

FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos és képzett képviselővel.
- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan átalakításából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a jelen dokumentumban található információkat.
- A termékeken található mérések $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.

KÖRNYEZETVÉDELME

Ha egy napon úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt az újrahasznosító központokról, ahová a terméket le kell adni.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása segíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNYJELENTÉS:

A készülék használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

GARANCIA:

A **0812215** termékkódra a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, rossz karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elkophatnak, mint például a kárpitozás, a kerekek, a fékek vagy más műanyag alkatrészek.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), szállítók által okozott károk vagy hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A garancia nem terjed ki a szervizelésre vagy a pótalkatrészre, kivéve, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója megvizsgálta. A garanciális áruk szállítási költségeit a felhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

A. MELLÉKLET MŰSZAKI ADATOK - MÉRETEK

MBK Kód	Magyar leírás
0812215	Rollátor Járókeret „Mighty”

	0812215
Keret	Alumínium
Keret	Összecsukható
Szín	Fekete
Fogantyúk	Magasság állítható
Fékek	Biztonsági fékek a fogantyúkon, amelyek rögzíthetők
Hátulsó kerekek	7,3" x 1,4" (188 x 36 mm) Tömör
Elülső kerekek	7,3" x 1,4" (188 x 36 mm) Tömör
Max. teherbírása	180 kg
A táska max. teherbírása	2,5 kg

						
0812215	56cm	62cm	55cm	86-99cm	8.3Kg	180Kg



B. MELLÉKLET. ÖSSZESZERELÉS

A rollátorokat összeszerelve és használatra készen szállítjuk. Előfordulhat, hogy a fogantyúrészt össze kell szerelnünk.

A kezében lévő termék eltérhet a következő fotókon láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

<u>Hajtsa ki a rollátort:</u> 1. Fogja meg a terméket, és győződjön meg arról, hogy mind a négy kerék stabilan áll a talajon. 2. Nyomja lefelé az acélrudat a termék kihajtásához. 3. Amikor az oldalsó merevítők egyenes vonalban vannak, a termék teljesen ki van hajtva. 4. Engedje le az ülést a megfelelő helyzetbe.	<u>A rollátor összecsukása:</u> 1. Hajtsa fel az ülést. 2. Emelje fel a rudat a termék összecsukásához.	<u>A kosár felszerelése:</u> Helyezze a táskát a csatlakozási pontokra a speciális hevederekkel, és zárja le a speciális kapcsokkal.
	<u>A kézifék használata:</u> 1. Húzza felfelé mindkét fékkar (A) felfelé a járóféket. 2. A rögzítőfék behúzásához nyomja le teljesen a fékkarokat (A). Egy hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a fék a megfelelő helyzetben van. 3. A rögzítőfék kioldásához húzza felfelé a fékkarokat. 4. Gyenge fékhatás esetén a fék beállítását szakképzett szakembernek kell elvégeznie. <u>Lásd lent : 1. ábra</u>	
A fogantyú magasságának beállítása 1. Helyezze a fogantyúkat a speciális bevágásokba. Illessze a fogantyúcsövet a fő vázcsőhöz. 2. Rögzítse a fogantyúkat a kívánt magasságba az alátét vagy a fogantyú meghúzásával (modelltől függően).		

1. ábra

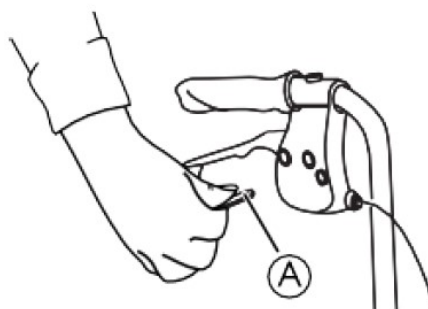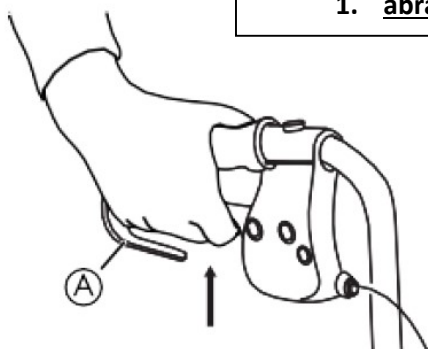

C. MELLÉKLET. JELÖLÉSEK

A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön nyomtatott szimbólumok leírása

	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati utasítást
	Sorozat szám		Ne használja ha a csomagolás sérült
	Tételszám		Rögtön felfelé
	Egyedi eszközazonosító		Napfénytől távol tartandó
	Tartsa szárazon		Halmozási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hullékáról szóló irányelv

 MOBIAC S.A.
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiaccare.com

