

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HOSSZÚ LÁB- ÉS SÍPCSONT- TÁMASZTÓ

"AIR WALKER BASIC LONG" O-1182

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o., a lengyel piac vezető orvosi kellék-és rehabilitációs termékszállítójának termékét választotta. Ez a használati útmutató tippeket és javaslatokat tartalmaz a termék megfelelő használatához.



FIGYELMEZTETÉS! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatáért, a biztonsági előírások be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.

II. JELLEMZŐK

MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Cipőméret
S	35-38
M	38-40
L	40-43
XL	43-46

ÖSSZETÉTEL

Polivinil- klorid (PVC) 45%,
Poliészter 35%,
Poliuretán 20%

Az "AIR WALKER BASIC LONG" hosszú boka- és sípcsont- rögzítő könnyű szerkezetének köszönhetően nem terheli a sérült végtagot. Egykamrás levegőrendszerrel, beépített pumpával és szellőzőszeleppel rendelkezik a fokozott védelem és a beteg állapotához igazítható kompresszió érdekében. A nyitott kialakítás megkönnyíti a fel- és levetést. A lekerekített, csúszásmentes talp biztonságos és fiziológiás járást biztosít.

III. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ÉS ALKALMAZÁS

Az AIR WALKER BASIC LONG ortézis kiváló alternatívája a hagyományos gipszrögzítésnek, jelentősen javítva a kényelmet. A levegőrendszer állítható nyomóereje csökkenti a vérömlenyek és a duzzanat kockázatát. Teljesen nyitott kialakításának köszönhetően vizuálisan ellenőrizhetjük a sérülést és fenntarthatjuk a megfelelő végtaghigiénit.

A termék a következőkre használható:

- Műtét utáni kezelés (szalag-, lágyrész- és ínsérülések),
- Nem műtéti kezelés (lábközépcsonttörések, súlyos deformitások),
- Stabil láb- és ízületi törések,
- Törések (talus, bokaficam) utáni műtét utáni ellátás, valamint az érintett terület állandó vagy átmeneti diszfunkciójának utókezelése és rehabilitációja.

IV. ELLENJAVALLATOK

- A sípcsont vagy a szárkapocscsont proximális szakaszának instabil vagy törött részei,
- Lágyrész- károsodások és sebgyógyulási problémák,
- Meglévő nyirokelvezetési problémák,
- A túl szoros rögzítés fokozott fájdalmat okozhat, míg a túl laza rögzítés a kívánt hatás elmaradását eredményezheti.
- Ha bőrkárosodások jelentkeznek a rögzítés helyén, annak használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett végezhető.
- A rögzítés használatát a kezelőorvosnak kell megvizsgálnia különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

V. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- Használat előtt konzultáljon egészségügyi szakemberrel a rendeltetésszerű használatról, a termék kiválasztásával és a használat módjával kapcsolatban.
- Az ortézis felvételének módját képzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).
- A terméket és annak alkatrészeit csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Ha a termék használata során fájdalom, duzzanat, érzésváltozás vagy bármilyen szokatlan reakció jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz.
- Éjszakai használat csak akkor engedélyezett, ha a kezelőorvos azt javasolja.
- Az ortézis hosszú távú használata korlátozott aktív és passzív ízületi mozgást és izomsorvadást eredményezhet. Ezért ajánlott rendszeresen végezni a kezelőorvos javaslatára képzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat.
- A terméket a jelen kézikönyvben és a termék címkéjén található ajánlásoknak megfelelően tisztán tartani. Az eszköz nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrkárosodáshoz vezethet.
- A terméket tilos használni, ha bármely alkatrész hiányzik. Két azonos vagy különböző terméket tilos egyszerre használni.
- Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

VI. HASZNÁLAT

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék megfelelő méretű.
2. Az ortézis felvétele előtt lazítsa meg az összes pántot, és húzza le a belső szövetbélés cipzárvját. Helyezze a lábát a cipőbe, tekerje a bélést a lába és a vádlója köré, és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a légpumpa pontosan a láb közepén helyezkedik el. Rögzítse a cipő összes pántját, rögzítve azt a lábához a levegőrendszer felfűtéséhez. Fordítsa el a pumpa alatti szelepet az óramutató járásával megegyező irányba, és fújja fel a ballont, amíg szorosan nem illeszkedik.
3. Vigyázzon, ne fújja túl a ballont. Minden használat után eressze le a készüléket a szelep óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával.

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy rendszeresen mossa le a készüléket. Mosás előtt távolítsa el a készülék fém részeit (ha lehetséges), és zárja be az összes tépőzáras zárat.

- Kézzel mosható legfeljebb 40°C-on, semleges, antiallergén mosószerrel.
- Langyos vízben öblítse le, ne használjon öblítőt.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehérítse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Szárítsa fektetve, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120°C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.
- Biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát.

VIII. HASZNÁLAT VÉGE

Ha a gyártó ajánlásai szerinti termékellenőrzés során bármilyen rendellenességet észlel, olvassa el a „Tisztítás és karbantartás” című részben található utasításokat – azonnal hagyja abba a használatát.

IX. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az ortézis rendeltetésszerű használati ideje 3 év. Ez az időszak hosszabb vagy rövidebb lehet a használat gyakoriságától és a karbantartástól függően.

X. GARANCIA

A Gyártó biztosítja a Vevőt, hogy az eladott termék vadonatúj és kiváló minőségű.

A termékre garancia vonatkozik (a részletes garanciafeltételek a gyártó weboldalán találhatók).

A terméket rendeltetésszerűen és a használati utasításban ajánlott módon kell használni.

	Gyártó		Lejáratí idő
	CE jelölés		Felfelé, ne fordítsa meg
	Katalógusszám		Védje a nedvességtől
	Modellszám		Törékeny, óvatosan kezelje
	Gyártási dátum		Ne vágja el
	Olvassa el a használati utasítást		Újrahasznosítás
	Orvosi eszköz		Kézzel mosható
	Egyedi termékazonosító kód		Ne fohérítse
	Figyelmeztetés		Ne vasaljon
	Tételkód		Ne vegytisztítsa
	Mennyiség		Ne szárítsa szárítógépben



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Varsó, Lengyelország e-
mail:info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



A használati utasítás kiadásának dátuma:
01.2025 v.2