

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

"AIR WALKER BASIC SHORT" RÖVID LÁB- ÉS SÍPCSONT ORTÉZIS O-118 3



FIGYELEM! A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Vásárláskor kérjük, ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen aggályát jelezze a termék forgalmazójának. Mennyiséggel/minőséggel kapcsolatos aggályok esetén kérjük, kövesse a jótállási jegyen található utasításokat, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

a jótállási jegy utasításait, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

I. TERMÉKLEÍRÁS

Az **"AIR WALKER BASIC SHORT"** rövid bokarögzítő könnyű kialakításának köszönhetően csökkenti a sérült végtag terhelését. Egykamrás levegőrendszerrel, beépített pumpával és szellőzőszeleppel rendelkezik a jobb védelem és a beteg állapotához igazítható kompresszió érdekében. A nyitott kialakítás megkönnyíti a fel- és levenést. A lekerekített, csúszásmentes talp biztonságos és fiziológiás járást biztosít.

II. TULAJDONSÁGOK

Az AIR WALKER BASIC SHORT ortézis kiváló alternatívája a hagyományos gipszrögzítésnek, jelentősen javítva a kényelmet. Az állítható nyomóerő a levegőrendszeren keresztül csökkenti a vérömlenyek és a duzzanat kockázatát. Teljesen nyitott kialakítása lehetővé teszi a sérülés vizuális ellenőrzését és biztosítja a megfelelő végtaghigiénit.

III. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelő.
- Az ortézis felvétele előtt lazítsa meg az összes pántot, és húzza le a belső szövetbélés cipzárját.
- Helyezze a lábát a cipőbe, tekerje a bélést a lába és a vádlija köré, és rögzítse.
- Győződjön meg arról, hogy a légpumpa pontosan a lába közepén helyezkedik el.
- Rögzítse az összes cipőpántot, rögzítve a lábához.
- A légrendszer felfújásához fordítsa el a pumpa alatti szelepet az óramutató járásával megegyező irányba, és pumpálja a gömböt, amíg szorosan nem illeszkedik. Vigyázzon, ne fújja túl a levegőt. Minden használat után eressze le a szelepet az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

IV. MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Cipőméret
S	35-38
M	38-40
L	40-43
XL	43-46

V. ÖSSZETEVŐK

Polivinil-klorid (PVC) 4 5%,
Poliészter 35%,
Poliuretán 20%

VI. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- A terméket csak orvos utasítása szerint szabad használni.
- A rögzítő felhelyezésének módját szakképzett orvosi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).
- A terméket és alkotóelemeit kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni.
- Ha a termék használata során fájdalom, duzzanat, érzésváltozás vagy bármilyen szokatlan reakció jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék éjszakai használata csak akkor engedélyezett, ha azt orvosa javasolja.
- A fűző hosszú ideig tartó használata korlátozott aktív és passzív izületi mozgást és izomsorvadást eredményezhet. Ezért ajánlott rendszeresen végezni a szakképzett egészségügyi személyzet által orvosa tanácsára kiválasztott gyakorlatokat.
- A terméket a jelen kézikönyvben és a terméken található címkén található ajánlásoknak megfelelően tisztán tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrkárosodáshoz vezethet.
- A terméket tilos használni, ha bármelyik alkatrész hiányzik. Két azonos vagy különböző termék nem használható egyszerre.
- A készüléket érintő minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

VII. HASZNÁLAT

A termék a következő esetekben használható:

- Műtét utáni kezelés (szalag-, lágyrész- és ín sérülések),
- Nem műtéti kezelés (lábközepcsont- törések, súlyos deformitások),
- Stabil láb- és izületi törésekre,
- Törések utáni műtét utáni ellátásra (talus, boka ficam),
- Az ortézis által fedett terület állandó vagy átmeneti diszfunkciójának utókezelésére és rehabilitációjára.

VIII. ELLENJAVALLATOK

- A sípcsont vagy a szákapocscsont proximális szakaszának instabil vagy törött részei,
- Lágyrész-károsodások és sebgyógyulási problémák,
- Meglévő nyirokelvezetési problémák,
- A fűző túl szoros felhelyezése fokozott fájdalomhoz vezethet, míg a túl laza felhelyezés a tervezett funkció hiányát eredményezheti,
- Ha bőrkárosodás lép fel a fűző viselési területein, annak használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett végezhető,
- A fűző használatát a kezelőorvosnak kell értékelnie különböző eredetű memóriazavarokban szenvedők, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A terméket rendszeresen ajánlott mosni. Mosás előtt távolítsa el a termék fém alkatrészeit (ha lehetséges), és rögzítse az ortézis összes tépőzáras rögzítőjét.

- Kézzel, legfeljebb 40 °C-os hőmérsékleten, semleges, hipoallergén mosószerrel mossa.
- Öblítse le langyos vízzel, ne használjon öblítőszert.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehérítse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa szárítógépben!
- Szárazon, árnyékos és jól szellőző helyen szárítsa – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120 °C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait. 120 °C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Állítsa függőlegesen, ne döntse fel
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje
	Ne vágja el
	A csomagolás újrahasznosítható
	Kézzel mosható
	Ne fűtse
	Ne vasalja
	Ne vegytisztítsa
	Ne szárítsa szárítógépben



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varsó, Lengyelország

tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1

Kiadva:

Garanciakártya
RÖVID LÁB- ÉS SÍPCSONT TÁMASZ
„AIR WALKER BASIC SHORT” O-1183

Modell	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

- A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
- A termékre a jótállási kártyán feltüntetett értékesítés dátumától számított 18 hónapos jótállási időszak vonatkozik.
- A garanciális igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
- A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a terméket rendeltetésszerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
- A javításokat/cseréket a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
- A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és övbeállítási tevékenységeket;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket;
 - az öv mechanikai és hőhatás okozta károsodásait, pl. törés, szakadás stb.
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, független javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérülések.
- Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
- A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusai végzik.
- Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfél viseli.
- A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
- Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont töltse ki)

Sz	Értékesítés dátuma	Rendelészám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					

