

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ágyéki keresztcsonti öv szilikon betéttel "LUMBOMAX SKIN" O-1432



FIGYELEM! A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot

**Vásárláskor kérjük, ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen aggályát jelezze a termék kiállítójának.**

**Mennyiséggel/minőséggel kapcsolatos aggályok esetén kérjük, kövesse a jótállási jegyben található utasításokat, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.**

**I. TERMÉKLEÍRÁS**

- A "Lumbomax Skin" szilikonbetétes derék-keresztcsonti támaszóöv rendkívül rugalmas, légáteresztő és kompressziós kötött anyagból készült, tépőzárral rögzíthető, és négy merevítővel rendelkezik, amelyek tehermentesítik és stabilizálják az derék-keresztcsonti gerincet. Szilikonbetéttel van ellátva, amely további támaszt nyújt az derék-keresztcsonti gerincnek.  
Háttámla magassága: 26 cm

**II. JELLEMZŐK**

Az öv stabilizálja az derék- keresztcsonti gerincet, és korlátozza a hajlító és nyújtó mozgások tartományát. Támogatja a különböző derék- keresztcsonti diszfunkciók gyógyulási és rehabilitációs folyamatát azáltal, hogy korlátozza a csigolyaközi ízületek mozgását és elősegíti a kedvező nyomáeloszlást az érintett területen.

Orvosi terápiában támasztékként használva megakadályozza a tünetek kiújulását. Javítja a mobilitást akut, szubakut és krónikus állapotokban.

**III. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelő.
- Rögzítse a szilikonbetétet az öv belső részéhez a kijelölt helyen.
- Helyezze az övet a dereka köré úgy, hogy a gerince pontosan az öv hátsó részén található csontok között helyezkedjen el.
- Rögzítse a tépőzáras pántot a hasán.

**IV. MÉRETTÁBLÁZAT**

Méret	<b>Derekbőség közvetlenül a köldök felett</b>
S	70-80cm
M	80-90cm
L	90-100cm
XL	100-110cm
XXL	110-120cm

**V. ÖSSZETÉTEL**

Poliamid 55%, Elastán 45%

## VI. Használati szabályok

- Ezt a terméket csak orvosi utasítás szerint szabad használni.
- A rögzítő felhelyezésének módját szakképzett orvosi személyzetnek kell bemutatnia, a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).
- A terméket és alkatrészeit csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Az övet pamut pólóra kell felhelyezni és viselni, nem közvetlenül a testen.
- A bőrfelület, ahol a rögzítő a testhez van rögzítve, legyen tiszta – a termék viselése közben ne alkalmazzon gyógyhatású kenőcsöket vagy krémeket.
- Ne alkalmazzon borogatást közvetlenül a rögzítő felhelyezése el őtt.
- Nem ajánlott a termék napi 8 óránál hosszabb ideig történő használata (kivéve, ha orvos másképp rendel i).
- Az ortézis hosszú távú használata izomsorvadáshoz vezethet, ezért ajánlott rendszeresen végezni a kezelőorvos tanácsára képzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat.
- Evés vagy nagy mennyiségű folyadék fogyasztása előtt vegye le vagy lazítsa meg az ortézist.
- Tartsa tisztán a terméket a jelen kézikönyvben és a termék címkéjén található ajánlásoknak megfelelően. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrkárosodáshoz vezethet.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrész hiányzik. Ne használjon két azonos vagy különböző terméket egyszerre.

## VII. ALKALMAZÁSOK

A termék felhasználható:

- Konzervatív kezelés támogatására,
- Degeneratív betegségek krónikus fájdalmának kezelésére,
- Az ortézis által fedett gerincszakasz állandó vagy átmeneti működési zavarainak utókezelésére és rehabilitációjára,
- Betegségek, sérülések és sportsérülések után,
- Különböző etiológiájú akut vagy krónikus radikuláris fájdalom szindrómák esetén,
- Az ágyéki-keresztcsonti gerinc passzív stabilizálásának támogatására.

## VIII. ELLENJAVALLATOK




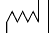













- Ha az ortézis alkalmazási területein bőrkárosodások jelentkeznek, annak használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges.
- A termék használata nem ajánlott terhes nők vagy m űtét után közvetlenül átesett személyek számára.
- Az ortézis hasúregre, valamint közvetve a rekeszizomra és a tüdőre gyakorolt kompressziós hatása miatt gyomor-, bél-, máj-, epehólyag-, légzési rendellenességekben és csökkent légzési kapacitásban szenvedők rosszul tolerálhatják a használatát. Ilyen esetekben a termék használatát konzultálni kell orvosukkal.
- Stressz vizeletinkontinenciában és húgyúti fertőzésekben szenvedőknel a termék használata súlyosbíthatja ezeket a tüneteket. Ilyen esetekben a termék használatát konzultálni kell orvosukkal.
- Az ortézis használatát orvosnak kell megvizsgálnia különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

## IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék rendszeres mosását javasoljuk. Mosás előtt távolítsa el a merevítőket a termék hátuljáról, és zárja be az összes tépőzárát.

- Kézzel mosható legfeljebb 40°C-on, semleges, antiallergén mosószerrel.
- Langyos vízben öblítse le, ne használjon öblítőt.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehéritse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa gépben.
- Szárítsa kiterítve, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120°C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

JELMAGYARÁZAT

	Gyártó
	CE jelölés
	Referenciaszám
	Gyártási dátum
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Tételszám
	Felhajtva, ne fordítsa meg
	Száraz helyen tartandó
	Kényes, óvatosan kezelendő
	Ne vágja ki
	Újra hasznosítható csomagolás
	Kézzel mosható
	Ne fehéritse
	Ne vasalja
	Ne vegytisztítsa
	Ne szárítsa szárítógépben



**REHA FUND Sp. z o.o.**  
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska  
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.1  
 Wydano:

GARANCIAKÁRTYA:  
"LUMBOMAX SKIN" ÁGYÉKI-KERESZTI TÁMASZTÓÓV SZILIKON  
BETÉTTTEL O-1432

Model:	Sorozatszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

GARANCIA FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciajegyben szereplő termék vadonatúj és kiváló minőségű.
2. A termékre a garanciajegyben feltüntetett eladási dátumtól számított 12 hónapos garancia vonatkozik.
3. A garanciális igényt csak akkor vesszük figyelembe, ha a vásárlást igazoló bizonylattal együtt megfelelően kitöltött garanciajegyet nyújtanak be.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy hivatalos szerviztechnikusai javítják ki, feltéve, hogy a terméket rendeltetészerűen és a használati utasításnak megfelelően használták
5. A javítást/cserét a lehető leghamarabb, de legfeljebb 14 napon belül elvégezzük attól a dátumtól számítva, hogy a berendezést a szervizközpontba átvették.
6. A jótállás nem terjed ki:
  - a használati utasításban leírt karbantartással, tisztítással és szijbeállítással kapcsolatos tevékenységekre;
  - a normál használat során kopásnak és elhasználódásnak kitett alkatrészekre;
  - a szij mechanikai és hőkárosodására, pl. törés, szakadás stb.;
  - a berendezés használati utasításával ellentétes használatából, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő károkra.
7. Mielőtt a berendezést hivatalos szerviztechnikusoknak visszaküldené, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy alkalmas legyen a szervizvizsgálatra.
8. A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusainak kell elvégezniük. 9. Alaptalan reklamáció esetén a szállítási költségek a vevőt terhelik.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő azon jogait, amelyek az áru szerződésnek való nem megfelelőségéből erednek.

SZERVIZ JAVÍTÁSI LISTA *(a szervizközpont tölti ki)*

Szám.	Jelentés dátuma	Rendelési szám	Hiba leírása/Javítás terjedelme	Javítás dátuma	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					

## MEGJEGYZÉS