

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Felső végtag heveder O-1500



**FIGYELEM!** Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a terméket először használná.

A vásárlás után ellenőrizze a termék teljességét és minőségét.

#### I. TERMÉKLEÍRÁS

A felső végtag heveder tartós poliészter szövetből készült. Nyitott kialakításának és méretválasztékának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a testhez.

#### II. TULAJDONSÁGOK

A heveder mind a jobb, mind a bal karon használható. A végtagot egy állítható vállpánt tartja, amely lehetővé teszi a végtag pontos pozicionálását a megfelelő magasságban. A széles támasztóöv biztosítja a testsúly egyenletes eloszlását a hát teljes hosszán.

#### III. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelően van kiválasztva.
- Helyezze a rögzítőt a csuklójára, szükség esetén helyezze a hüvelykujját a speciális zsebbe.
- Vezesse át a pántot a karján, és rögzítse a hevedert a csat segítségével.
- A pánt hosszát a beállítóval állítsa be.

#### IV. MÉRETTÁBLÁZAT

| Méret | Az alkar hossza a hajlatnál mérve (a könyöktől a csuklóig) |
|-------|------------------------------------------------------------|
| S     | 18-24 cm                                                   |
| M     | 21-27 cm                                                   |
| L     | 28-33 cm                                                   |
| XL    | 34-40 cm                                                   |

#### V. ÖSSZETÉTEL:

100% poliészter

## VI. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- Ez a termék kizárólag orvos által ajánlott módon használható.
- Az ortézis felhelyezésének módját képzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót gondozó személy jelenlétében (ha alkalmazható).
- A terméket és alkatrészeit kizárólag a rendeltetésszerűen szabad használni.
- A terméket közvetlenül a testen vagy a ruházaton kell viselni.
- A terméket a jelen utasításokban és a termékhez csatolt címkén szereplő ajánlásoknak megfelelően tisztán kell tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrváltozásokhoz vezethet.

A termékkel kapcsolatos bármely súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

## VII. HASZNÁLAT

A termék felhasználási területei:

- Gipsz rögzítéséhez, védelemként és enyhítésként a gipsz eltávolítása után,
- A vállízület, az acromioclavicularis ízület, a könyökízület ín-szalagjainak részleges károsodása esetén,
- A felső végtag parézisének esetén,

## VIII. ELLENJAVALLATOK

- Az ortézis tapadásának helyén fellépő bőrváltozások esetén a használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges,
- Az ortézis használatát a kezelőorvosnak kell értékelnie különböző eredetű memóriazavarral küzdő személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

## IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A terméket rendszeresen ajánlott mosni. Mosás előtt rögzítse az ortézis összes tépőzáras rögzítőjét.

- Kézzel, legfeljebb 30 °C-os hőmérsékleten, semleges, hipoallergén mosószerrel mossa.
- Lukacsos vízben öblítse ki, ne használjon öblítőszeret.
- Ne fehérítse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa,
- Ne szárítsa szárítógépben,
- Szárazon, árnyékos és jól szellőző helyen szárítsa – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.

## X. Garancia

A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy az eladott termék új és kiváló minőségű. A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán található). A terméket a rendeltetésének és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

XI. A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

|                                                                                   |                                   |                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Gyártó                            |  | Felső rész, ne fordítsa meg          |
|  | CE jelölés                        |  | Védje a nedvességtől                 |
|  | Katalógusszám                     |  | Törékeny, óvatosan kezelje           |
|  | Gyártás dátuma                    |  | Ne vágja el                          |
|  | Olvassa el a használati utasítást |  | Ne használja, ha a csomagolás sérült |
|  | Figyelmeztetés                    |  | Újrahasznosítás                      |
|  | Tételkód                          |  | Napfénytől távol tartandó            |
|  | Orvosi eszköz                     |  | Kézzel mosható                       |
|  | Egyedi termékazonosító kód        |  | Ne szárítsa függőleges helyzetben    |
|  | Mennyiség                         |  | Ne vasalja                           |
|  | Modellszám                        |  | Ne vegytisztítsa                     |
|  | Lejáratí idő                      |  | Ne szárítsa szárítógépben            |