

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NATHAN 820 ZUHANYZÓSZÉK

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o. termékét választotta, amely a lengyel piacon vezető szállítója az orvosi eszközöknek és rehabilitációs berendezéseknek. Ez a használati utasítás a termék megfelelő használatához elengedhetetlen irányelveket és javaslatokat tartalmaz.



FIGYELEM! A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonsági szabályok be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.



II. JELLEMZŐK

Katalógusszám:	RF-820
Teljes szélesség:	50 cm
Ülés szélessége:	50 cm
Teljes magasság:	75–85 cm
Teljes hossz:	48 cm
Ülésmagasság:	39–49 cm
Ülésmélység:	35 cm
Háttámla magasság:	37 cm
Maximális biztonságos terhelés:	110 kg
Súly:	2,9 kg

A FELHASZNÁLT ANYAGOK LISTÁJA

Váz	alumínium
Ülés	PE (polietilén)
Háttámla	PE (polietilén)
Sapka	TPR (termoplasztikus gumi)
Zárógomb	acél

SZÉK ALKATRÉSEI

A szék alkatrészei az 1. ábrán láthatók.



A fenti fotó csak illusztrációs célokat szolgál.

III. A TERMÉK CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSA

A szék lehetővé teszi a mozgáskorlátozott és idősebb emberek számára, hogy megőrizze napi személyes higiéniáját, miközben jelentős fokú függetlenségüket is megőrzik. Ennek a terméknek köszönhetően jelentősen csökken az elesés vagy más, a zuhanyozás során előforduló sérülések kockázata.

IV. ELLENJAVALLATOK

A termék ellenjavallata, a felső végtagok sérülései és működési zavarai, amelyek megakadályozzák a széken való ülést, az alsó végtagok sérülései, amelyek megakadályozzák az egyensúlyt, motoros koordinációs zavarok, a vestibularis rendszer problémái, a gerinc instabilitása.

V. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A biztonság érdekében kérjük, tartsa be az alábbi ajánlásokat:

1. A zuhanyzószek használata előtt győződjön meg arról, hogy:
 - a. a szék magassága megfelelően van beállítva;
 - b. a reteszelőgombok megfelelően működnek;
 - c. a gumidugók jó állapotban vannak;
 - d. minden lába azonos magasságban van.
2. Csak eredeti tartozékokat használjon. Nem eredeti alkatrészek használata esetén a szék nem állítható be megfelelően, ami esésveszélyt jelent.
3. Ne haladja meg a szék maximális terhelhetőségét.
4. Ne tárolja 0 °C alatti hőmérsékleten.
5. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lábtartók azonos magasságra vannak állítva.
6. Ne próbálja meg víz, jég vagy olaj segítségével fel- vagy lefelé mozgatni a széket egy lejtőn.
7. A széket sík felületen kell használni.
8. Minden használat előtt ellenőrizze a szék stabilitását és a csavarok szorosságát.
9. A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.



FIGYELEM! Ezen biztonsági szabályok be nem tartása súlyos balesetekhez vezethet.


VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGASSÁGÁLLÍTÁS

1. Nyomja meg a szék lábán található biztonsági gombot, és óvatosan forgassa el.
2. Állítsa be a kívánt magasságot.
3. Irányítsa a gombot a megfelelő lyukra, hogy a láb a kívánt magasságban rögzüljön.
4. Ismételje meg a fenti lépéseket minden lábon, ügyelve arra, hogy minden láb ugyanolyan magasságra legyen állítva.



FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy minden láb megfelelően van rögzítve és azonos magasságra van állítva.

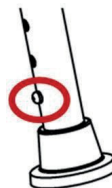

ÖSSZESZERELÉS

1. Készítse elő az összeszerelő készletet (1. ábra).
2. Helyezze be a szék lábait az ülés alá (2. ábra).
3. Ezután szerelje be a háttámla csöveket (3. ábra).
4. Helyezze be a csavarokat a lyukakba, majd egyenletesen csavarja be őket – minden csavart egy kicsit csavarjon be. Ha a csavarokat egymás után teljesen becsavarja, problémák adódhatnak az összeszerelés során (4. ábra).
5. Helyezze be a háttámlát (5. ábra).
6. Ellenőrizze, hogy az összecsuksott szék stabil-e (6. ábra).



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra

A fenti fotók csak illusztrációs célt szolgálnak.

VII. LEÜLÉS ÉS FELÁLLÁS

1. Győződjön meg arról, hogy a szék stabil és használatra kész.
2. Álljon háttal a székeknek úgy, hogy térdé hátsó része érintse a szék elejét.
3. Nyújtsa hátra a kezét, és tegye a tenyerét az ülésre.
4. Lassan üljön le a székre, hajlítsa be a könyökét, és ha lehetséges, a térdét és a csípőjét is.
5. A székről való felálláshoz tegye a kezét az ülésre, és emelje fel magát.

VIII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a széket, hogy nincs-e rajta sérülés vagy látható kopásnyom.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy:
 - a. nincs-e repedés vagy hajlítás a vázon;
 - b. a rögzítógomb megfelelően rögzíti a beállított magasságot;
 - c. a csövek furatai nem nagyodtak meg vagy nyúltak meg;
 - d. az alsó kupakok nem kopottak – ha igen, azokat ki kell cserélni;
 - e. a szék más részei nem lazaak vagy sérültek.
2. A széket ajánlott rendszeresen puha ruhával és szappanos vízzel tisztítani.
3. A tisztítás után a széket puha ruhával szárítsa meg.
4. A rendszeres tisztítás megakadályozza a csövek szennyeződését és biztosítja a szék megfelelő működését.



FIGYELEM! Ne használjon oldószereket, fehérítőt vagy súrolószereket a termék tisztításához.

IX. A HASZNÁLAT BEFEJEZÉSE

Ha a gyártó ajánlásainak megfelelően elvégzett termékellenőrzés során bármilyen rendellenességet talál - Lásd a használati utasítás „Tisztítás és karbantartás” című részét – azonnal hagyja abba a termék használatát. Használat után a terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

X. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A termék várható élettartama 5 év. Ez az időtartam a termék használatának gyakoriságától és karbantartásától függően hosszabb vagy rövidebb lehet.

XI. Garancia

A gyártó biztosítja a vásárlót arról, hogy az eladott termék teljesen új és kiváló minőségű. A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán találhatók). A terméket a rendeltetésszerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

XII. SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE

	Gyártó		Figyelmeztetés
	CE jelölés		Tételkód
	Katalógusszám		Mennyiség
	Gyártás dátuma		Felső rész, ne fordítsa meg
	Lásd a használati utasítást		Védje a nedvességtől
	Orvosi eszköz		Törékeny, óvatosan kezelje
	Egyedi termékazonosító kód		

