

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ZUHANYSZÉK KEVIN 821

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o. termékét választotta, amely a lengyel piacon vezető szállítója az orvosi segédesszközöknek és rehabilitációs berendezéseknek.

Ez a használati utasítás a termék megfelelő használatához elengedhetetlen irányelveket és javaslatokat tartalmaz.



FIGYELEM! A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonsági szabályok be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.



II. JELLEMZŐK


Katalógusszám:	RF-821
Teljes szélesség:	50 cm
Ülés szélessége:	50 cm
Teljes magasság:	41–51 cm
Teljes hossz:	39 cm
Ülésmélység:	31 cm
Ülésmagasság:	39–49 cm
Maximális biztonságos terhelés:	110 kg
Súly:	1,9 kg

A FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

Váz	alumínium
Ülés	PE (polietilén)
Sapka	TPR (termoplasztikus gumi)
Zárógomb	acél

SZÉK ALKATRÉSZEI

- A és B. csavarok és alátétek
C. ülés
D és E. keret, csövek és gumivégek

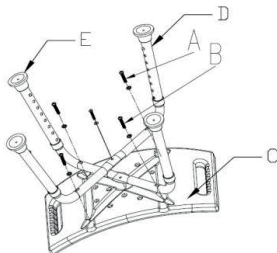

III. RENDELTETÉS

A szék segítségével a mozgáskorlátozott és idős emberek is megőrizhetik napi személyes higiéniájukat, miközben jelentős mértékű függetlenségüket is megőrzik. Ennek az eszköznek köszönhetően jelentősen csökken az elesés vagy más, a zuhanyozás során előforduló sérülések kockázata.

IV. ELLENJAVALLAT

Ellenjavallatok: álláskeptelenség, az egyensúlyt megakadályozó alsó végtag sérülések, motoros koordinációs zavarok, vestibularis problémák, gerinc instabilitás. Értelmi fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket gondozó felügyelete nélkül.

V. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Biztonsági okokból kérjük, vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat: A zuhanyzószek használata előtt győződjön meg arról, hogy:

- az ülés magassága megfelelően van beállítva;
- a reteszelőgombok megfelelően működnek;
- a gumidugók jó állapotban vannak;
- minden láb ugyanolyan magasságban van.

Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Nem eredeti alkatrészek használata a szék nem megfelelő beállításához vezethet, ami leesésveszélyt okozhat.

Ne lépje túl a szék maximálisan megengedett terhelését.

Ne tárolja 0°C alatt.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lábszárak azonos magasságra vannak állítva.

Ne próbálja meg a széket lejtőn felfelé vagy lefelé mozgatni vízzel, jéggel vagy olajjal.

A széket sík felületen kell használni.

Minden használat előtt ellenőrizze a szék stabilitását és a csavarok meghúzásának megfelelőségét.

A termékkel kapcsolatos minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGASSÁGÁLLÍTÁS

- Nyomja meg a szék lábán található biztonsági gombot, és óvatosan forgassa el.
- Állítsa be a kívánt magasságot.
- Íranyítsa a gombot a megfelelő lyukra, hogy a lábat a kívánt magasságban rögzítse.
- Ismétlje meg a fenti lépéseket mindegyik lábon, úgy e l v e arra, hogy minden láb ugyanolyan magasságra legyen állítva.



FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy minden láb megfelelően van rögzítve és azonos magasságra van beállítva.

ÖSSZESZERELÉS

- Készítse elő az összeszerelő készletet (1. ábra).
- Helyezze be a lábakat az ülés alá (2. ábra).
- Helyezze be a csavarokat a lyukakba, majd egyenletesen csavarozza be őket – minden csavart apránként csavarozzon be. Ha a csavarokat egymás után teljesen becsavarja, problémák adódhatnak az összeszerelés során (3. ábra).



1. ábra



2. ábra



3. ábra

A fenti fotók csak illusztrációs célt szolgálnak.

LEÜLÉS ÉS FELÁLLÁS

- Győződjön meg arról, hogy a szék stabil és használatra kész.
- Álljon háttal a székeknek úgy, hogy térdé hátsó része érintse a szék elejét.
- Nyújtsa hátra a karját, és tegye a kezét az ülésre.
- Lassan üljön le a székre, hajlítsa be a könyökét, és ha lehetséges, a térdét és a csípőjét is.
- A székről való felálláshoz tegye a kezét az ülésre, és emelje fel magát.



FIGYELEM! A szék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szék állapotát, nincs-e rajta sérülés vagy látható kopásnyom. Rendszeresen ellenőrizze, hogy:

- a. nincs-e repedés vagy hajlítás a vázon;
- b. a reteszelő gomb megfelelően rögzíti a beállított magasságot;
- c. a csöveken lévő lyukak nem tágultak vagy megnyúltak;
- d. az alsó kupakok nem kopottak – ha igen, azokat ki kell cserélni;
- e. a szék egyéb alkatrészei nem lazák vagy sérültek.

Javasoljuk, hogy a széket rendszeresen tisztítsa puha ruhával és szappanos vízzel.

Tisztítás után törölje szárazra a széket puha ruhával.

Használat után ellenőrizze a csavarok szorosságát és a szék stabilitását.

A rendszeres tisztítás megakadályozza a csövek szennyeződését, és biztosítja a szék megfelelő működését



FIGYELEM! Ne használjon oldószereket, fehérítőt vagy súrolószereket a szék tisztításához.

VIII. A HASZNÁLAT BEFEJEZÉSE

Ha a gyártó ajánlásainak megfelelő ellenőrzés során bármilyen rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a használatát. Lásd a Tisztítás és karbantartás című részben található utasításokat. Használat után a terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

IX. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A szék várható élettartama nincs meghatározva. Ez az időtartam a termék használatának gyakoriságától és karbantartásától függően hosszabb vagy rövidebb lehet.

X. Garancia

A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy az eladott termék teljesen új és kiváló minőségű.

A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán találhatók). A terméket a rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

XI. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Gyártó		Figyelmeztetés
	CE jelölés		Tételkód
	Katalógusszám		Mennyiség
	Gyártás dátuma		Felső rész, ne fordítsa meg
	Lásd a használati utasítást		Védje a nedvességtől
	Orvosi eszköz		Törékeny, óvatosan kezelje
	Egyedi termékazonosító kód		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Varsó,
Lengyelország e-
mail:info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/PL/RF-821/2/03.12.2024
A használati utasítás kiadásának dátuma: 12.2024 v.2

