



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ RHINO 24"

USER MANUAL: WHEELCHAIR RHINO 24"

REF : 0815018

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: RHINO KERKESSZÉK



RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁS:

Ezeket a kerekesszékeket mozgáskorlátozott vagy szellemileg korlátozott személyek szállítására tervezték. Lehetővé teszik mozgáskorlátozott vagy korlátozott mozgásképességű személyek szállítását, és önjáróan, valamint segítő segítségével WC-használatra és személyes higiéniára is használhatók.

Ezek a kerekesszékek WC-ülőként és zuhanyozás közben is használhatók.

MŰSZAKI ADATOK

Lásd az A. MELLÉKLETET:

MÉRETEK

Lásd a B. MELLÉKLETET:

ÖSSZESZERELÉS

Lásd a C. MELLÉKLETET:

SZIMBÓLUMOK

Lásd a D. MELLÉKLETET:

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, akkor ne használja ezt a terméket vagy más kapható alkatrészt. Ha nem érti a használatát vagy az óvintézkedéseket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a megfelelő műszaki szakemberrel a termék használata előtt, mert ez kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Ne lépje túl a maximális teherbírást.
- Különös óvatossággal kell eljárni a mozgó alkatrészek közelében, amelyek végtagbecsípődést és sérülést okozhatnak.
- Ne próbálja meg a kerekesszéket levehető részeinél fogva felemelni.
- A kerekesszékekbe való be- és kiszállás önállóan is elvégezhető, feltéve, hogy megfelelő a mozgásképesége és a felsőteste erős.

FONTOS!

A kerekesszék kialakítása maximális biztonságot nyújt. A felhasználók azonban veszélynek lehetnek kitéve, ha nem megfelelően használják a kerekesszékeket. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem specifikus vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- A WC-s kerekesszékeket csak beltérben szabad használni.
- Legyen óvatos az első használat során.
- Ismerkedjen meg a kerekesszékével.
- Használja a kerekesszéket sík talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha a padlóról kell felemelnie azokat a térdéi közé nyúlva.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha fel kell másznia az ülésre.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne próbáljon meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajmembránnal borított területen.
- Ne használjon a MOBIÁK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a kerekesszékben.
- Ne dohányozzon és ne használjon lángot a termék közelében.
- Védje a terméket a karcolásoktól, horzsolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

HASZNÁLAT ELŐTT:

- A termék biztonságos használata érdekében ellenőrizze, hogy a váz nem sérült-e. A vázon nincsenek-e repedések vagy törések.
- Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
- Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitott-e. Ha nem, nyomja le az ülést a váz oldalairól.
- Ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e.
- Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy a termék használata személyek és tárgyak számára teljesen biztonságos legyen.
- Ha gyorszáras kerekek vannak, ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve vannak-e.

FIGYELMEZTETÉS!

A következő módszereket csak tapasztalt betegek alkalmazhatják. Ha nem rendelkezik tapasztalattal, kérjen segítséget egy kísérőtől. **BESZÁLLÁS A KEREKESSZÉKBE:**

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb Önhöz.
2. Kapcsolja be a kerékrögzítőket.
3. Fogja meg a segítőjét, és lassan üljön a megfelelő pozícióba.

KISZÁLLÁS A KEREKESSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékrögzítőket. 3. Kérjen segítséget a segítőjétől. 4. Helyezze át testsúlyát arra az ülésre, amelyre át szeretne helyezni.

EGYÉB FONTOS UTASÍTÁSOK:

1. Felálláskor mindkét fogantyúra támaszkodjon. Az egy kézben (és kísérő nélkül) történő megtámasztás balesetet okozhat, ami sérüléssel vagy sérüléssel járhat.
2. Kerülje a lépcsőket vagy akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőjétől:
3. Ezt a kerekesszéket kizárólag egy személy szállítására szabad használni.
4. A felhasználók ne üljenek kerekesszékekben, miközben bármilyen közlekedési eszközt használnak.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat üléshez vagy felálláshoz, **FELBORULÁSVESZÉLY**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. Mozgás közben NE érjen a mozgó alkatrészekhez **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít fenntartani a kerekesszék élettartamát és hatékonyságát.

HETENTE

1. Ellenőrizze a WC állapotát törések, repedések vagy szivárgások szempontjából.
2. Ellenőrizze az acélváz csavarjait. Ha laza csavarokat talál, húzza meg őket. Tisztítsa meg az anyagot szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
3. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy krómozott vagy festett felületekhez való speciális termékekkel.
4. Ellenőrizze a kerékfékeket, és erősítse meg azok működését.
5. Ellenőrizze az első és hátsó kerekek sérüléseit.

NEGYEDÉVENTE

1. Zsírozza vagy olajozza be az összes súrlódásnak vagy kopásnak kitett alkatrészt.
2. Húzza meg a csavarokat és anyákat.
3. Ellenőrizze a WC stabilitását (kerekek nélkül) vagy egyensúlyát (kerekekkel).
4. Végezze el a szék állapotának általános felülvizsgálatát, és szükség esetén javítsa meg.

ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végeztesen teljes körű felülvizsgálatot egy minősített szervizszolgáltatónál.
2. A beteg biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket kétfévente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett mind a váz, mind a kárpit alaposan megtisztítható.

- Használat után azonnal tisztítsa meg a WC-tárolót.
- A megjelenésének megőrzése érdekében az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződéseket szivaccsal, enyhe mosószerrel és meleg vízzel távolíthatja el, a felület textúrájának irányában haladva.
- Száradás előtt öblítse le tiszta vízzel.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Törölje át száraz, tiszta, puha ruhával.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell tisztítani.
- A vázat rendszeresen kell tisztítani enyhe mosószerrel.
- A bőr üléses kerekesszékeket száraz ruhával kell tisztítani.
- A kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal kell tisztítani. Ügyeljen a kerekek szárítására. Veszélyes a kerekesszék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

FIGYELMEZTETÉS (!):

A termék zuhanyozás közben is használható, de használat után azonnal tisztítsa meg és törölje át alaposan egy száraz ruhával.

FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos és képzett képviselővel.
- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- A MOBIK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan módosításából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a jelen dokumentumban található információkat.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.

KÖRNYEZETVÉDELME:

Ha egy napon úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosító központokba kell leadni a terméket.

- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 2017/745/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNYJELENTÉS:

A készülék használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának. GARANCIA: A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá a használat során vagy idővel elkopó alkatrészekre, például a kárpitozásra, a kerekekre vagy a fékekre.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), szállítás okozta károkra vagy hibákra a garancia nem vonatkozik.

A szervizelésre vagy a pótalkatrészekre nem vonatkozik garancia, kivéve, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója megvizsgálta. A garanciális áruk szállítási költségeit a felhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

A. MELLÉKLET ELŐÍRÁSOK

MBK KÓD	HU LEÍRÁS
0815018	RHINO 24" KEREKESZÉK

	0815018
KERET	ALUMÍNIUM
KERET	NEM ÖSSZESZAUKHATÓ
ZUHANYZÁSBAN HASZNÁLHATÓ	IGEN
ÜLÉS	PU ÜLÉS, VÍZÁLLÓ, WC-VEL
FEJTÁMASZ	NEM
KARTÁMASZOK	VÍZÁLLÓ PU BETÉTTTEL FELHAJTHATÓ
LÁBTARTÓK	LESZERELHETŐ, FORGATÓ, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGGAL
HÁTULSÓ KEREKEK	24" SZILÁRD MAG KERÉK GYORSKIOLDÁSSAL
ELÜLSŐ KEREKEK	5" TÖMÖR
MAX. TEHERBÍRÁS	136 kg

B. MELLÉKLET MÉRETEK

											
0815018	49 cm	47 cm	43 cm	42.5 cm	66 cm	98.5 cm	95.6 cm	53 cm	24" 5"	136 Kg	17 Kg

* Lábtartókkal és hátsó kerekekkel. A lábtartók és hátsó kerekek nélküli kerekesszék súlya 11 kg.

C. MELLÉKLET. ÖSSZESZERELÉS


A kezében lévő kerekesszék eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló. A kerekesszék részben összeszerelve érkezik, és hozzá kell adnunk a háttámlát, a kartámaszt és a lábtartót.

A csomagolódoboz kinyitásakor kérjük, ügyeljen az összes alkatrészre a dobozban. Ha a földön szereli össze, először helyezze bele a fő kartondobozból származó papírt vagy valami mást a termék védelme és a karcolódások megelőzése érdekében. Először válassza szét és csoportosítsa az alkatrészeket, majd kezdje meg az összeszerelési folyamatot.

1) Szükség esetén helyezze az ülést a vázra, és nyomja le, amíg a rögzítőkonzolok be nem kattannak. Helyezze be a háttámla részét az ülésváz csőfuratába, és nyomja le a végéig, majd rögzítse a háttámla részeit a kívánt helyzetben a kézzel ellátott, gömb alakú gombbal.




2) Helyezze be a kerekeket a váz alsó részén található lyukakba, és rögzítse a "C" rögzítőcsapokkal. Győződjön meg arról, hogy a vázon minden kerék azonos magasságban van. A 24"-os gyorszáras hátsó kerék esetében nyomja meg a gombot, hogy a csavart be tudja helyezni a vázfuratba.

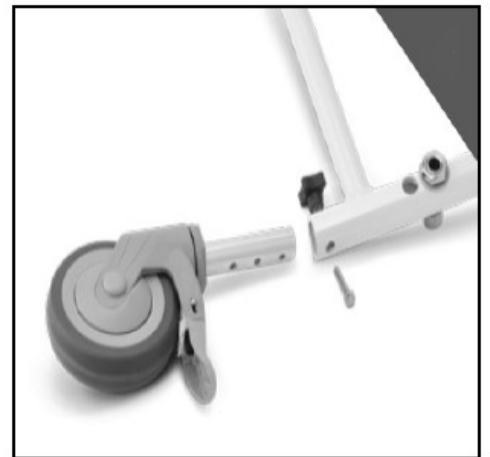


3) Helyezze a lábtartót az ülés előtti vázfuratba, és nyomja le. Fordítsa befelé, hogy rögzítse a kívánt helyzetben. Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a másik lábtartóval is.



4) Helyezze a WC-csészét a fedéllel az ülőpárna alatti hornyokba. 5) Fékezéshez nyomja meg a kerék piros részét. Kioldáshoz húzza meg a piros részt, vagy nyomja a kereken lévő fekete műanyag részt.

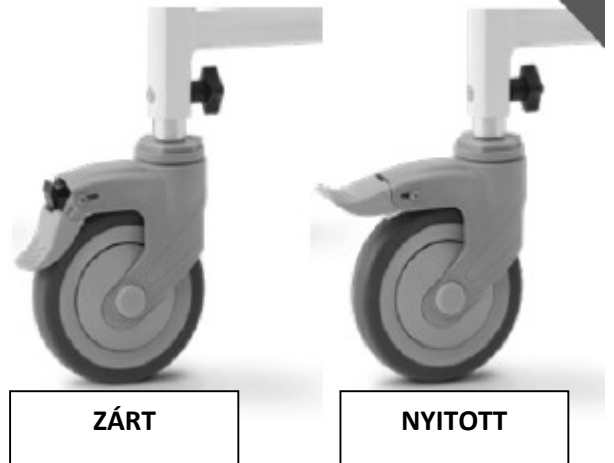

A fékek rögzítik a kerekesszéket álló helyzetben, hogy megakadályozzák az elgurulást. A fék behúzásához nyomja előre a fékkart a tenyerével. (1) A fék kioldásához húzza hátra a fékkart. (2)

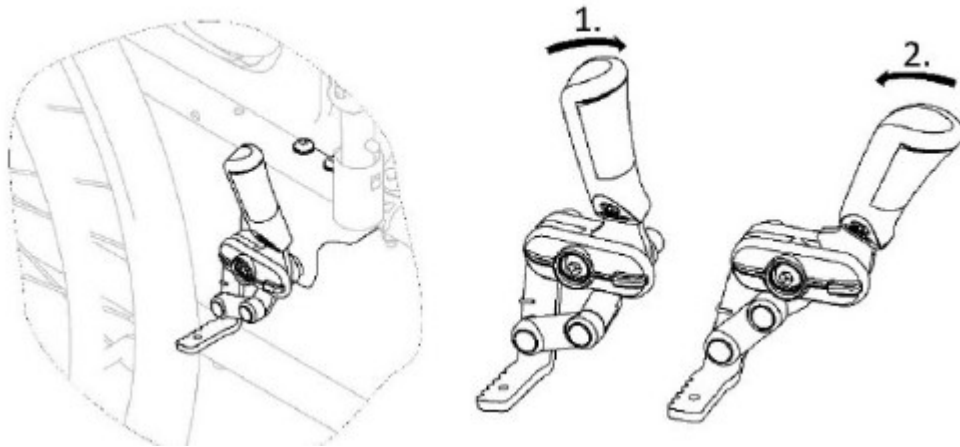

- Soha ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben.
- Ne húzza be a rögzítőféket a kerekesszék lassításához.
- Ne támaszkodjon a rögzítőfékre támasztékként vagy áthelyezéshez. Fék használata közben tartsa távol az ujjait a mozgó alkatrészekről, mindig tartsa a kezét a fékkaron.

A gyorsáras hátsó kerekek eltávolítása:

A kerekesszék gyorsáras rendszerrel rendelkezik a hátsó kerekeken, így könnyen eltávolíthatók, és csökkenthető a tárolóhely az autóban és az otthonban.

A kerék szétszereléséhez nyomja meg a kerék közepén található fekete gombot a kioldáshoz, és ezzel egyidejűleg húzza kifelé a kereket, amíg teljesen ki nem jön az alapjából.

Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a másik keréken.

Az összeszereléshez kövesse a fordított eljárást.



A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön nyomtatott szimbólumok leírása
D. MELLÉKLET. JELÖLÉSEK

	ORVOSI ESZKÖZ		CE JELÖLÉS
	GYÁRTÓ		GYÁRTÁSI DÁTUM
	GYÁRTÁSI SZÁM		OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	SOROZAT SZÁM		NE HASZNÁLJA HA A CSOMAGOLÁS SÉRÜLT
	TÉTEL SZÁM		HELYESEN ITRÁNY FELFELÉ
	EGYEDI ESZKÖZAZONOSÍTÓ		NAPFÉNYTŐL TÁVOLTARTANDÓ
	TARTSA SZÁRAZON		RAKODÁSI MAGASSÁG
	ÓVATOSAN KEZELJE		TÖRÉKENY
	CSAK BELTÉRI HASZNÁKLATRA		AZ ELEKTROMOS ELEKTRONIKUS HALLADÉKOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV