

## **Betegfordító korong 40 cm SD 46800**

### **Használati utasítás**

Art.-Nr. / Item No. 46 800



#### **Használat:**

Az ápolókorong lehetővé teszi az ülésre képes beteg megfordítását vagy a lábaival történő testsúly átvételét (például az ágy széléről a WC-székre). A csökkentett erő kifejtésnek köszönhetően az ápoló és a beteg is jelentősen könnyebben érzi magát.

Mozgás- és funkcionális zavarokkal küzdő betegek számára a test hossz tengely körüli forgásának területén. (Az ápolókorong mindkét irányban 360°-ban elforgatható.)

#### **Minden használat előtt:**

Az első használat előtt kérje ki szakképzett személyzet utasításait a forgóasztal használatára. Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze, hogy mind a 6 csúszásgátló megvan-e. Ha a csúszásgátló gombok hiányoznak, a forgóasztalt tilos használni.

#### **Használat:**

Az ápolókorongot a csúszásgátló gombokkal a padlóra kell helyezni. A beteg lábát az ápolókorong közepére kell helyezni. Az ápolónak az egyik lábát az eszközre kell helyeznie, mielőtt felemeli a beteget, és saját testsúlyát rá kell helyeznie. Ez megakadályozza az ápolókorong nem kívánt

elfordulását. Miután a beteget felemelték, a forgókoronggal a kívánt helyzetbe forgatható, majd visszaereszthető.

### **Karbantartás**

A transzferkorong nem igényel különösebb karbantartást, de rendszeresen ellenőrizni kell repedések vagy sérülések szempontjából. Ha ilyen hibák jelentkeznek, a transzferkorongot tilos tovább használni.

### **Tisztítás/fertőtlenítés:**

- ▶ Ne használjon éles vagy súroló tárgyakat a tisztításhoz, kérjük, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószeret használjon.
- ▶ **Fertőtlenítés:** Minden kereskedelmi forgalomban kapható, műanyagokhoz alkalmas fertőtlenítőszer használható.
- ▶ **Fontos:** Kérjük, tartsa be a gyártó utasításait.

### **Biztonsági utasítások:**

- ▶ A felhasználó testsúlya nem haladhatja meg a 125 kg-ot!
- ▶ A transzferkorongot csak megfelelő fizikai és mentális képességekkel rendelkező személyek használhatják. Figyelem, a forgótányért soha ne használja egyedül, hanem gondozóval (gondozóval) együtt.
- ▶ Mindig a transzferkorong közepét használja!
- ▶ Ne engedje, hogy a csúszásgátló gombok olajos és szappanos anyagokkal érintkezzenek, csúszásveszély!
- ▶ Csak sík és száraz padlót használjon, csúszásveszély! Ne használja a transzferkorongot nedves helyiségben (fürdőszobában) vagy szőnyegpadlón.
- ▶ A transzferkorong nem játék, ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a termékkel!
- ▶ A transzferkorong 5°-70°C hőmérséklet-tartományban használható.
- ▶ Ha a transzferkorong alkatrészei megsérülnek, azokat tilos tovább használni!

### **Garancia:**


A törvényben foglalt garanciális igényeknek megfelelően. A garancia alól ki vannak zárva a természetes kopásból, a szándékosságból, a gondatlanságból vagy a nem megfelelő kezeléssel vagy használatból eredő hibák, valamint az olyan hibák, amelyek a szerszám értékét vagy használhatóságát csak jelentéktelen mértékben befolyásolják. Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztést szolgáló módosításokra.

### **Megjegyzés:**

A transzferkorong módosítását vagy javítását csak képzett személyzet végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával.

### Technikai adatok:

Cikkszám SD 46 800			
Anyag	Műanyag	Átmérő	kb. 40 cm
Szín	Fekete	Súly	1 kg
Magasság	kb. 2cm	Max. terhelés	125 kg
Élettartam	kb. 5 év f		

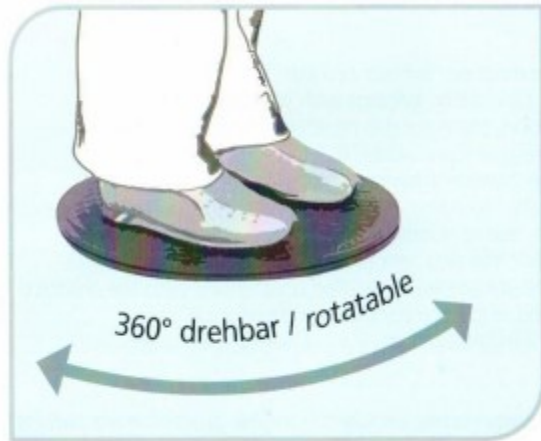

WG426-0225



Sundo Homecare GmbH | Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen  
Internet: <https://www.sundo-homecare.de>



Produkt und Verpackung sind gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen zu entsorgen | Product and packaging must be disposed of in accordance with local regulations

