

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: **ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ "SEAL"**

USER MANUAL: **COMMODE CHAIR "SEAL"**

REF: **0815017**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
SEAL ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SZOBA WC



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A toalettszéket mozgáskorlátozott személyek használhatják toalett-segítőként, és kizárólag beltéri használatra tervezték. Speciális igényű személyek, betegek, idősek és mozgáskorlátozottak számára készült.

JAVALLATOK:

A toalettszék támaszt nyújt időseknek, kerekesszék-használóknak, az alsó végtagok, az ágyéki és a csípő mozgáskorlátozottaknak, valamint mindenkinek, akinek nehézséget okoz a függőleges testhelyzet fenntartása a napi személyes higiénia során. A felhasználónak képesnek kell lennie fenntartani az egyensúlyát ülés és emelés közben, valamint elegendő képességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ülő helyzetben maradjon.

ELLENJAVALLATOK:

A toalettszéket nem szabad használni, ha a felhasználónak egyensúly- vagy érzékelési zavarai vannak.



SPECIFIKÁCIÓK

KERET	ACÉL - 6 SZINTBEN ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
ÜLÉS ANYAGA	VINIL LÁNGGÁTLÓ TULAJDONSÁGOKKAL
HÁTTÁMLA ANYAGA	VINIL LÁNGGÁTLÓ TULAJDONSÁGOKKAL

MÉRETEK

43cm	46cm	58-62cm	48-63cm	34.5cm	8 Kg	130Kg

SZIMBÓLUMOK

Lásd az A. MELLÉKLETET:

ÖSSZESZERELÉS

Lásd a B. MELLÉKLETET

KARBANTARTÁS

A toalettszék rendszeres ellenőrzésének célja a segédeszközként való megfelelő működésének megerősítése, és legalább havonta egyszer el kell végezni.

- Ellenőrizze a toalett állapotát törések, repedések vagy szivárgások szempontjából.
- Ellenőrizze a műanyag alkatrészeket lazaság, repedés vagy törés szempontjából.
- Ellenőrizze a WC-fotel stabilitását.

Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS

Használat után azonnal tisztítsa meg a WC-fotelt. Először öblítse le meleg vízzel. Ezután használjon puha, enyhe mosószerrel vagy fertőtlenítő oldattal átitatott ruhát. Törölje át tiszta, puha ruhával.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon savas vagy maró hatású oldatokat.

Javasoljuk, hogy a keretet és az ülőkét enyhe mosószerrel vagy fertőtlenítő oldattal tisztítsa. Saját kényelme érdekében az oldat hozzáadása után használhat szórófejes flakont. Fújja be a terméket, majd tisztítsa meg szivaccsal. Tiszta ruhával hagyja megszáradni a felületeket.

FONTOS(!)

- A magasság beállításakor győződjön meg arról, hogy a 4 láb magassága azonos, és a csapok szilárdan rögzítve vannak.
- Száraz, szellőző, korrozív anyagoktól mentes helyiségben kell elhelyezni.
- Szállításkor óvatosan kell kezelni.

A WC-fotel használata előtt győződjön meg a következőkről:

- Teljesen ki van húzva és rögzítve ebben a helyzetben.
- Az ülés megfelelően van felszerelve és rögzítve ebben a helyzetben.
- A WC-szék megfelelően van elhelyezve a megfelelő nyílásban.
- A kereten nincsenek repedések vagy törések.
- Ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot a termék közelében.
- Védje a terméket a horzsolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.
- A magasság beállításakor győződjön meg arról, hogy a 4 láb magassága azonos, és a csapok szilárdan vannak rögzítve.
- Száraz, szellőző, korrozív anyagoktól mentes helyiségben kell elhelyezni.
- Szállításkor óvatosan kell kezelni.

EGYÉB UTASÍTÁSOK

- Ülés vagy felállás közben nyomja le a fogantyúkat, hogy a WC-szék mozdulatlan maradjon és ne csússzon el.
- Tilos csúszós felületen használni.
- Felálláskor mindkét fogantyúra támaszkodjon. Az egykezes (és kísérő nélküli) támasztás balesetet okozhat, kárt vagy sérülést okozva.
- Rendszeresen tisztítsa a WC-széket.
- Ne hagyja nedvesen a WC-széket.
- Ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül a WC-szék közelébe mehessenek.

FIGYELMEZTETÉS

Probléma esetén ne használja a WC-fotelt, amíg a problémát meg nem oldották.

- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából eredő következményekért.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a WC-fotelen.
- Ne próbálja meg felemelni a WC-fotelt a levehető részeinél fogva.
- Tartsa távol a becsomagolt WC-fotelt hőforrásoktól.
- A WC-fotelbe való be- és kiszállás önállóan is elvégezhető, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ha egy napon úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy ha már nem használja, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt a hulladékgyűjtő központokról, ahová a készülékeit le kell adni.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNYJELENTÉS:

A készülék használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

GARANCIA

A WC-fotelre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákra. NEM vonatkozik a használat közben elkopott alkatrészekre sem. A garancia nem vonatkozik a természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol vannak), szállítócégek által okozott károkra vagy hibákra sem. A garanciális áruk szállítási költségeit a vásárló vagy a kereskedő fizeti.

EK megfeleléségi nyilatkozat

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 2017/745/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ANNEX A. JELÖLÉSEK

A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön nyomtatott szimbólumok leírása

MD	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
REF	Termék szám		Olvassa el a használati utasítást
SN	Sorozat szám		Ne használja ha a csomagolás sérült
LOT	Tételszám		Rögtön felfelé
UDI	Egyedi eszközazonosító		Napfénytől távol tartandó
	Tartsa szárazon	3	Halmozási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hullékáról szóló irányelv


ANNEX B. ÖSSZEÁLLÍTÁS



1. HÁTTÁMLA PÁRNÁVAL
2. KARTÁMLA
3. KIVEHETŐ ÜLŐPÁRNA
4. WC-SZÉK ÜLÉS
5. WC FEDÉLLEL
6. MAGASSÁGGAL ÁLLÍTHATÓ CSŐ
7. BEÁLLÍTÓCSAP


A lábak behelyezése

A WC előre össze van szerelve. Állítsa be a lábakat úgy, hogy a WC a kívánt magasságban legyen (hat 12 cm-es lépésben 48-63 cm között), és rögzítse a lábakat a rögzítőkapcsok behelyezésével az ábrán látható módon **(1-2. kép)**.

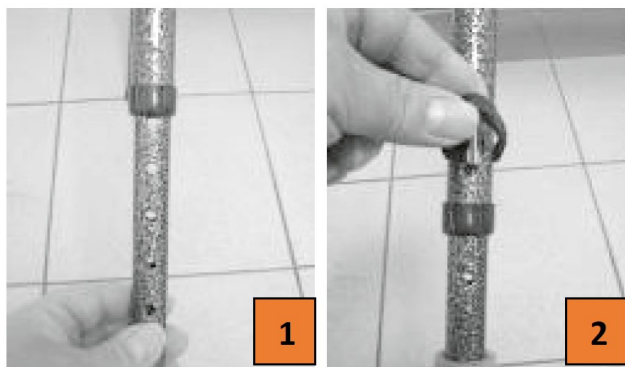

Az ülőke visszahelyezése

A WC-ülőke csak patenttal van rögzítve, és megfelelő erővel felfelé eltávolítható **(3-4. kép)**.

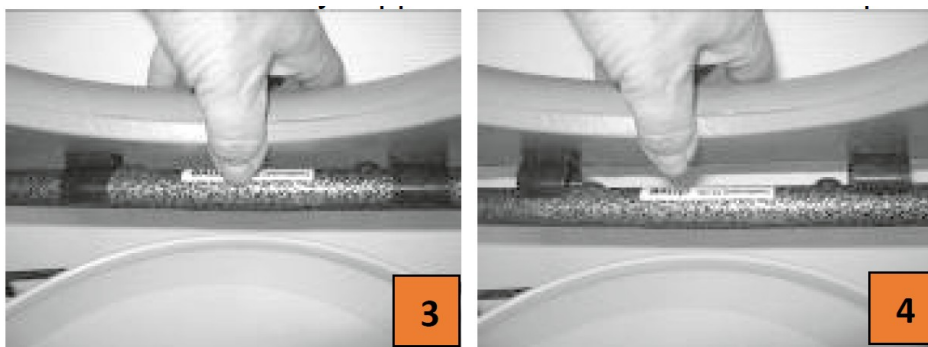

A WC-vödör visszahelyezése

Használat után a WC-vödröt a hordozófogantyúnál fogva vegye ki a tisztításhoz, majd húzza felfelé és ki. Bármelyik oldalról is eltávolíthatja **(5-6. kép)**.

