

„Ülésemelő asszisztens”

Ülésemelő

SD46 777; 46 778

Nem elektromos emelőülés, amelyet bárhová magával vihet



Biztonsági intézkedések, Útmutató Garancia és technikai tulajdonságok:

Azok, akik elvesztették a képességüket, hogy ülő helyzetből segítség nélkül felkeljenek, most kényelmesen, és megfelelő gondossággal állhatnak fel.

Biztonsági Intézkedések:


Az Uplift Seat Assist egyedi, szabadalmaztatott kialakításának középpontjában a biztonság áll. Míg az Ön új Uplift terméke a lehető legbiztonságosabb, néhány óvintézkedést meg kell tennie:

1. Győződjön meg róla, hogy felkeléskor van mibe kapaszkodnia. Az Uplift Seat Assist olyan székeken való használatra készült, amelyek karjai megfelelően stabil ülőfelületet biztosítanak. Az Uplift puha székeken, kanapéken vagy kanapéken való használata javallott. Az Uplift nem ajánlott tolószékbe, autóba vagy nem zárható kerekű irodai székbe.
2. Mindig győződjön meg arról, hogy a szék, amelyen az Upliftet használni kívánja, nem csúszik a padlón. Ha kétségei vannak, helyezze a széket a háttámlával a falhoz vagy más rögzített tárgyhoz.
3. Amikor lehajol, hogy felvegyen valamit, ne helyezzen súlyt a lábára – különben az Uplift aktiválódni kezd.



Súlybeállítások:

1. Állítsa fel az Uplift-et a fogantyúval ellentétes oldalon.
2. Akassza ki a tépőzárát a fogantyú körül az Uplift kinyitásához.
3. Nyomja le az ülőfelület kárpitozott részét, amitől az kifelé hajlik. Ez lehetővé teszi a dugattyú szabad lengését.

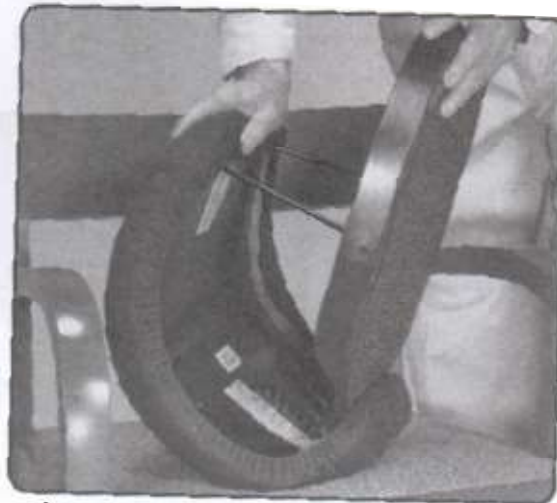

Nyomja le, hajlítsa meg az ülés kárpitozott részét

(A felemelő ülést úgy tervezték, hogy több ezerszer meghajoljon. A hajlítás nem károsítja az egységet.) Válassza ki a hengeren a felhasználónak megfelelő pozíciót és a középső dugattyút a rések között.


4. Válasszon súlybeállítást. Középre állítsa a dugattyúcsapot a két horony közé a felhasználó megfelelő súlybeállításához.




Válassza ki a hengeren a felhasználónak megfelelő pozíciót és a középső dugattyút a rések között

Győződjön meg róla, hogy rögzítő elemek fel vannak felszerelve. (A beállító mérőeszközön lévő nyomtatott számok csak irányadóak. A beállítást a felhasználó képességei és preferenciái alapján kell

kiválasztani. A gyengébb beállítás választása továbbra is lehetővé teszi az enyhe süllyesztést a székbe, de nem fog akkora erőt kifejteni az emelésnél.)

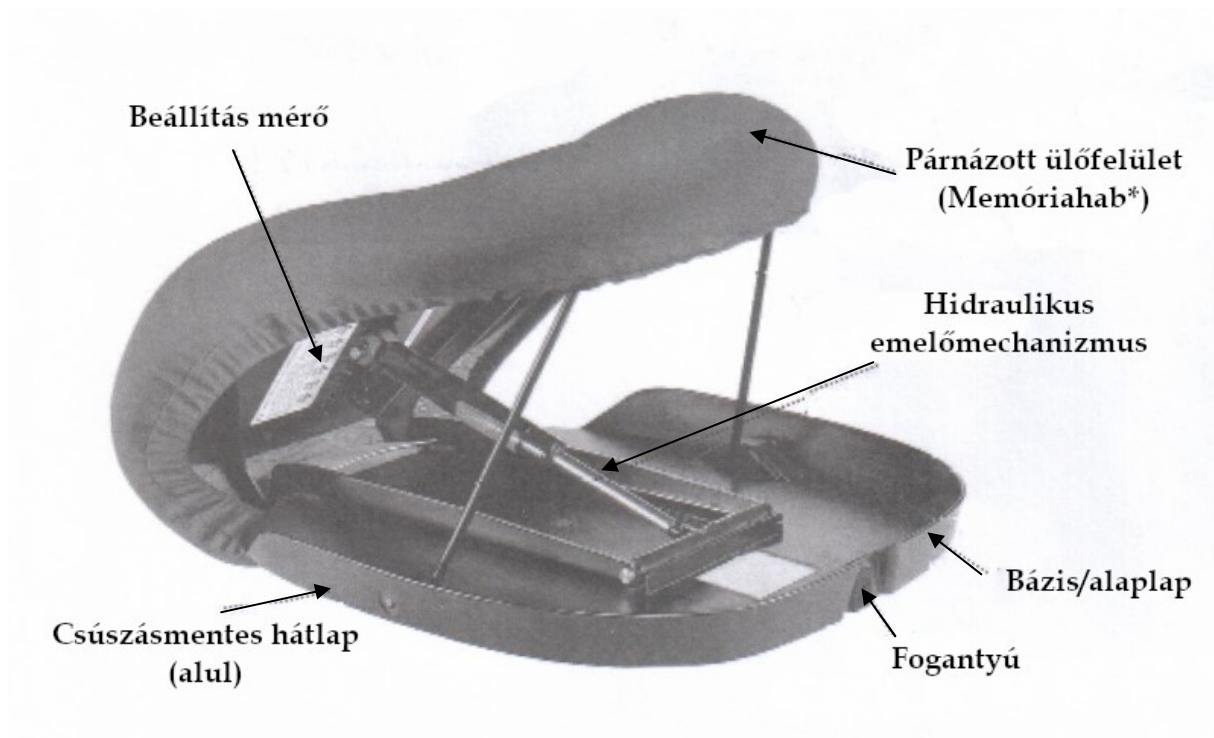

Memóriahab* - A lassan felszabaduló hab alkalmazkodik a test formájához, így kiváló kényelmet biztosít.

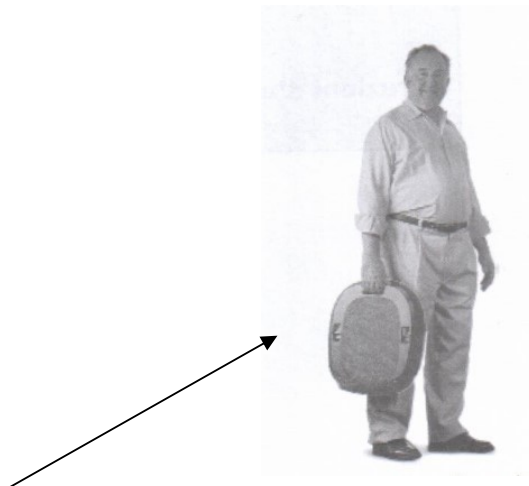

Az eszköz akár kézben is szállítható

Ülés Uplifttel

Miután elvégezte a súlybeállításokat és az Upliftet a székre helyezte, üljön le az Uplift tetején lévő lapos részre. Az Uplift lassan és finoman ülteteti le Önt a székbe. (Megjegyzés: Ha az Uplift nem süllyed le, amikor ráül, állítsa újra a súlybeállítást alacsonyabb súlyra.)



Felkelés az Uplifttel

Amikor készül felállni, az Önnek megfelelő módon álljon fel, (előrehajolva, karjaival és lábaival eltolva). Az Uplift érzékeli fogja, hogy felállást, és lassú és gyengéd felemelést ad.



Levehető huzat

Az Uplift Seat Assist mosható, vízálló fekete huzattal rendelkezik.



A huzat felhelyezése:

1. Miután elvégezte az Uplift súlybeállítását, helyezze asztalra vagy más nagy felülettel rendelkező tárgyra, hogy a nyitott vége öntől elfelé nézzen.
2. Helyezze a „huzat” címkével ellátott végeket az Uplift "hátsó" vagy "felső" oldalára, majd húzza fel, a párna szélei alá.

Elhelyezés a székben

Általában az emelőnek túl kell nyúlnia a szék eleje felé, ahogy az ábrán látható. Azokon a székeken, amelyek nagyon mélyek és megfelelő párnázott felülettel rendelkeznek, az Uplift hátrébb helyezhető. Az Uplift használatakor mindkét kezét tartsa a szék karfáján (vagy más megfelelő támasztékon).




Az Uplift karbantartása

Az Uplift Seat Assist párna felülete speciális tűzálló, vízálló bevonattal van ellátva. A párna felülete enyhe szappannal vagy tisztító szerrel, szivaccsal tisztítható. **(Soha ne merítse teljesen vízbe az Upliftet.)**

A levehető huzat vízálló, poliészter anyagból készült, és mosógépben mosható és levegőn szárítható.

Összecsukás szállításnál:

A „súlybeállítások” módszerével hagyja, hogy a dugattyú az alsó beállítás alatt lengjen

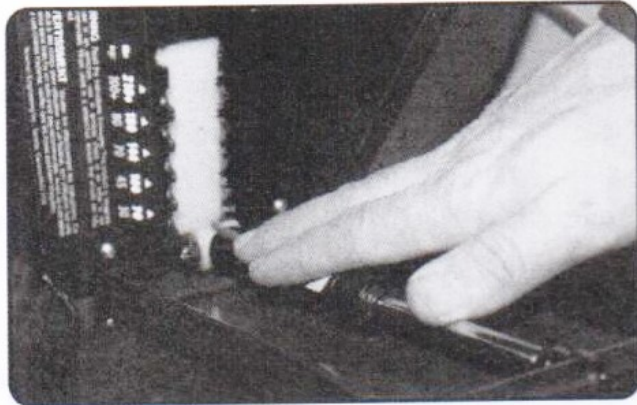

Csukja be az Uplift-et, és tekerje a horgos és hurkos pántot a fogantyún található karika és hurokpárna köré.



Garancia

Jótállási rendelkezések

A Carex Health Brands garantálja, hogy az Uplift Seat Assist anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz a végső vásárlás után két évig.

A garancia nem terjed ki a normál kopásból, gondatlanságból vagy helytelen használatból eredő károkra, és nem ruházható át.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Upliftet saját maga próbálja megjavítani, a garancia érvényét veszti.

Termék visszaküldéséhez

Ha az Uplift nem működik a jótállásnak megfelelően (lásd a Jótállási rendelkezéseket), lépjen kapcsolatba az eredeti vásárlási hellyel.

Technikai tulajdonságok:

Emelő ülés méretei:

- Mélység: (SD 46 777) 19 cm/ (SD 46 778) 48 cm
- Szélesség: (SD 46 777) 17 cm/ (SD 46 778) 43 cm

Teherbírás:

- (SD 46 777) 38-104 kg
- (SD 46 778) 88-159 kg

Termék súlya:

- Súly: 3,6 kg

Huzat:

- Fekete/Vízálló/ 100% poliészter

