



Hideg-meleg migrén maszk

Alkalmazási területek

Fejfájás, migrén, láz, másnapossági tünetek, influenzafertőzések, megfázás, fáradt, égő vagy duzzadt szemek, kozmetikai alkalmazások stb.

Hideg alkalmazás

Tegye a maszkot a hűtőbe (legfeljebb 0 Celsius fokra, ne a fagyasztóba) legalább 2 órára. A hideg alkalmazás ne legyen hosszabb 5 percnél, és szükség esetén 5 perc szünet után megismételhető!

Meleg alkalmazás

Helyezze a maszkot egy edénybe, legfeljebb 45 Celsius fokos vízbe körülbelül 5 percre, vagy a mikrohullámú sütőbe körülbelül 15 másodperces időközönként, maximum 280 watt teljesítménnyel. (Ne hagyja felügyelet nélkül a mikrohullámú sütőt!) A jobb hőeloszlás érdekében melegítés után gyúrja át a maszkot. A tépőzár segítségével a maszk a fejhez illeszthető és zárható

Kezelési utasításokat/útmutató

Ha szennyezett, a maszk, folyó víz alatt tisztítható.

Figyelmeztető közlemény

Vigyázzon; a maszk túlmelegedése égési sérüléseket és a hég károsodását okozhatja. Ne használja újra a maszkot, ha sérült (a gél nem mérgező). Ha a gél a bőrére vagy a szemébe kerül, mossa le bő vízzel.

Bőr- és nyálkahártya-irritáció nem ismert. Csak külső használatra!

Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre,
Kőzúzó köz 2. 26-309223